

## INSTALLATION EINES LERNMODULS IN MÜSE

Stellen Sie vor der Installation eines Lernmoduls von CAE Healthcare sicher, dass sich die Lernmodul-Dateien auf einem externen Speichermedium oder auf der Festplatte der Arbeitsstation des Ausbilders befinden.

**WICHTIG:** Sie müssen vor der Installation eines Lernmoduls eine Verbindung mit Ihrem Simulator hergestellt haben.

### Zugriff auf Müse

1. Melden Sie sich über ein Konto mit den entsprechenden Berechtigungen an der Müse-Software an.

Die Startseite erscheint.

2. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche **System Administration** (Systemverwaltung).

Sie gelangen zum Bildschirm System Administration (Systemverwaltung).



Die Schaltfläche  
**System  
Administration**  
(Systemverwaltung)

Die Startseite

3. Klicken Sie im Bildschirm System Administration (Systemverwaltung) auf **Content Management** (Inhaltsverwaltung).


Die Schaltfläche  
**Content  
Management**  
(Inhaltsverwaltung)



Das Panel Learning Modules (Lernmodule)

Wenn die Schaltfläche Content Management (Inhaltsverwaltung) gewählt wird, erscheint standardmäßig das Panel Learning Modules (Lernmodule). Wenn ein anderes Panel ausgewählt wurde, kehren Sie zum Panel Learning Modules (Lernmodule) zurück, indem Sie auf den Link **Learning Modules** (Lernmodule) klicken.


Im Panel Learning Modules (Lernmodule) können Lernmodule installiert oder gelöscht werden.

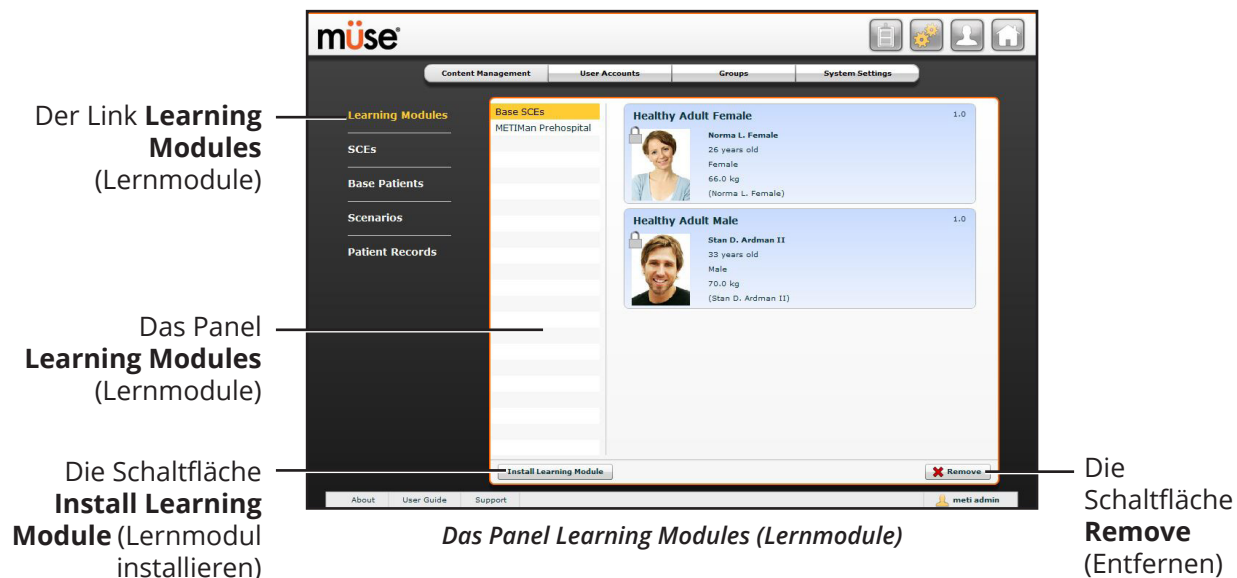

## Installation eines Lernmoduls in Müse

1. Klicken Sie auf **Install Learning Module** (Lernmodul installieren).


Dialogfeld Select file to upload (Datei zum Hochladen auswählen) erscheint.

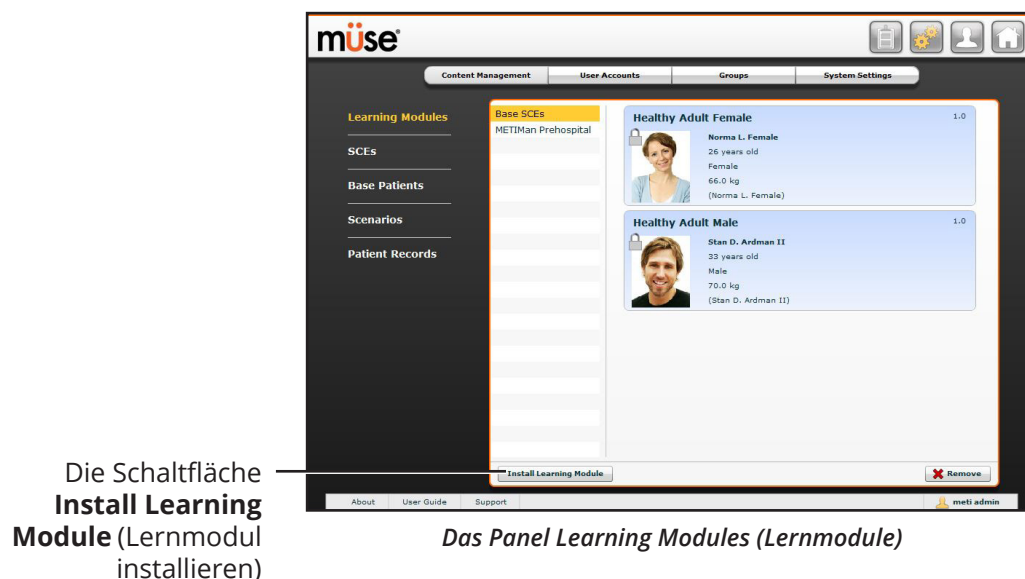

- Suchen Sie die korrekte Lernmodul-Datei auf dem externen Speichermedium oder der Festplatte, wo die Lernmodul-Datei gespeichert ist.

Die Dateierweiterung lautet **.mlm**.

- Wählen Sie die Datei aus, und klicken Sie auf **Select** (Auswählen) oder **Open** (Öffnen).

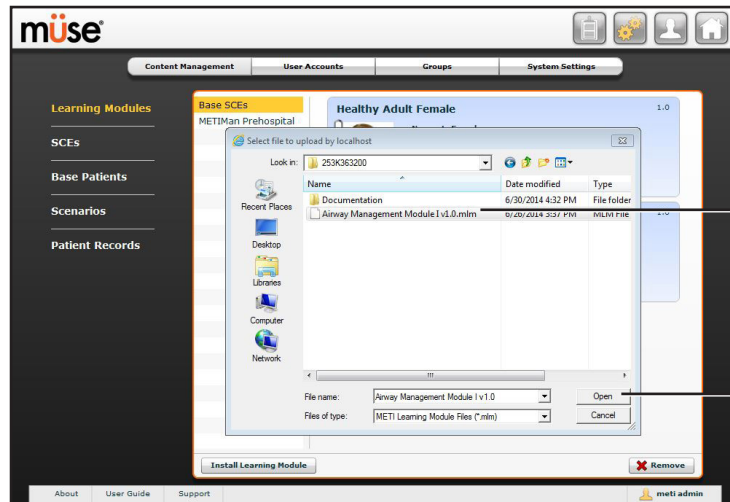

Die **.mlm**-  
Lernmodul-Datei


Die Schaltfläche  
**Open** (Öffnen)

*Das Panel Learning Modules (Lernmodule)*

- Aktualisieren Sie den Bildschirm per Klick auf die Schaltfläche **Home** (Start) in der Müse-Software und kehren Sie dann zum Panel Learning Modules (Lernmodule) zurück.

Das Lernmodul erscheint auf dem Panel Learning Modules (Lernmodule) und kann nun verwendet werden.

Das **Installierte**  
Lernmodul

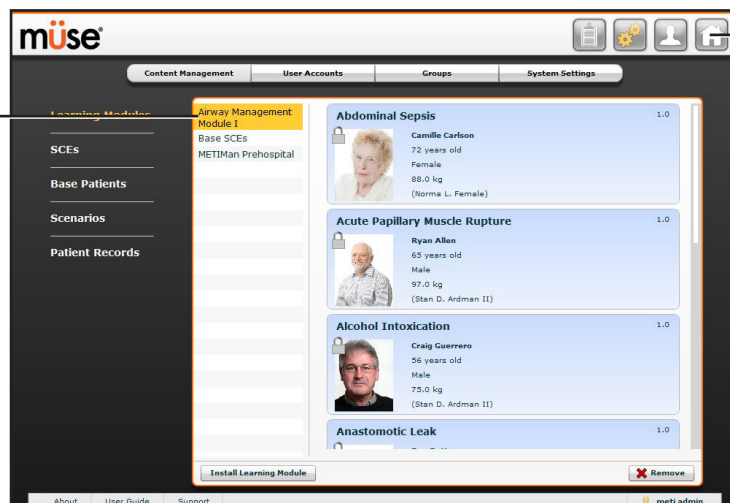

Die  
Schaltfläche  
**Home** (Start)

*Das Panel Learning Modules (Lernmodule)*


## Löschen eines Lernmoduls aus Müse

1. Wählen Sie ein Lernmodul vom Panel Learning Modules (Lernmodule) aus.



2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Remove** (Entfernen).

Die Warnmeldung Remove Learning Module (Lernmodul entfernen) erscheint.

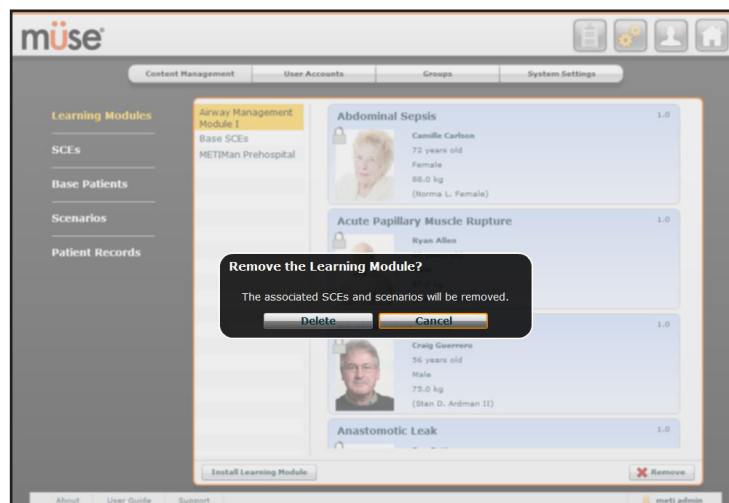

Das Panel Learning Modules (Lernmodule)

3. Klicken Sie auf **Delete** (Löschen).

Das Lernmodul und alle seine SCEs werden gelöscht.

**HINWEIS:** Vorkonfigurierte Lernmodule und Basis-SCEs können nicht gelöscht werden. Wenn ein Benutzer versucht, sie zu löschen, erscheint eine Fehlermeldung.