

INSTALLAZIONE MODULO DI APPRENDIMENTO IN MÜSE

Prima di installare un Modulo di apprendimento per l'assistenza sanitaria CAE, assicurarsi che i file del Modulo di apprendimento si trovino su un dispositivo di memorizzazione esterno o sul disco rigido della Workstation istruttore.

IMPORTANTE: È necessario aver stabilito un collegamento con il simulatore prima di installare qualsiasi Modulo di apprendimento.

Accesso a Müse

1. Effettuare il login nel software Müse utilizzando un account con i relativi privilegi.
Viene visualizzata la pagina iniziale.
2. Fare clic sul pulsante **System Administration (Amministrazione del sistema)** nell'angolo in alto a destra.
Viene visualizzata la schermata System Administration (Amministrazione del sistema).




Viene visualizzato il pulsante **System Administration (Amministrazione del sistema)**.

Pagina iniziale

3. Dalla schermata System Administration (Amministrazione del sistema), fare clic su **Content Management (Gestione dei contenuti)**.


Il pulsante **Content Management (Gestione dei contenuti)**

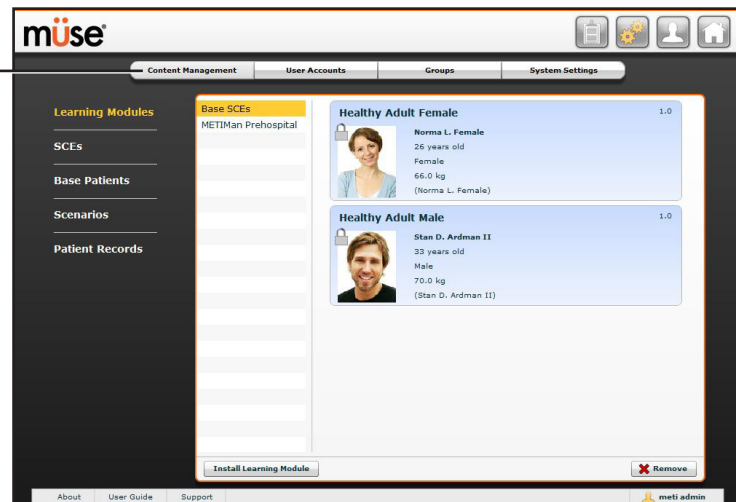

Pannello Learning Modules (Moduli di apprendimento)

Quando il pulsante Content Management (Gestione dei contenuti) è selezionato, il pannello Learning Modules (Moduli di apprendimento) appare per impostazione predefinita. Se è stato selezionato un altro pannello, tornare al pannello Learning Modules (Moduli di apprendimento) cliccando sul link **Learning Modules (Moduli di apprendimento)**.

Dal pannello Learning Modules (Moduli di apprendimento), i Moduli di apprendimento possono essere installati o eliminati.

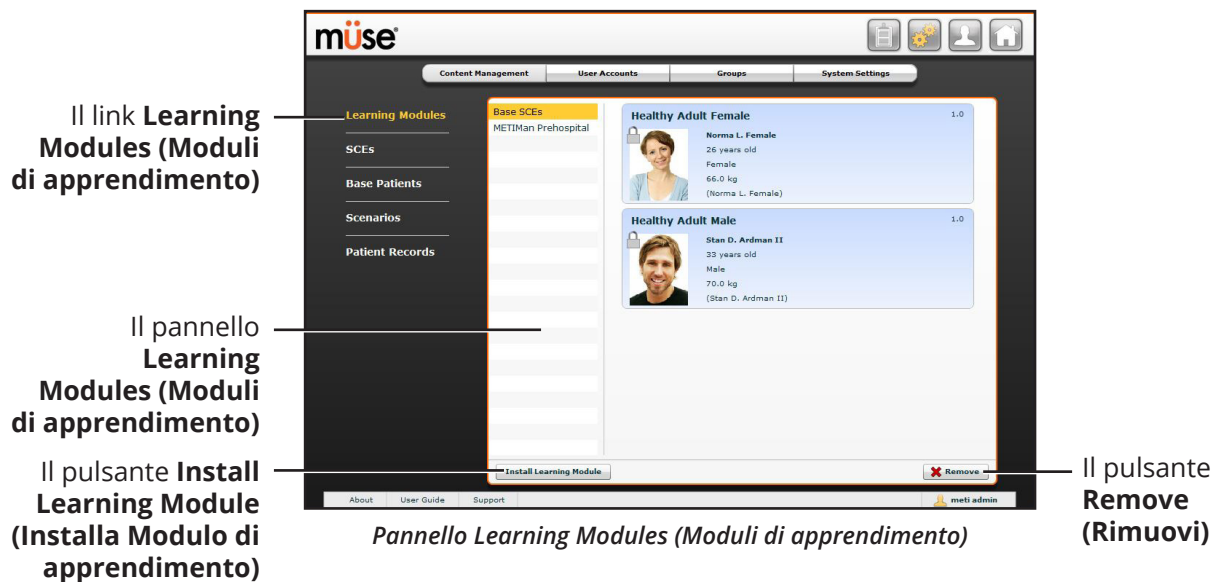

Per installare un Modulo di apprendimento in Müse

1. Fare clic su **Install Learning Module (Installa Modulo di apprendimento)**.


Appare la finestra di dialogo Select file to upload (Seleziona il file da caricare).



2. Individuare il file corretto del Modulo di apprendimento sul dispositivo di memorizzazione esterno o sulla posizione del disco rigido in cui è salvato il file del Modulo di apprendimento.

L'estensione del file è **.mlm**.

3. Selezionare il file e fare clic su **Select (Seleziona)** o **Open (Apri)**.

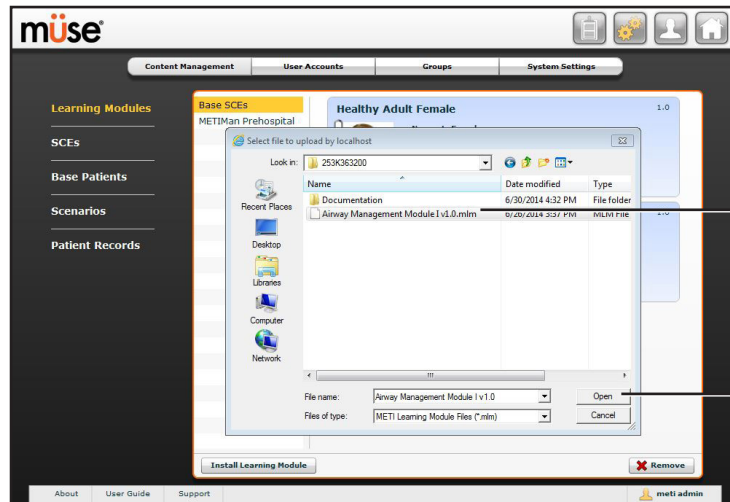

Il file **.mlm**
Learning Modules
(Moduli di
apprendimento
.mlm)


Il pulsante
Open (Apri)

Pannello Learning Modules (Moduli di apprendimento)

4. Aggiornare la schermata cliccando sul pulsante **Home (Pagina iniziale)** nel software Müse e poi tornare al pannello Learning Modules (Moduli di apprendimento).

Il Modulo di apprendimento appare sul pannello dei Learning Modules (Moduli di apprendimento) ed è disponibile per l'uso.

Il Modulo di
apprendimento
installato

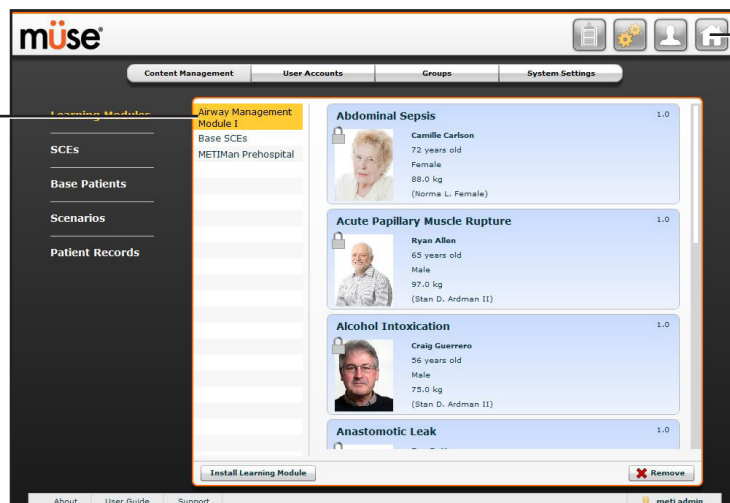


Il pulsante
**Home (Pagina
iniziale)**

Pannello Learning Modules (Moduli di apprendimento)

Per eliminare un Modulo di apprendimento da Müse

1. Selezionare un Modulo di apprendimento dal pannello Learning Module (Modulo di apprendimento).

Modulo di apprendimento da rimuovere

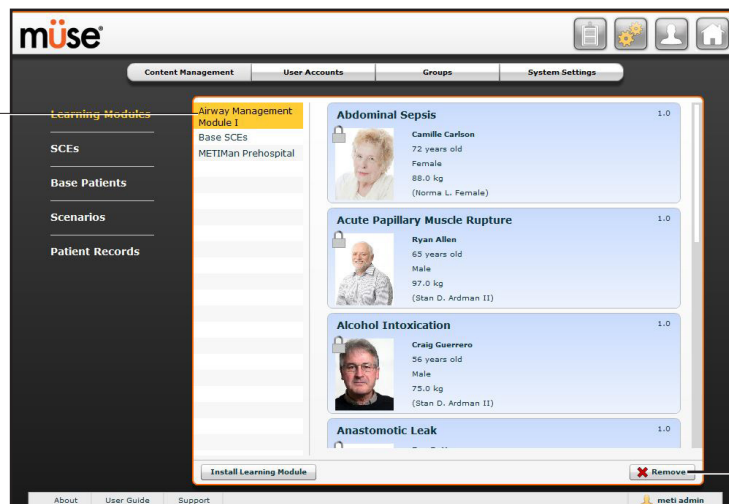


Il pulsante Remove (Rimuovi)

Pannello Learning Modules (Moduli di apprendimento)

2. Fare clic sul pulsante **Remove (Rimuovi)**.

Viene visualizzato l'avviso Remove Learning Module (Rimuovi Modulo di apprendimento).

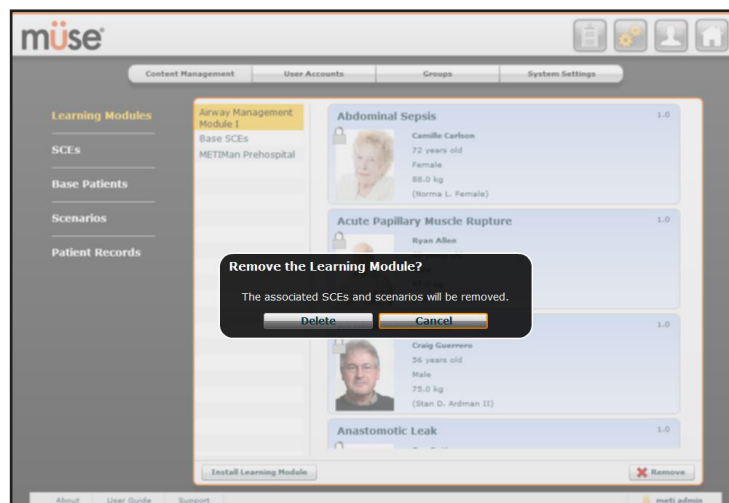

Pannello Learning Modules (Moduli di apprendimento)

3. Fare clic su **Delete (Elimina)**.

Il Modulo di apprendimento e tutte le sue SCE vengono eliminati.

NOTA: I Moduli di apprendimento preconfigurati e le SCE di base non possono essere eliminati. Se un utente tenta di eliminarli, appare un messaggio di errore.