

ИМПОРТ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ

Пользователи могут импортировать учебные модули в программное обеспечение CAE Maestro, используя компьютер с системой Windows и планшет инструктора. Приобретенные учебные модули отправляются в формате .zip.

Прежде чем импортировать учебные модули, пользователи должны:

1. Загрузить zip-файл учебного модуля.
2. Найти zip-файл учебного модуля на ПК с Windows и щелкнуть папку правой кнопкой мыши.
3. Во всплывающем меню выбрать **Extract All (Извлечь все)**, чтобы разархивировать папку.

Программное обеспечение CAE Maestro доступно на двух типах планшетов инструкторов: Планшет Samsung Galaxy Tab S3 или планшет Microsoft Surface Go. Инструкции по импорту учебных модулей на Surface Go см. в разделе *Планшет Surface Go на стр. 9*.


Примечание: Следующие инструкции по импорту учебных модулей в CAE Maestro будут различаться в зависимости от типа планшета, поставляемого с симулятором.

Samsung Galaxy Tab S3

Чтобы перенести учебные модули на планшет инструктора:


1. Подключите планшет Samsung к ПК с Windows с помощью белого интерфейсного кабеля USB-C.
2. При отображении всплывающего сообщения с запросом разрешить доступ к данным устройства нажмите **Allow (Разрешить)** для доступа к планшету Samsung, как к USB-накопителю.

3. Откройте Проводник и найдите папку Galaxy Tab S3.

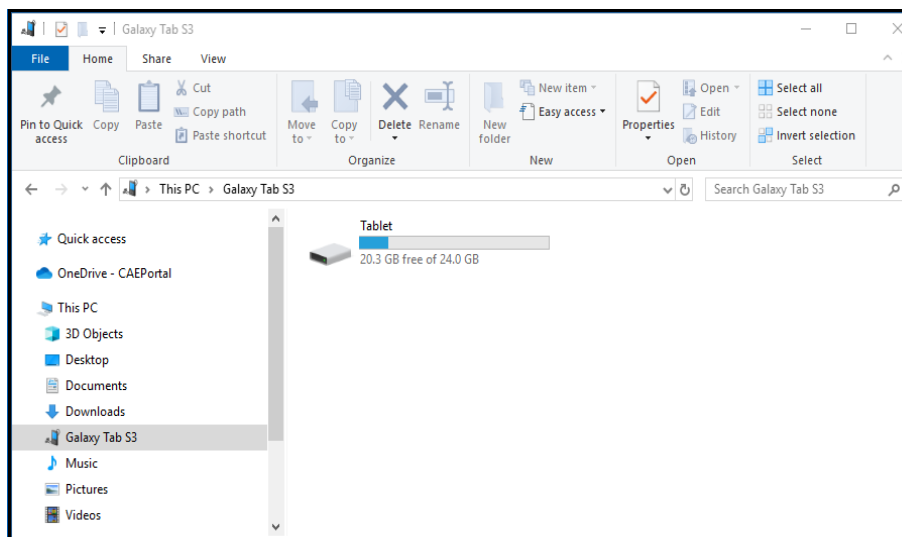

File Explorer (Проводник) - Папка Galaxy Tab S3

4. Найдите на планшете папку Download/Learning Modules (Загрузки/Учебные модули).

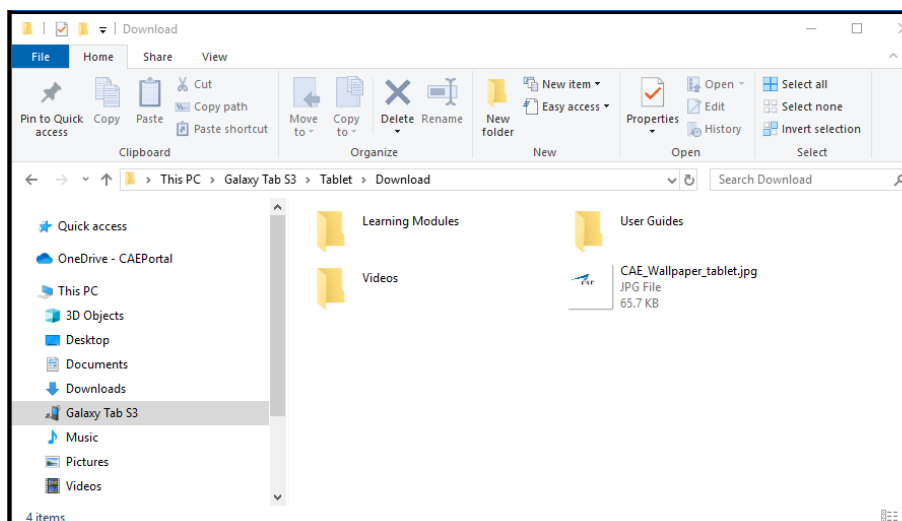


File Explorer (Проводник) - Загрузить папку

Примечание: Если папка Learning Modules (Учебные модули) еще не существует в папке Downloads (Загрузки), создайте новую папку, выполнив следующие действия:

- Находясь в папке Downloads (Загрузки), щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню, и выберите **New Folder («Создать папку»)**.
- Назовите новую папку Learning Modules (Учебные модули) и нажмите **Enter (Ввод)**.

5. Переместите папку Learning Modules (Учебные модули) из папки на своем ПК в папку **Downloads > Learning Modules (Загрузки > Учебные модули)** на планшете Samsung.

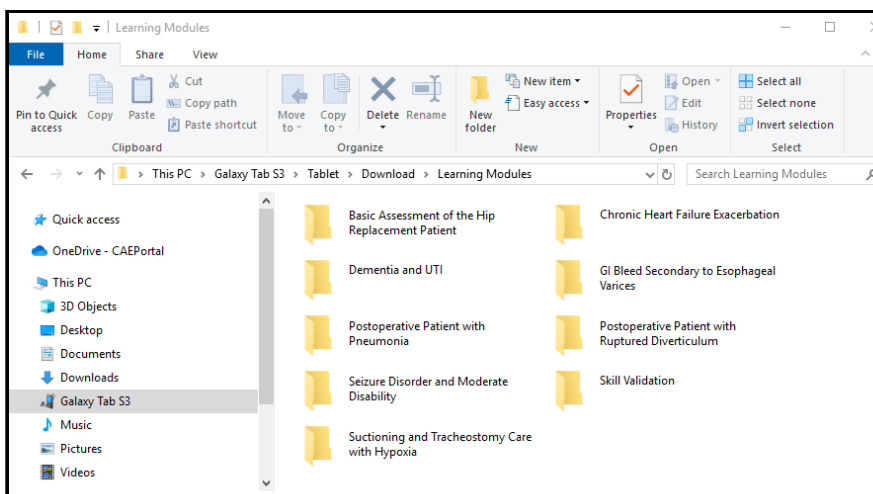

File Explorer (Проводник) - Папка Learning Modules (Учебные модули) на планшете


6. Отключите планшет от ПК после завершения передачи.

Импорт учебных модулей с планшета Samsung в CAE Maestro

Чтобы импортировать учебные модули на планшет Samsung инструктора:


1. Включите симулятор и подождите, пока не отобразится приветствие.
2. Включите планшет, нажмите **CAEMaestro**, чтобы запустить Maestro, и войдите в систему.
3. После отображения главного экрана нажмите вкладку **SCE Manager (Диспетчер SCE)**.

Вкладка SCE Manager (Диспетчер SCE)

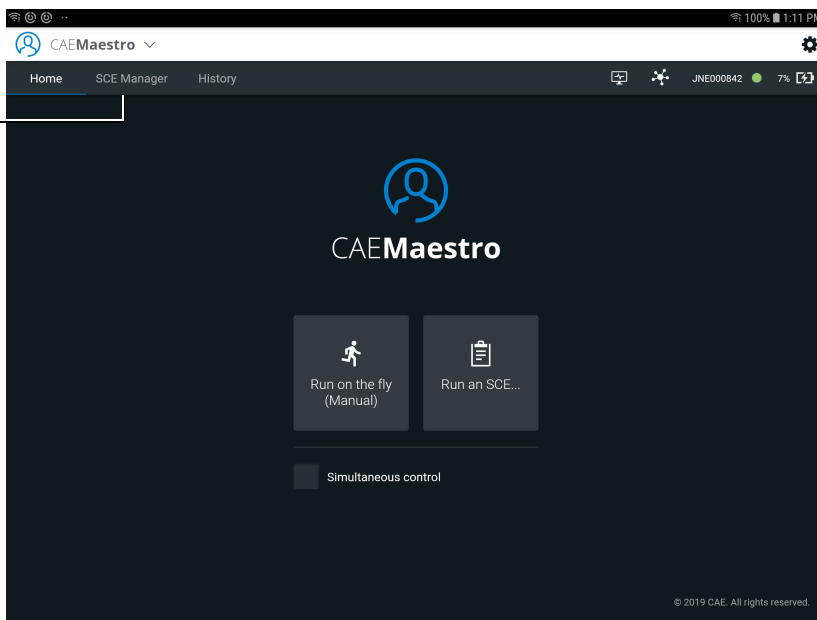


Главный экран CAE Maestro

- Нажмите вкладку **More (Дополнительно)** и выберите **Import Module (Импортировать модуль)** в раскрывающемся меню.

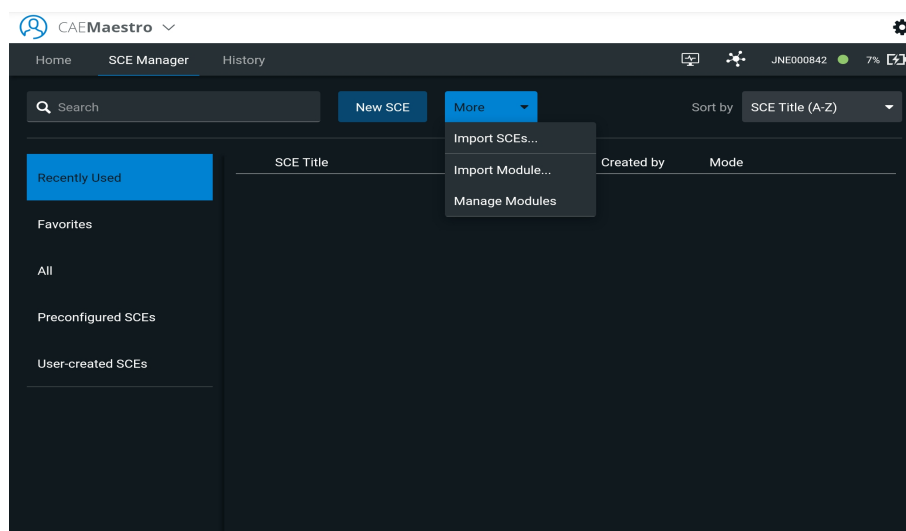

Экран SCE Manager (Диспетчер SCE) - Import Module (Импортировать модуль)


- Во всплывающем меню Select an Action (Выбор действия) нажмите **Files (Файлы)**.

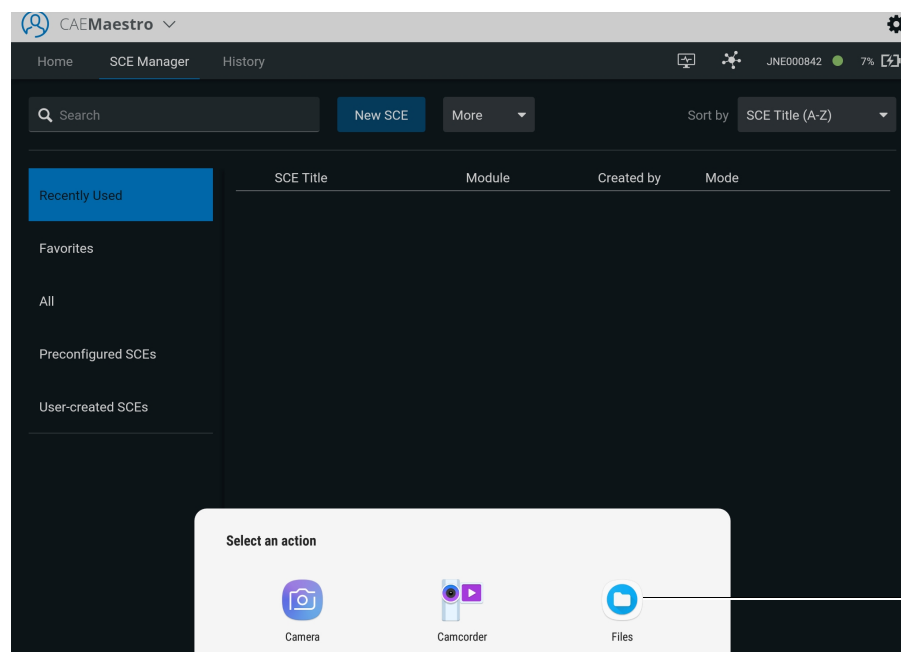

Значок
Files
(Файлы)

Экран SCE Manager (Диспетчер SCE) - Select an Action (Выбор действия)


- В правом верхнем углу экрана нажмите **More Options (Дополнительные параметры)** (многоточие по вертикали), чтобы открыть всплывающее меню.

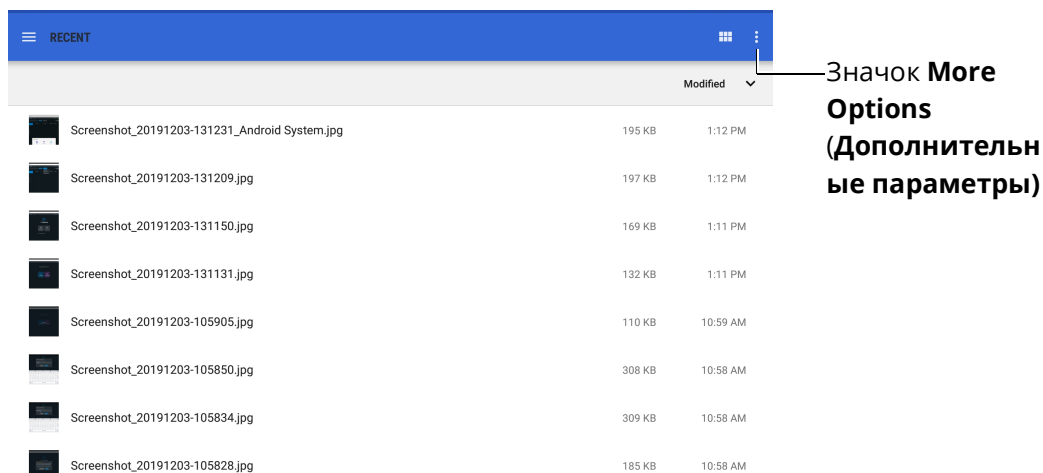

Папка File (Файл) - значок More Options (Дополнительные параметры)

- Нажмите **Show internal storage (Показать внутреннюю память)**.


Примечание: Если диалоговое окно открывается с отображением Hide internal storage (Скрыть внутреннюю память), закройте меню, нажав в любом месте за пределами окна.

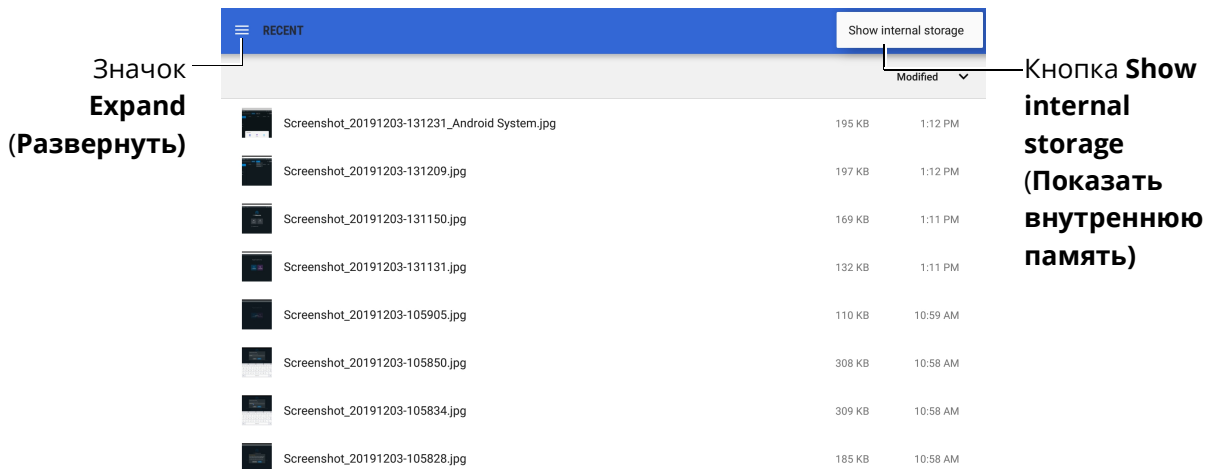

Папка File (Файл) - Значок Expand (Развернуть) и кнопка Show Internal Storage (Показать внутреннюю память)


- В левом верхнем углу нажмите **Expand (Развернуть)** (три горизонтальные линии), чтобы открыть File Manager (Диспетчер файлов).

9. В меню File Manager (Диспетчер файлов) нажмите папку Galaxy Tab S3.

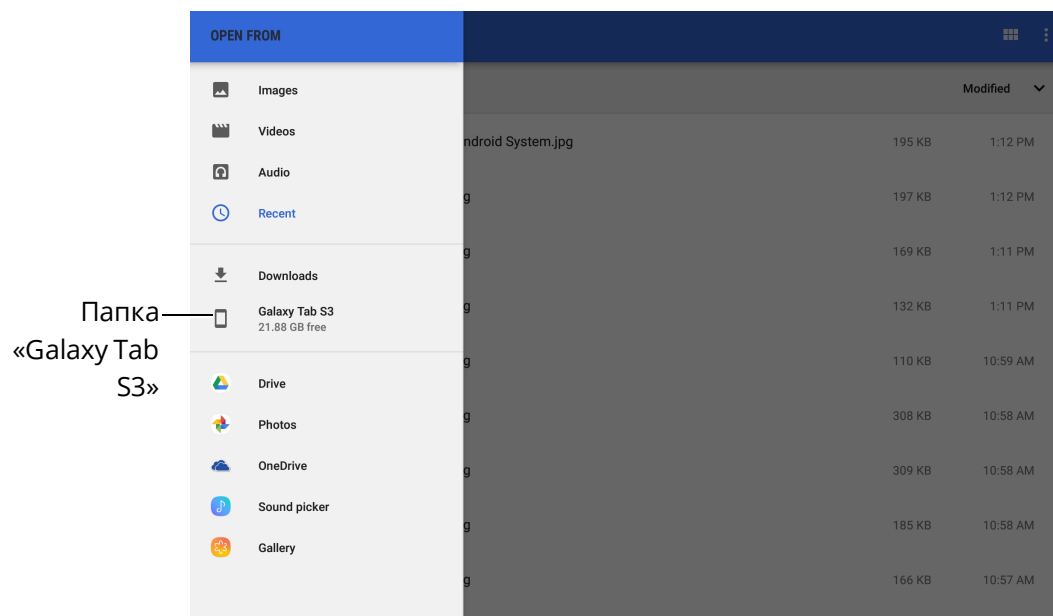

Папка «Galaxy Tab S3»

Отображается меню папки «Galaxy Tab S3».

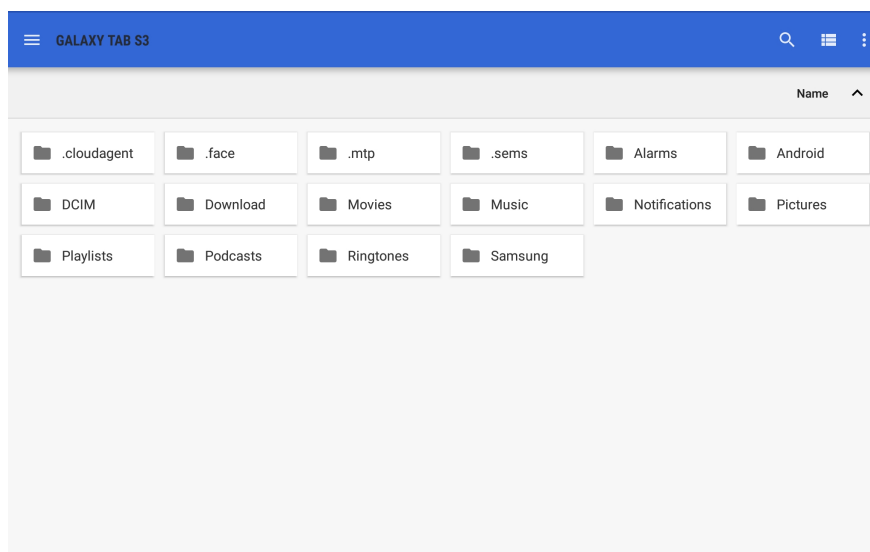


Меню папки «Galaxy Tab3» - Таблица

10. Нажмите папку Download (Загрузки).

11. Нажмите папку Learning Modules (Учебные модули).

12. В правом верхнем углу нажмите **View (Вид)**, чтобы переключиться в режим просмотра списка.

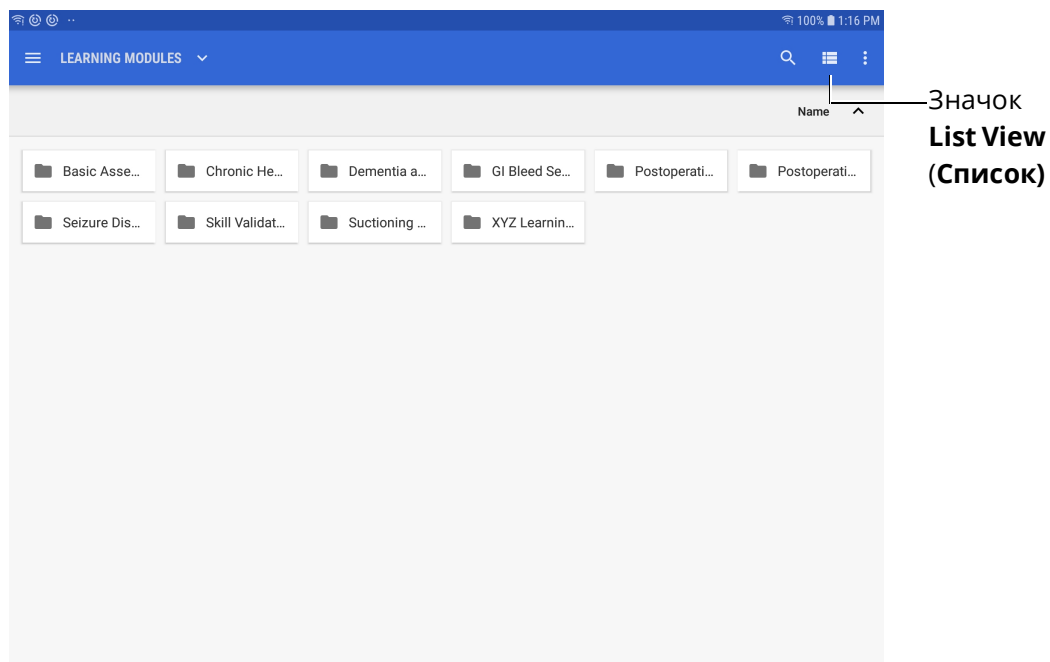


Папка Learning Modules (Учебные модули) - Таблица

Элементы в папке Learning Modules (Учебные модули) отображаются в виде списка.

| LEARNING MODULES | | |
|--|------|----------|
| Name | Size | Modified |
| Basic Assessment of the Hip Replacement Patient | | |
| Chronic Heart Failure Exacerbation | | |
| Dementia and UTI | | |
| GI Bleed Secondary to Esophageal Varices | | |
| Postoperative Patient with Pneumonia | | |
| Postoperative Patient with Ruptured Diverticulum | | |
| Seizure Disorder and Moderate Disability | | |
| Skill Validation | | |
| Suctioning and Tracheostomy Care with Hypoxia | | |
| XYZ Learning Module | | |


Папка Learning Modules (Учебные модули) - Список

13. Нажмите на нужную папку Learning Modules (Учебные модули), чтобы просмотреть содержимое папки, и нажмите на файл учебного модуля (с расширением .mlm), чтобы выбрать и импортировать файл.

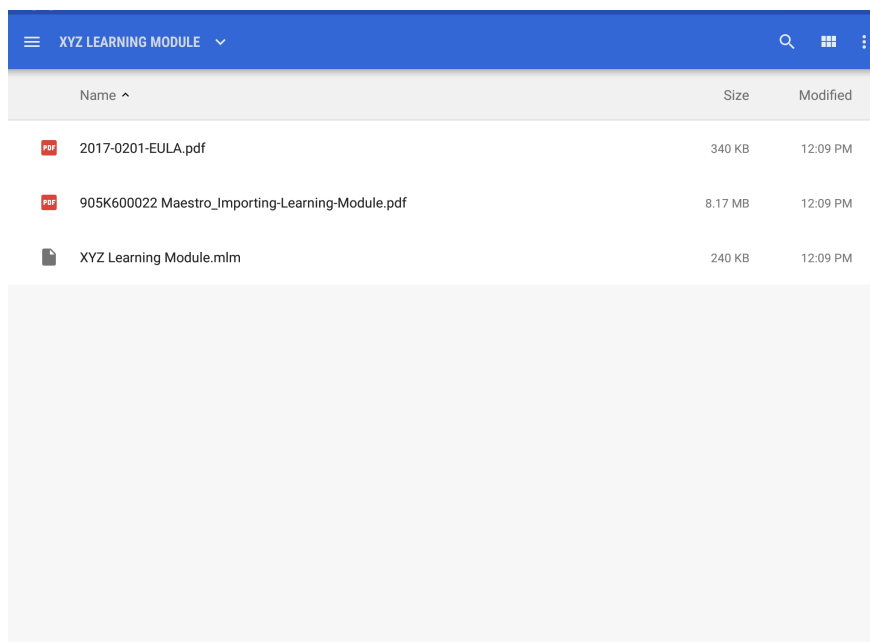

Папка Learning Modules (Учебные модули) - Выберите файл .mlm

Окно Importing (Импорт) отображается в программном обеспечении CAE Maestro. Когда импорт завершен, отображается сообщение Success (Успешно).

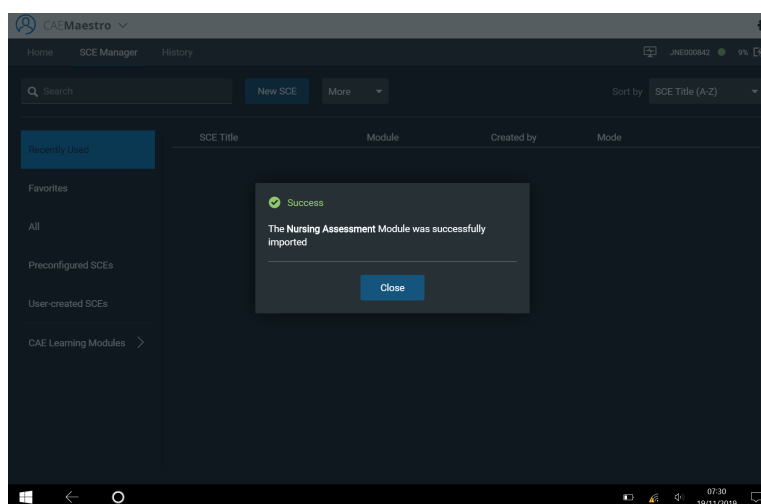

SCE Manager (Диспетчер SCE) - Сообщение Success (Успешно)


14. Нажмите **Close (Закрыть)**, и содержимое учебного модуля отображается в SCE Manager (Диспетчере SCE).

Планшет Surface Go

Чтобы перенести учебные модули с ПК с Windows на планшет Surface Go:


1. Вставьте USB-ключ в ПК. На ПК перейдите в раздел Downloads (Загрузки), затем щелкните правой кнопкой мыши папку Learning Modules (Учебные модули) и выберите **Сору (Копировать)**.

Команда **Сору**
(Копировать)

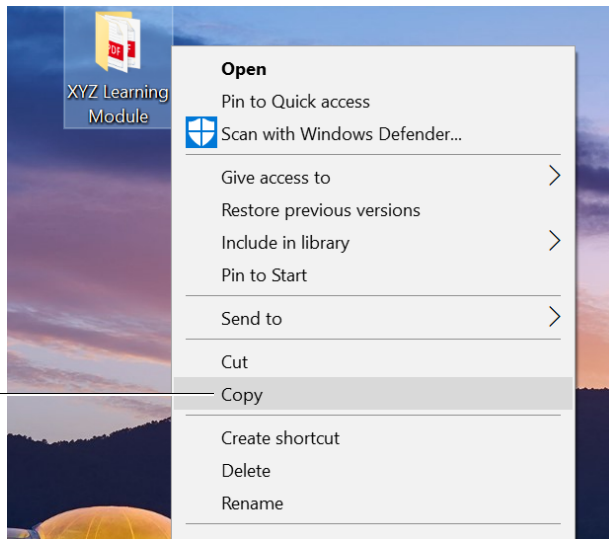

Папка Learning Modules (Учебные модули) на ПК - Команда Сору (Копировать)

2. Выберите ключ USB в File Explorer (Проводник). Щелкните правой кнопкой мыши в папке USB-ключа и выберите **Paste (Вставить)**.

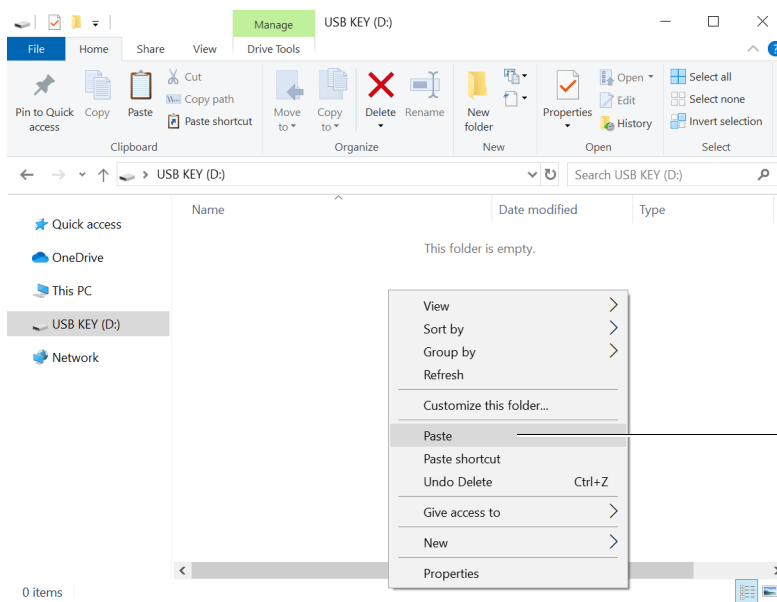


Команда
Paste
(«Вставить»)

Папка Learning Modules (Учебные модули) на ПК - Команда Paste (Вставить)

- Щелкните правой кнопкой мыши папку устройства USB-ключа и выберите Eject Device (**Извлечь устройство**).


Команда Eject device (Извлечь устройство)

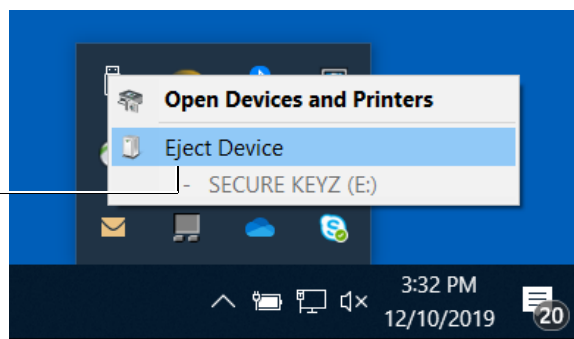

Папка USB-ключа на ПК - Eject Device (Извлечь устройство)


Подключите USB-ключ к порту USB-C, затем подключите порт USB-C к планшету Surface Go.

- Включите планшет Surface Go. В Проводнике отображается USB-накопитель. Нажмите на USB-ключ, чтобы открыть каталог файлов USB-ключа.

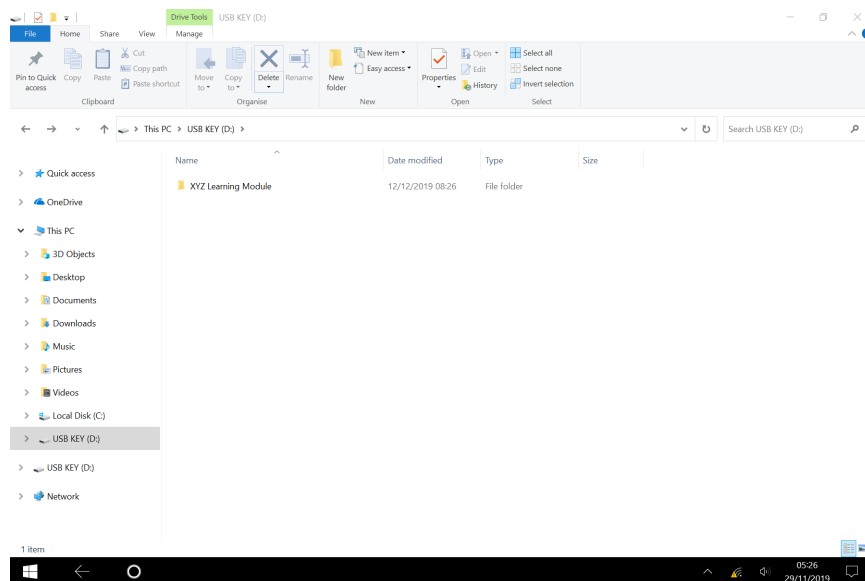


USB-накопитель на планшете Surface Go - Каталог файлов

- Нажмите на папку с названием XYZ Learning Module (XYZ Учебный модуль). В строке меню нажмите **Сору (Копировать)**.

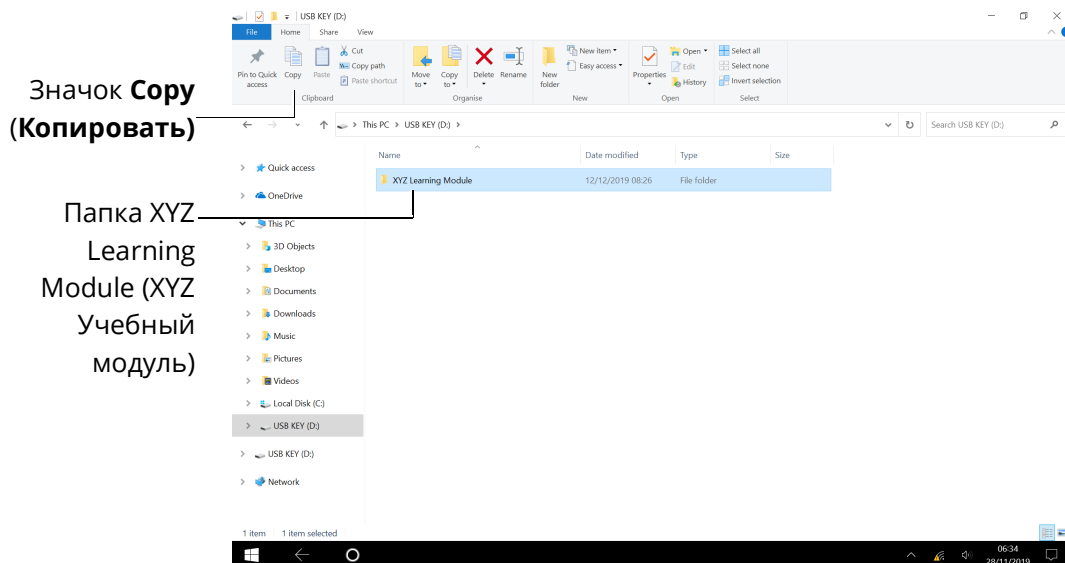


Планшет Surface Go - Значок Сору (Копировать)

- В File Explorer (Проводник) нажмите на папку Documents (Документы).

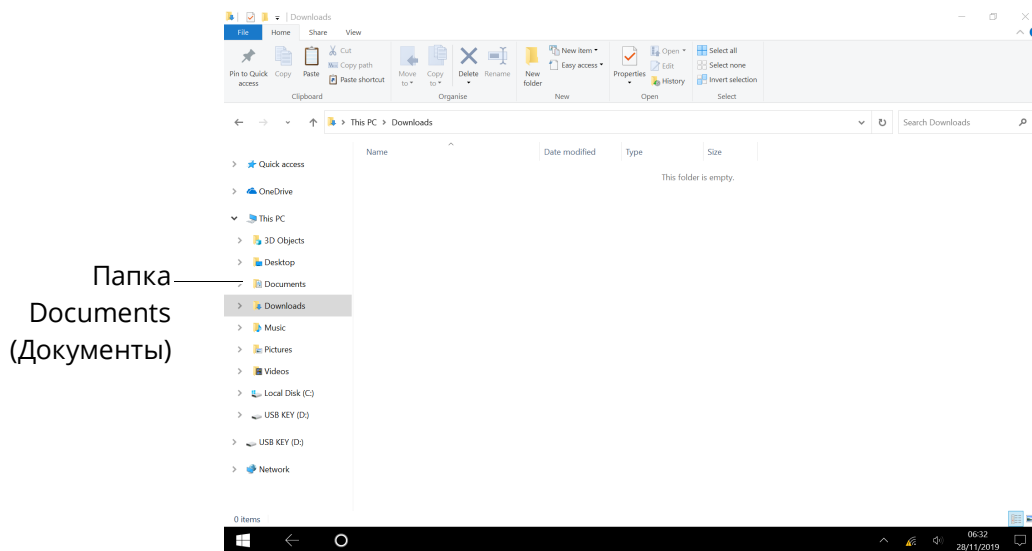

File Explorer (Проводник) планшета Surface Go - Папка Documents (Документы)


7. В File Explorer (Проводник) нажмите на папку Documents (Документы).

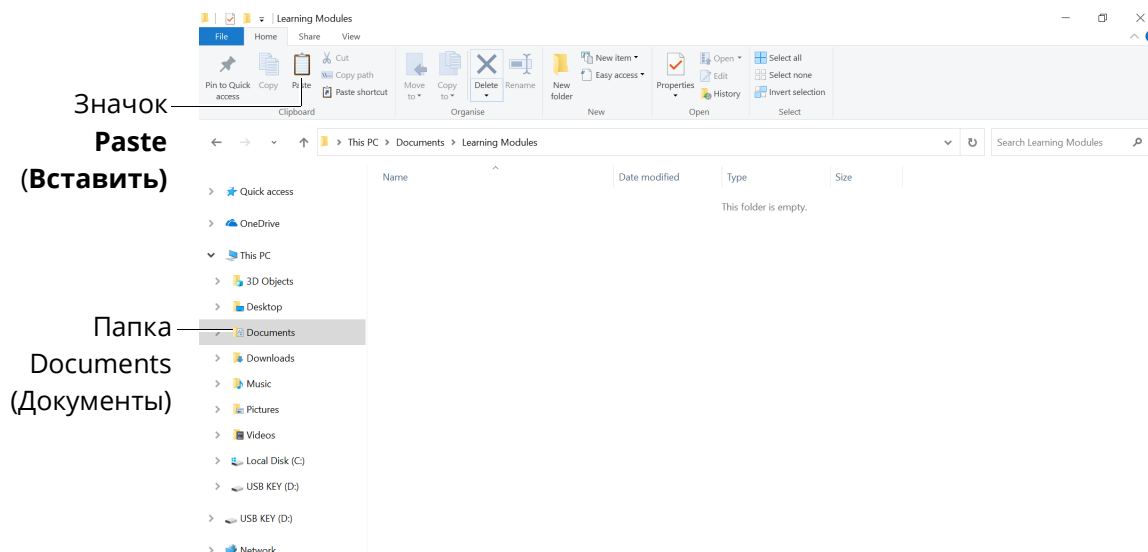

File Explorer (Проводник) планшета Surface Go - Папка Documents (Документы)


Для импорта учебных модулей с планшета Samsung в CAE Maestro:

1. Включите симулятор и подождите, пока не отобразится приветствие.
2. Включите планшет, нажмите **CAEMaestro**, чтобы запустить Maestro, и войдите в систему.
3. После отображения главного экрана нажмите вкладку **SCE Manager (Диспетчер SCE)**.

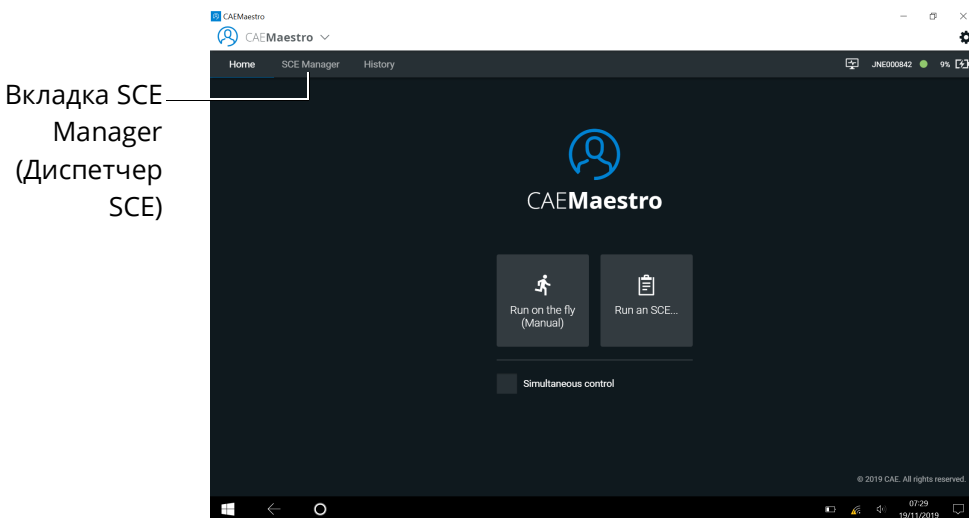

Главный экран CAE Maestro

- Нажмите вкладку **More (Дополнительно)** и выберите **Import Module (Импортировать модуль)** в раскрывающемся меню.

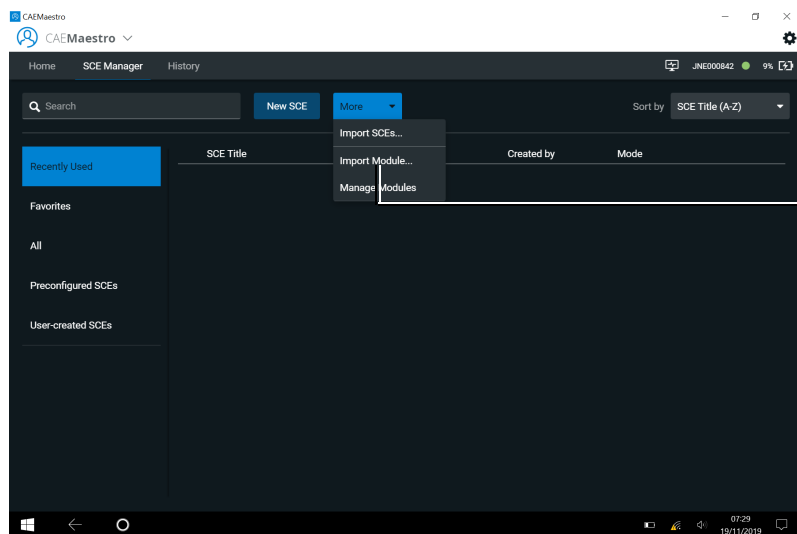


Import Module
(Импортировать
модуль)

Import Module (Импортировать модуль)

- Отображается панель File Explorer (Проводник). Нажмите **This PC (Этот компьютер)**.


This PC (Этот
компьютер)

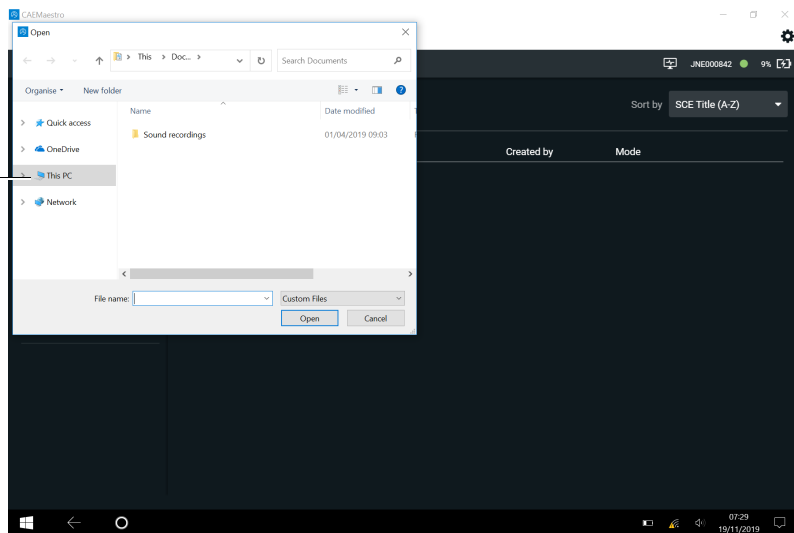

File Explorer - This PC (Проводник - Этот компьютер)

6. Нажмите на папку **Documents (Документы)**.


Папка
Documents
(Документы)

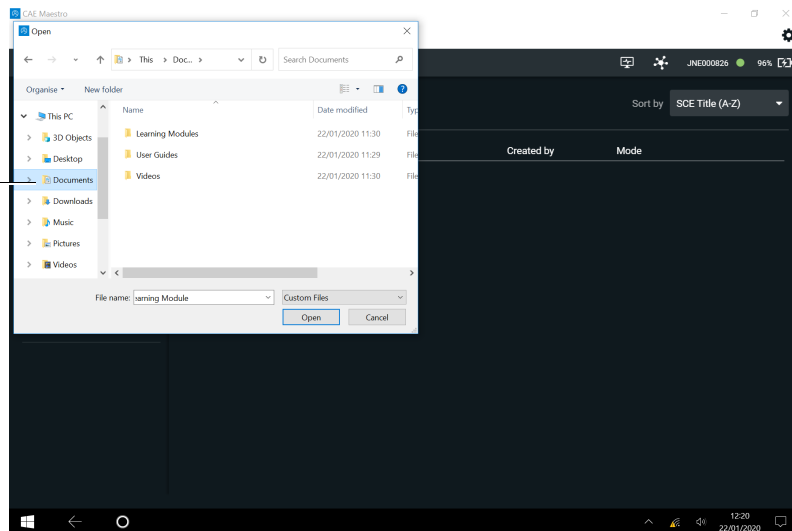

File Explorer (Проводник) - Папка Documents (Документы)


7. Нажмите на папку **Learning Modules (Учебные модули)**.

Папка
Learning
Modules
(Учебные
модули)

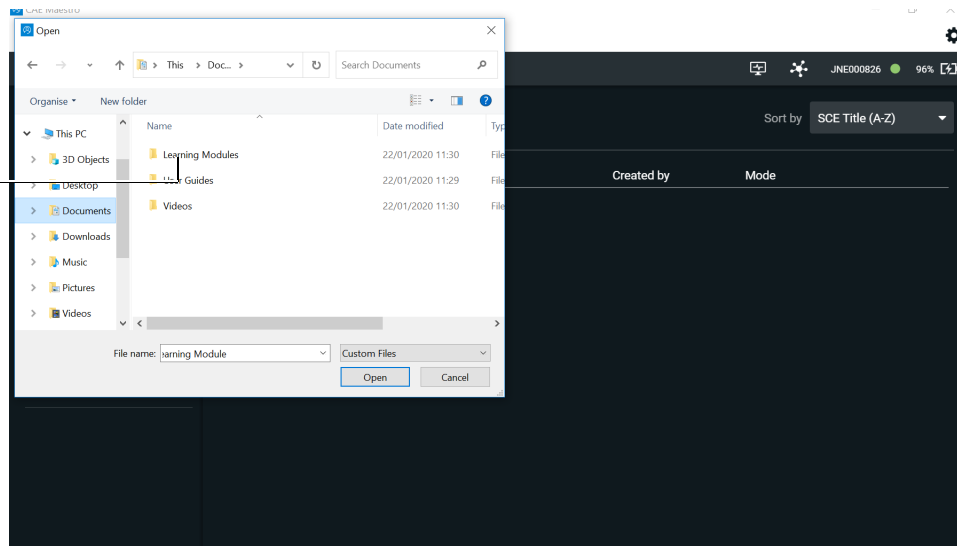


File Explorer (Проводник) - Папка Learning Modules (Учебные модули)

8. Выберите нужную папку учебного модуля.

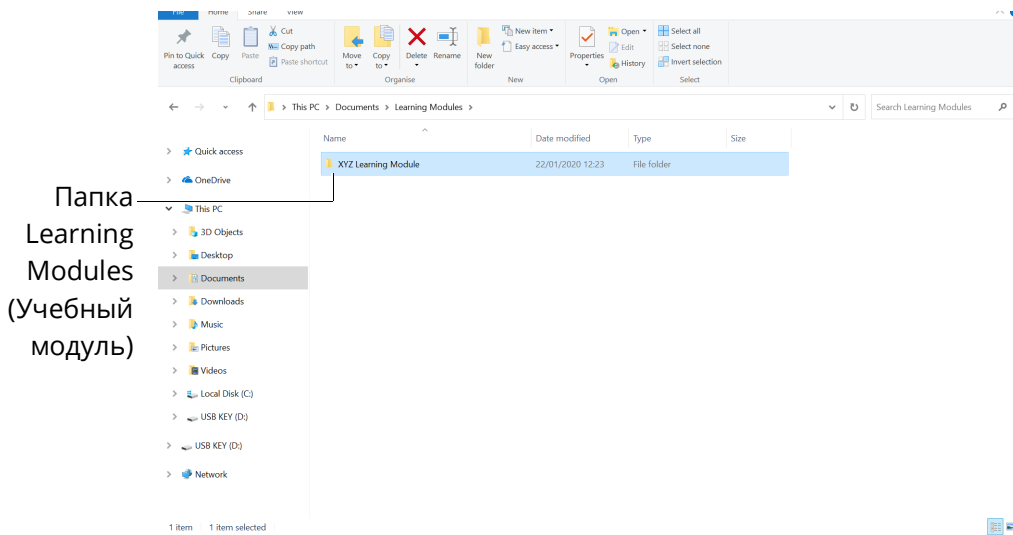


File Explorer (Проводник) - Папка Learning Modules (Учебные модули)

9. Выберите файл Learning Module (Учебный модуль) (с расширением .mlm) и нажмите **Открыть** (Открыть).

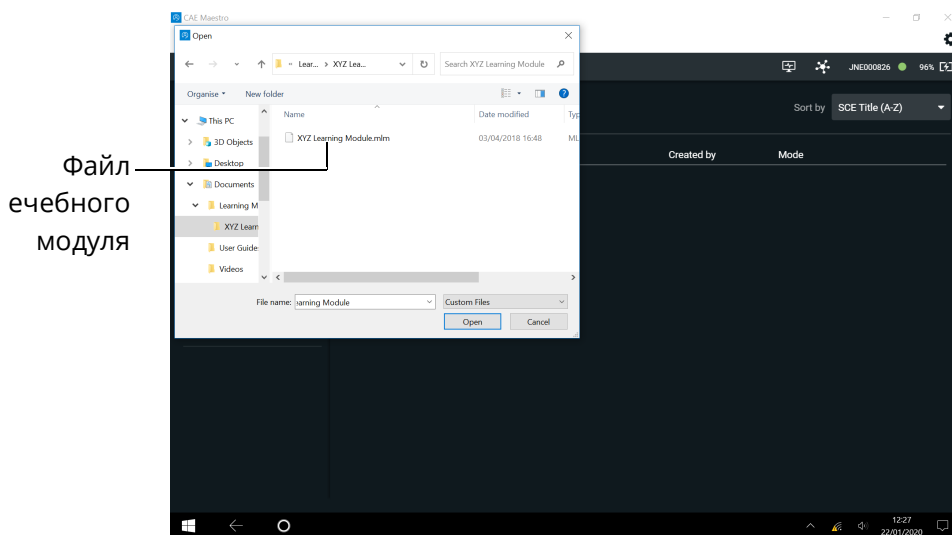

File Explorer (Проводник) - Выберите файл .mlm

Окно Importing (Импорт) отображается в программном обеспечении CAE Maestro. Когда файл импортирован, отображается сообщение Success (Успешно).

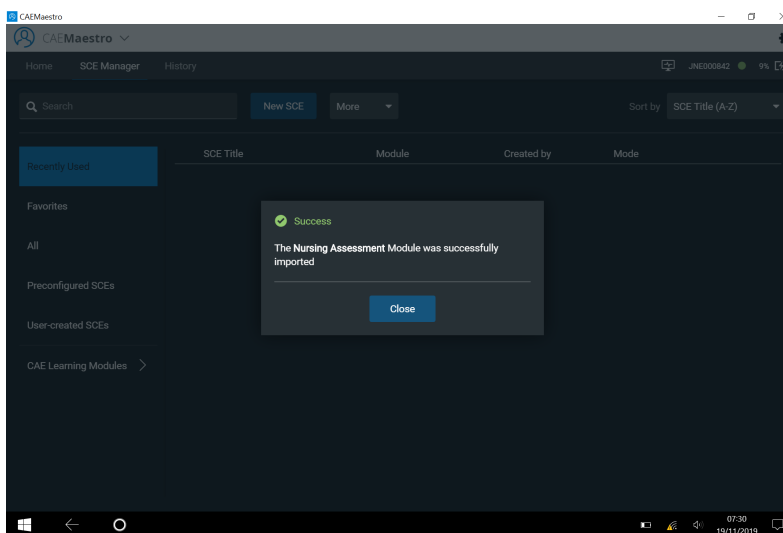

Сообщение Success (Успешно)

10. Нажмите **Close (Заккрыть)**, и содержимое учебного модуля отображается в Диспетчере SCE.