

IMPORTATION DE MODULES D'APPRENTISSAGE

Les utilisateurs peuvent importer des modules d'apprentissage dans le logiciel CAE Maestro depuis un ordinateur Windows et la tablette de l'instructeur. Les modules d'apprentissage achetés sont envoyés au format de fichier .zip.

Avant d'importer un module d'apprentissage, les utilisateurs doivent procéder comme suit :

1. Téléchargez le fichier zip du module d'apprentissage.
2. Naviguez jusqu'au fichier zip du module d'apprentissage sur l'ordinateur Windows et cliquez à droite sur le fichier.
3. Dans les options du menu contextuel, sélectionnez **Extract All (Extraire tout)** pour décompresser le dossier.


Le logiciel CAE Maestro est disponible sur deux types de tablettes d'instructeur : la tablette Samsung Galaxy Tab S3 ou la tablette Microsoft Surface Go. Pour obtenir des instructions sur l'importation de modules d'apprentissage sur la Surface Go, voir *Tablette Surface Go sur la page 9*.

Remarque : Les instructions suivantes pour importer des modules d'apprentissage dans CAE Maestro varient en fonction du type de tablette fourni avec le simulateur.

Samsung Galaxy Tab S3


Pour transférer des modules d'apprentissage sur la tablette de l'instructeur :

1. Connectez la tablette Samsung à l'ordinateur Windows à l'aide du câble d'interface USB-C blanc.
2. Lorsque le message contextuel s'affiche vous demandant d'autoriser l'accès aux données de l'appareil, appuyez sur **Allow (Autoriser)** pour accéder à la tablette Samsung comme s'il s'agissait d'une clé USB.
3. Ouvrez l'Explorateur de fichiers et naviguez jusqu'au dossier Galaxy Tab S3.

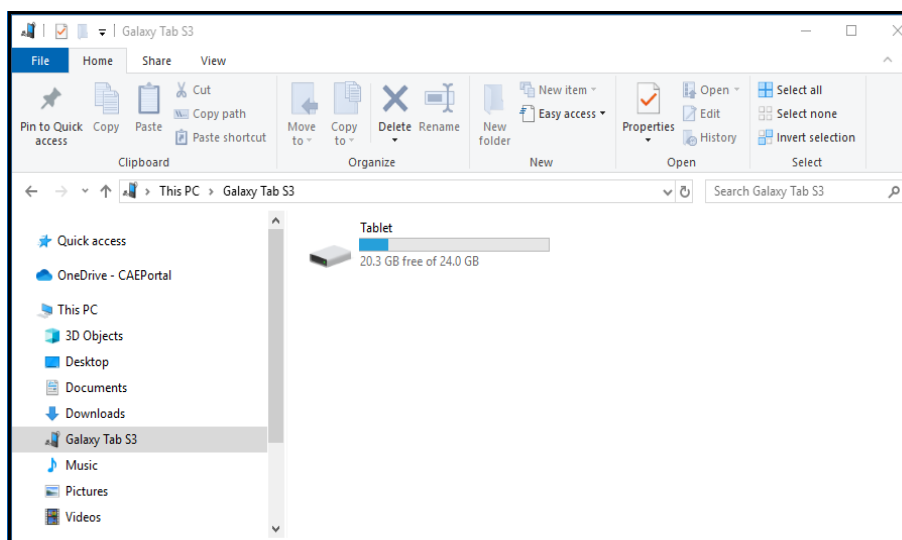

Explorateur de fichiers – Dossier Galaxy Tab S3


4. Localisez le dossier Download/Learning Modules (Téléchargement/Modules d'apprentissage) sur la tablette.

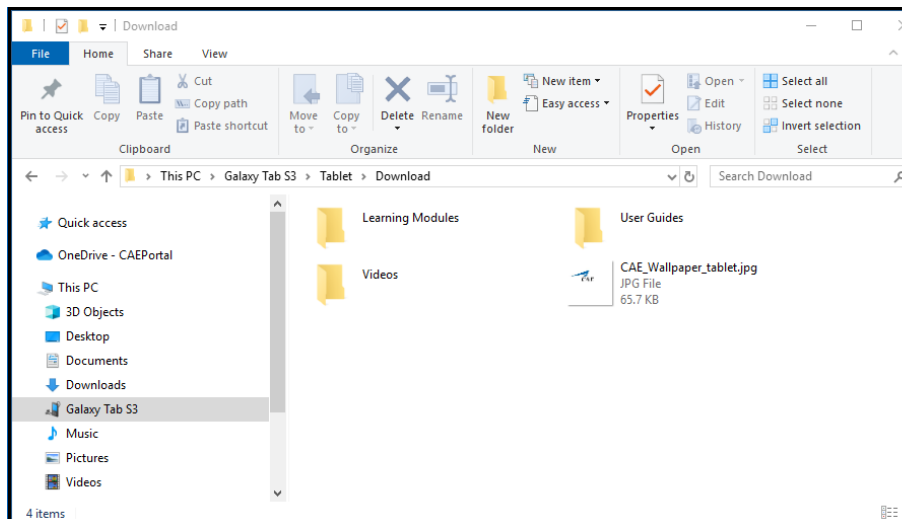

Explorateur de fichiers – Dossier Download (Téléchargement)

Remarque : Si le dossier des modules d'apprentissage n'existe pas encore dans le dossier Download (Téléchargements), créez maintenant ce dossier en suivant les étapes ci-dessous :

- a. Dans le dossier Downloads (Téléchargements), cliquez à droite pour ouvrir le menu contextuel et sélectionnez **New Folder (Nouveau dossier)**.
 - b. Nommez le nouveau dossier Learning Modules (Modules d'apprentissage) et appuyez sur **Enter (Entrer)**.
5. Déplacez le ou les dossiers de modules d'apprentissage depuis leur emplacement sur votre ordinateur vers le dossier **Download > Learning Modules (Téléchargements > Modules d'apprentissage)** sur la tablette Samsung.

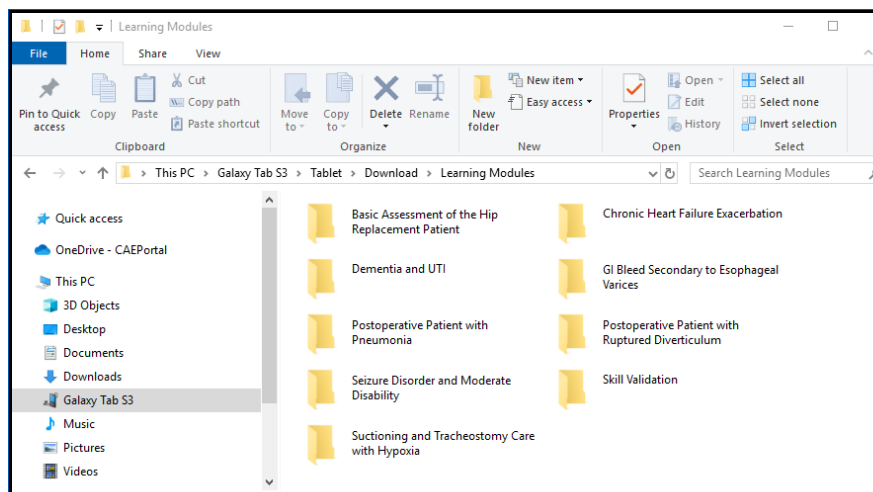

Explorateur de fichiers – Dossier Learning Module (Module d'apprentissage) sur la tablette


6. Déconnectez la tablette de l'ordinateur une fois que le ou les dossiers sont transférés.

Importer des modules d'apprentissage dans CAE Maestro à partir de la tablette Samsung

Pour importer des modules d'apprentissage dans la tablette Samsung de l'instructeur :


1. Mettez le simulateur sous tension et attendez qu'il dise « Bonjour ».
2. Allumez la tablette, appuyez sur **CAEMaestro** pour démarrer Maestro et connectez-vous.
3. Lorsque l'écran d'accueil apparaît, appuyez sur l'onglet **SCE Manager (Gestionnaire des SCE)**.

Onglet SCE Manager
(Gestionnaire des SCE)

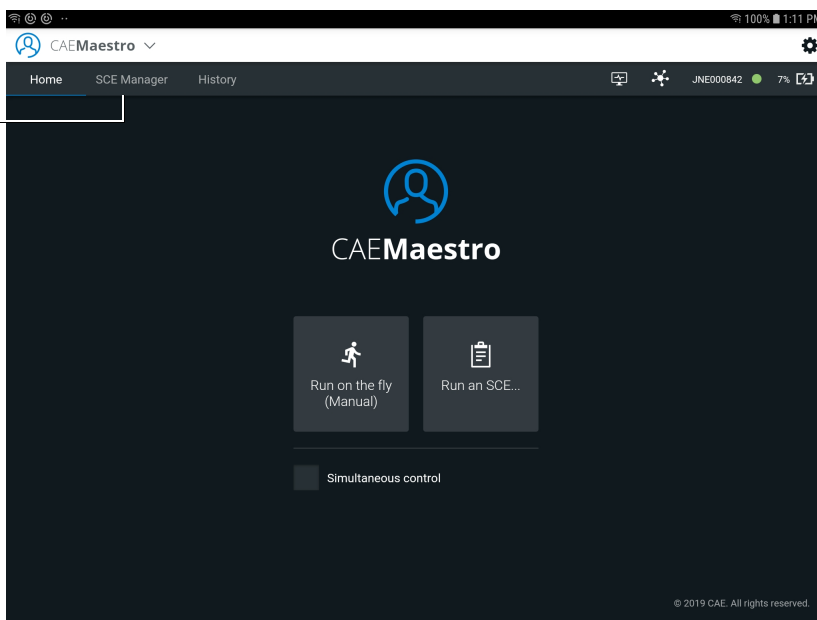


Écran d'accueil de CAE Maestro

- Appuyez sur l'onglet **More (Plus)** et choisissez **Import Module (Importer un module)** dans le menu déroulant.

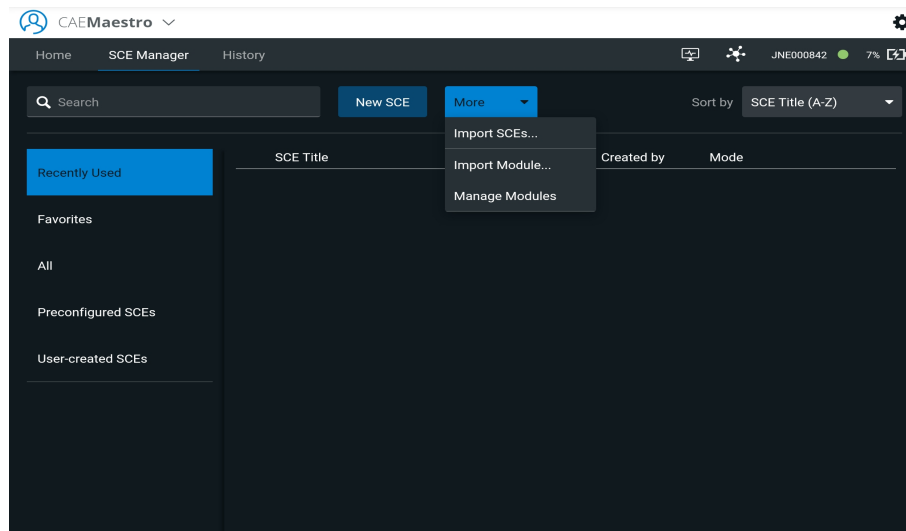

Écran du SCE Manager (Gestionnaire des SCE) – Import Module (Importer un module)


- Dans le menu contextuel Select an Action (Sélectionner une action), appuyez sur **Files (Fichiers)**.

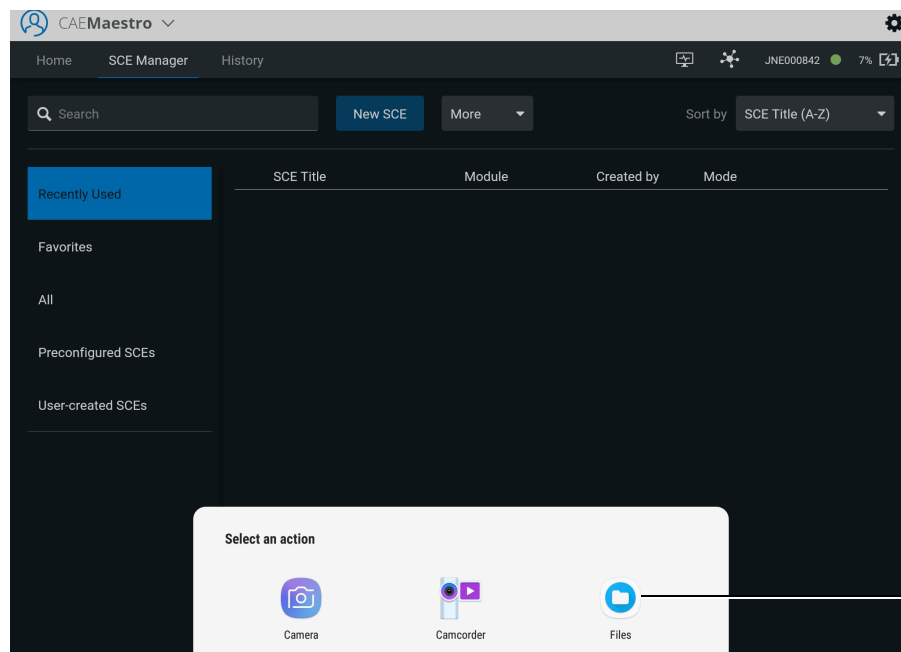

Icône **Files**
(Fichiers)

Écran du SCE Manager (Gestionnaire des SCE) – Select an Action (Sélectionner une action)


6. Dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur **More Options (Plus d'options)** (points de suspension verticaux) pour afficher un menu contextuel.

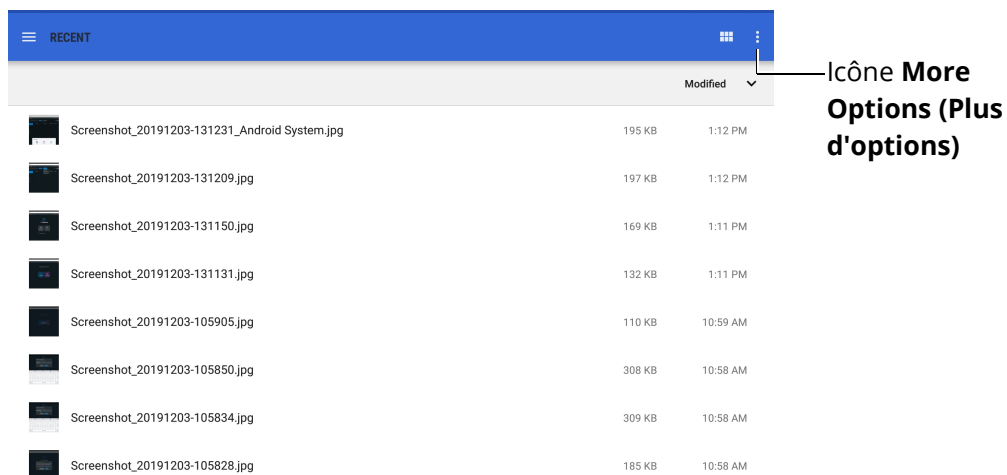

Dossier File (Fichier) – Icône More Options (Plus d'options)

7. Appuyez sur **Show internal storage (Afficher le stockage interne)**.


Remarque : Si la boîte de dialogue s'ouvre en affichant Hide internal storage (Masquer le stockage interne), fermez le menu en appuyant n'importe où en dehors de la boîte.

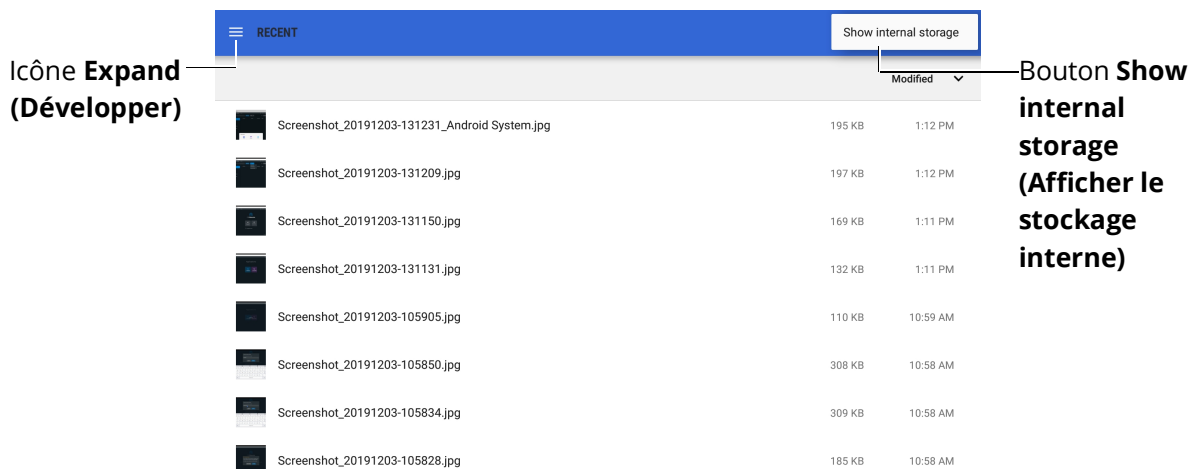

Dossier File (Fichier) – Icône Expand (Développer) et bouton Show Internal Storage (Afficher le stockage interne)


8. Dans le coin supérieur gauche, appuyez sur **Expand (Développer)** (trois lignes horizontales) pour ouvrir le File Manager (Gestionnaire de fichiers).

9. Dans le menu File Manager (Gestionnaire de fichiers), appuyez sur le dossier Galaxy Tab S3.

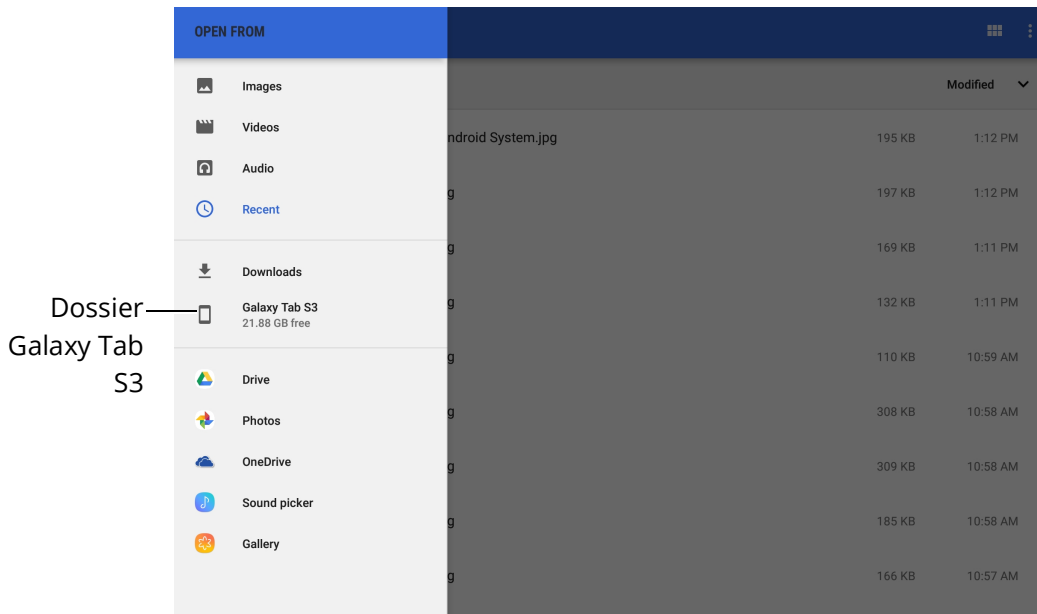

Dossier Galaxy Tab S3


Le menu du dossier Galaxy Tab S3 apparaît.

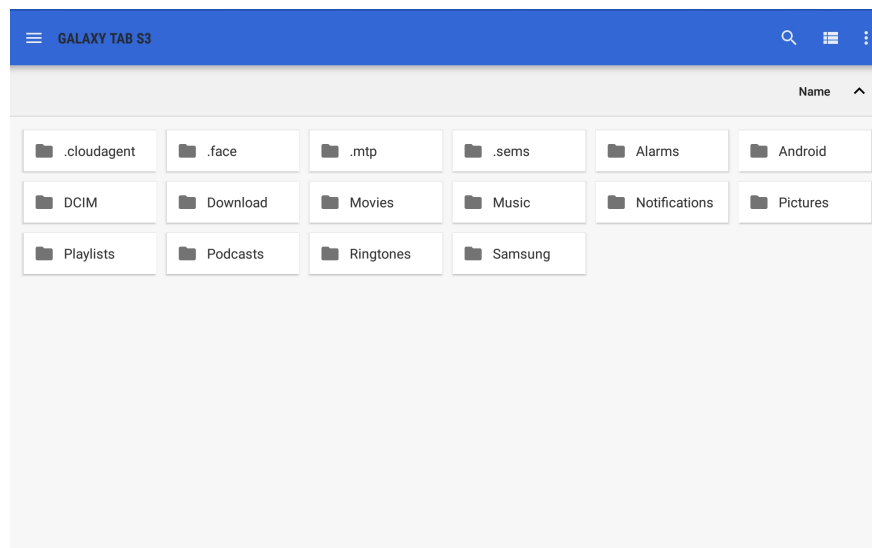

Menu du dossier Galaxy Tab S3 – Vue en grille


10. Appuyez sur le dossier Download (Téléchargement).
11. Appuyez sur le dossier Leaning Modules (Modules d'apprentissage).

12. Dans le coin supérieur droit, appuyez sur **View (Affichage)** pour basculer en mode d'affichage de liste.

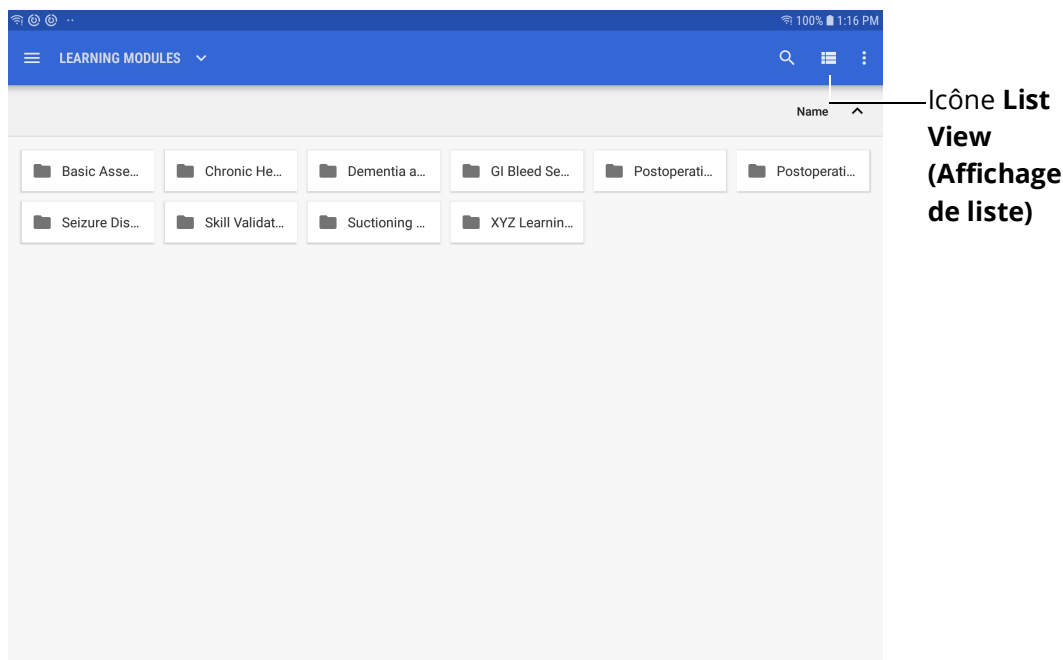


Dossier Learning Module (Module d'apprentissage) – Affichage de grille

Les éléments du dossier Learning Modules (Modules d'apprentissage) s'affichent en mode d'affichage de liste.

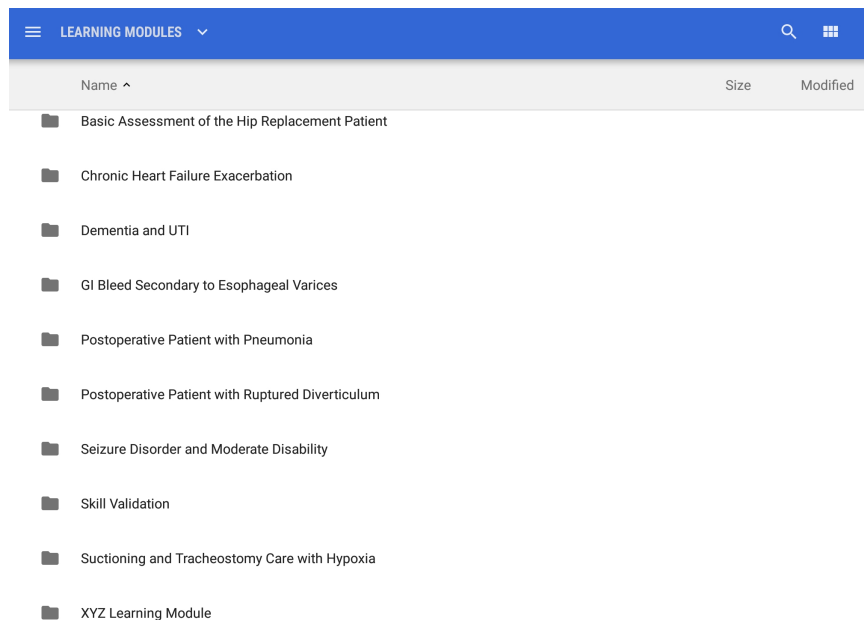


Dossier Learning Module (Module d'apprentissage) – Affichage de liste

- Appuyez sur le dossier de module d'apprentissage souhaité pour afficher les contenus du dossier et appuyez sur le fichier du module d'apprentissage (avec l'extension .mlm) pour sélectionner et importer le fichier.

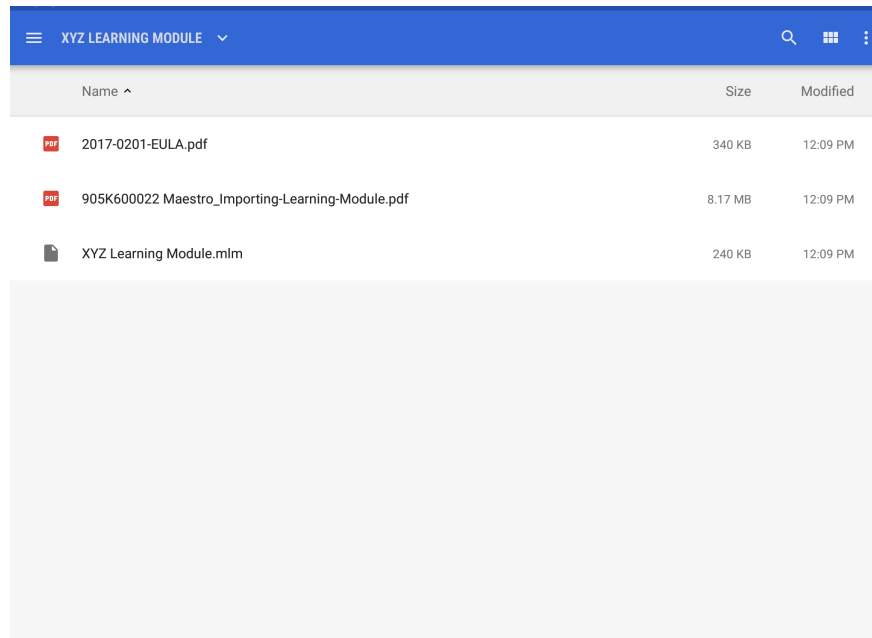

Dossier Learning Modules (Modules d'apprentissage) – Sélectionner le fichier .mlm

La fenêtre d'importation apparaît dans le logiciel CAE Maestro. Une fois l'importation terminée, un message Success (Réussite) s'affiche.

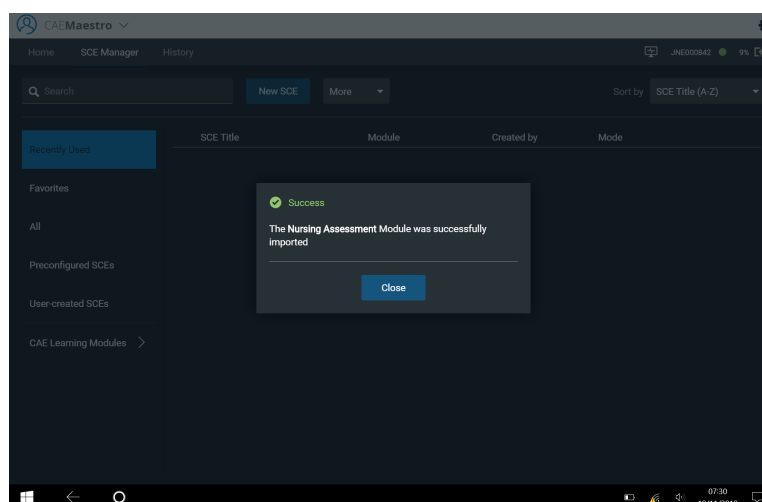

SCE Manager (Gestionnaire des SCE) – Message Success (Réussite)


- Appuyez sur **Close (Fermer)** et les contenus du module d'apprentissage apparaissent dans le gestionnaire des SCE.

Tablette Surface Go

Pour transférer des modules d'apprentissage de l'ordinateur Windows vers la tablette Surface Go :


1. Insérez une clé USB dans l'ordinateur. Sur l'ordinateur, naviguez jusqu'à Downloads (Téléchargements) puis cliquez à droite sur le dossier Learning Modules (Modules d'apprentissage) et choisissez **Copy (Copier)**.

Commande
Copy (Copier)

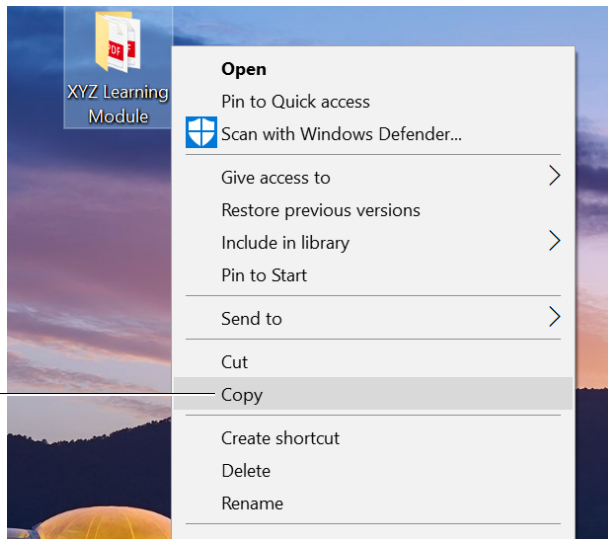

Dossier Learning Modules (Modules d'apprentissage) sur l'ordinateur – Commande Copy (Copier)


2. Sélectionnez la clé USB dans l'Explorateur de fichiers. Cliquez à droite sur le dossier Clé USB, puis choisissez **Paste (Coller)**.

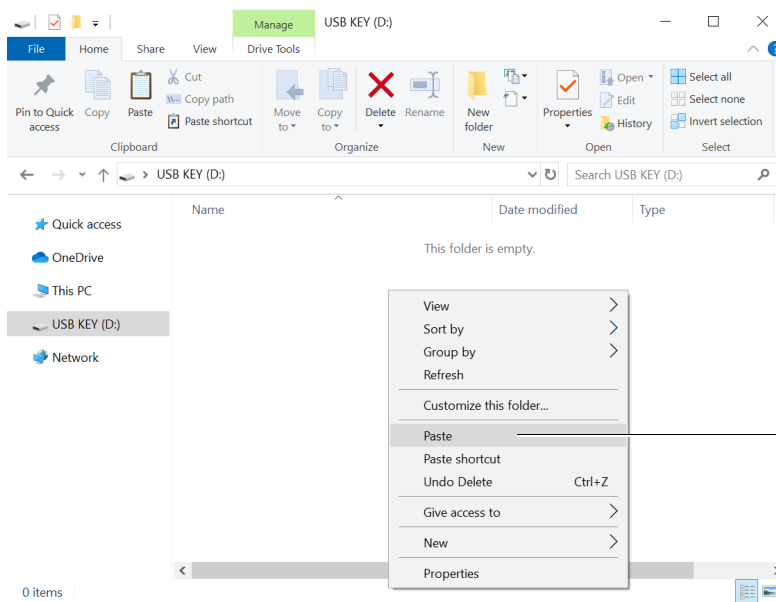

Commande
Paste (Coller)

Dossier Learning Modules (Modules d'apprentissage) sur l'ordinateur – Commande Paste (Coller)


3. Cliquez à droite sur le dossier du périphérique Clé USB et choisissez Eject Device (Éjecter le périphérique).

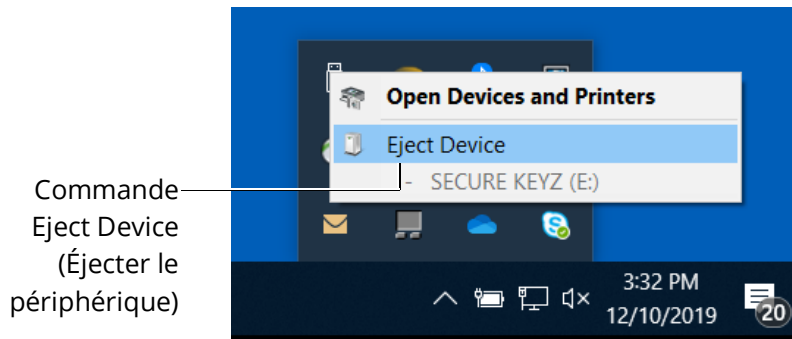

Dossier Clé USB sur l'ordinateur – Eject Device (Éjecter le périphérique)


Connectez la clé USB au dongle USB-C, puis connectez le dongle USB-C à la tablette Surface Go.

4. Allumez la tablette Surface Go. Dans l'Explorateur de fichiers, le lecteur de clé USB apparaît. Appuyez sur le lecteur de clé USB pour ouvrir le répertoire de fichiers de la clé USB.

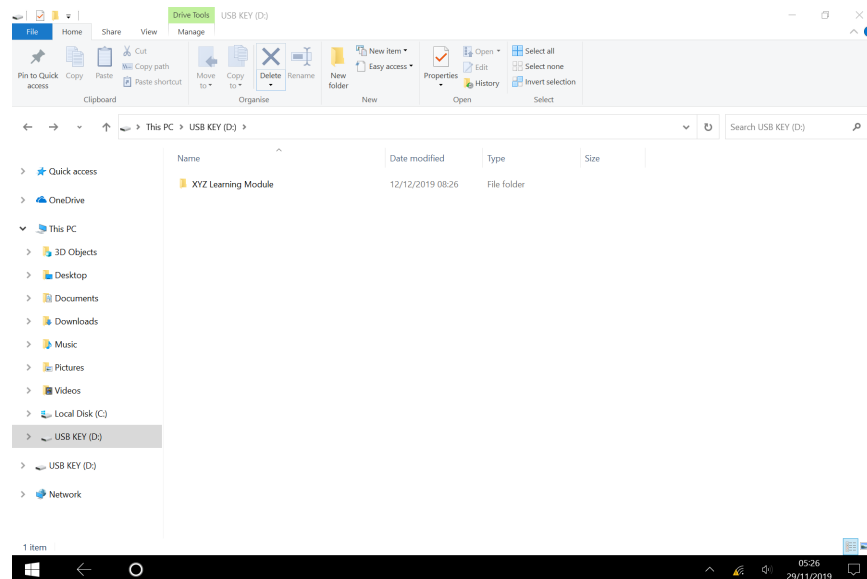


Clé USB sur la tablette Surface Go – Répertoire de fichiers

- Appuyez sur le dossier nommé XYZ Learning Module (Module d'apprentissage XYZ).
Dans la barre de menus, appuyez sur **Copy (Copier)**.

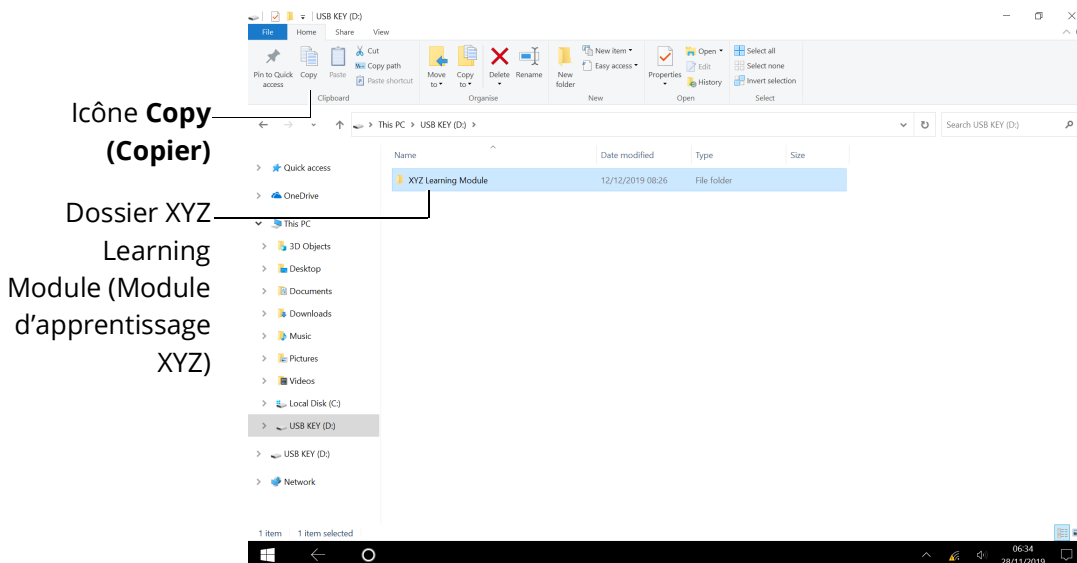


Tablette Surface Go – Icône Copy (Copier)

- Dans l'Explorateur de fichiers, appuyez sur le dossier Documents (Documents).

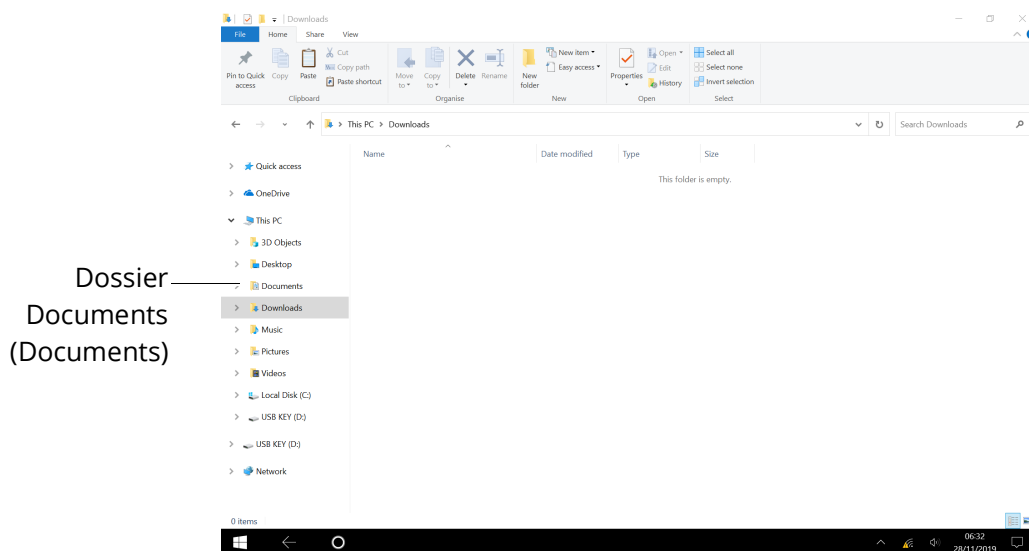

Explorateur de fichiers de la tablette Surface Go – Dossier Documents (Documents)


7. Dans l'Explorateur de fichiers, appuyez sur le dossier Documents (Documents).

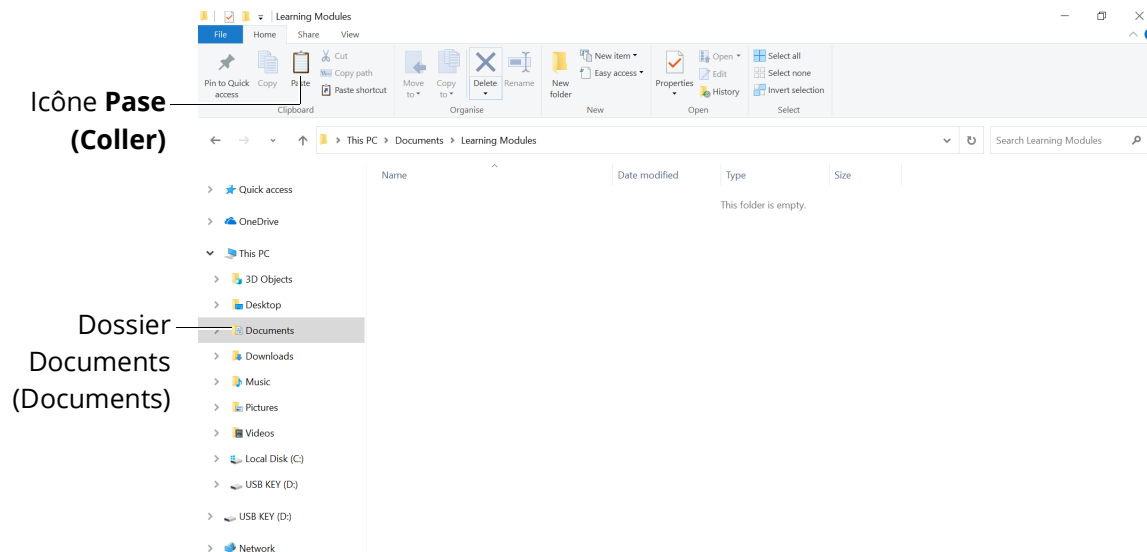

Explorateur de fichiers de la tablette Surface Go – Dossier Documents (Documents)


Pour importer des modules d'apprentissage dans CAE Maestro à partir de la tablette Surface Go :

1. Mettez le simulateur sous tension et attendez qu'il dise « Hello » (bonjour).
2. Allumez la tablette, appuyez sur **CAEMaestro** pour démarrer Maestro et connectez-vous.
3. Lorsque la page d'accueil apparaît, appuyez sur l'onglet **SCE Manager (Gestionnaire des SCE)**.

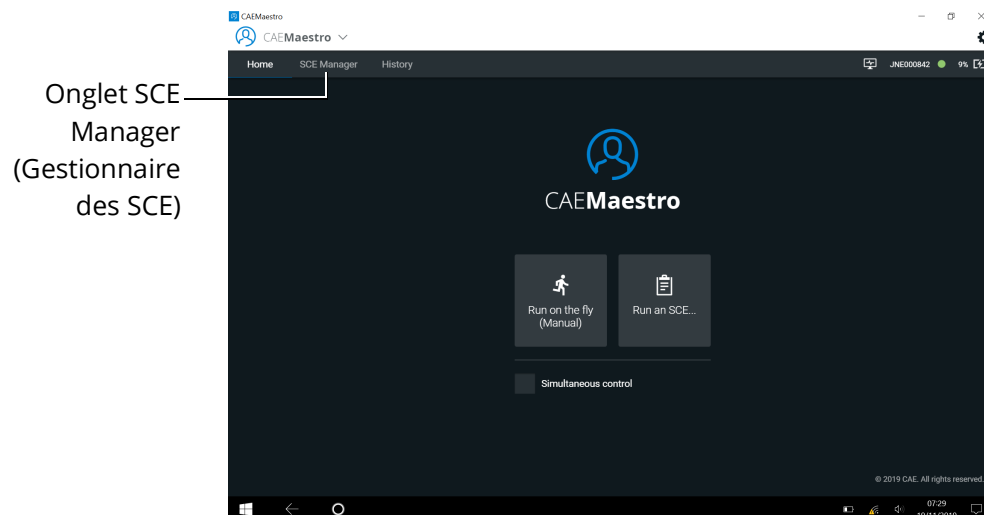


Écran d'accueil de CAE Maestro

- Appuyez sur l'onglet **More (Plus)** et choisissez **Import Module (Importer un module)** dans le menu déroulant.

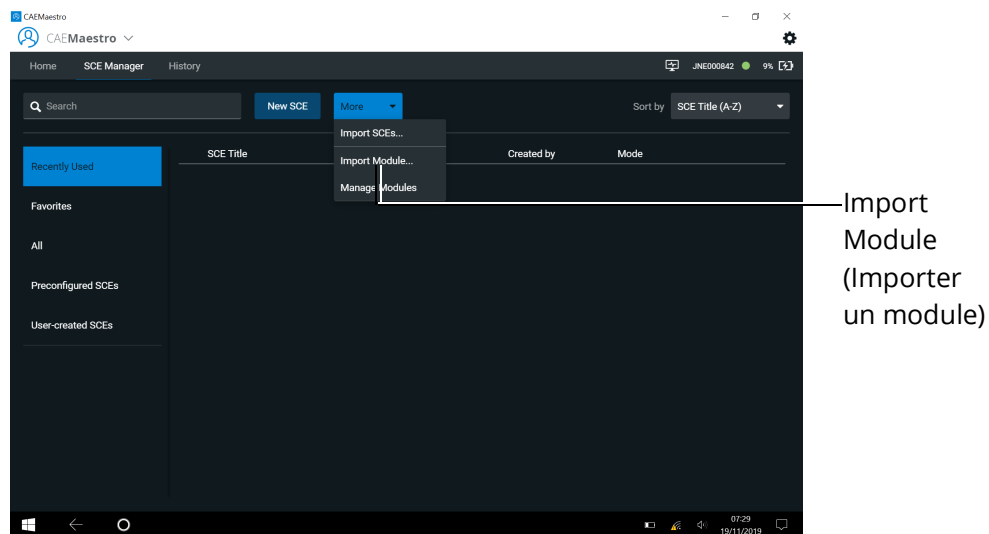


Import Module (Importer un module)

- Le volet d'Explorateur de fichiers apparaît. Appuyez sur **This PC (Cet ordinateur)**.

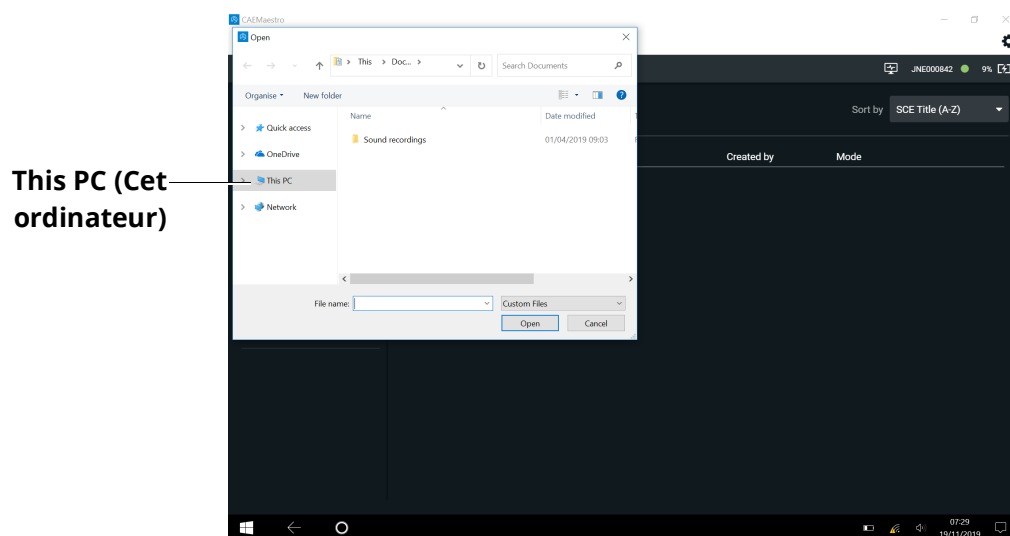


Explorateur de fichiers – This PC (Cet ordinateur)

- Appuyez sur le dossier **Documents (Documents)**.

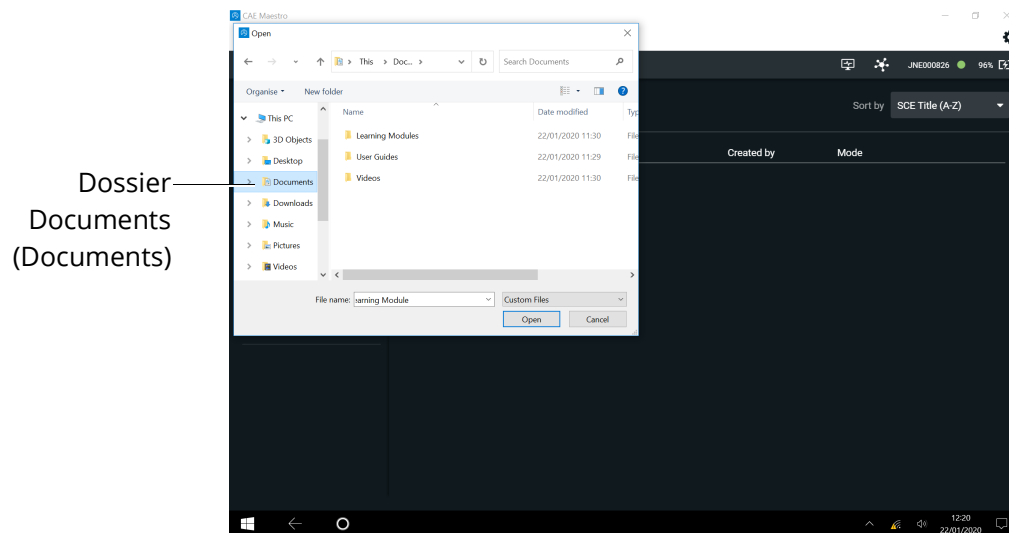


Explorateur de fichiers – Dossier Documents (Documents)

- Appuyez sur le dossier **Leaning Modules (Modules d'apprentissage)**.

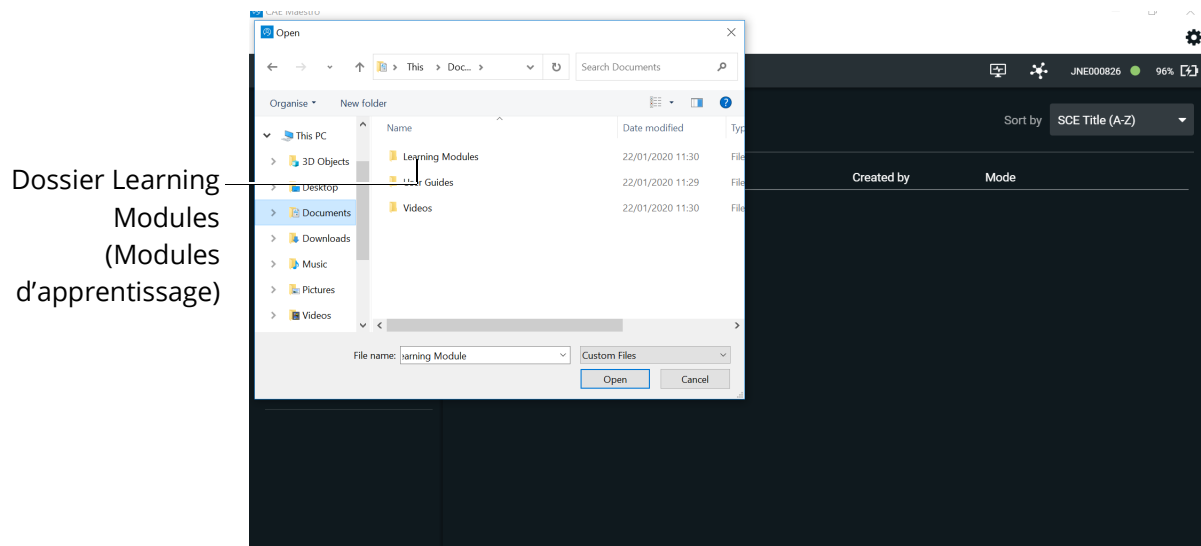


Explorateur de fichiers – Dossier Learning Module (Module d'apprentissage)

8. Sélectionnez le dossier de module d'apprentissage souhaité.

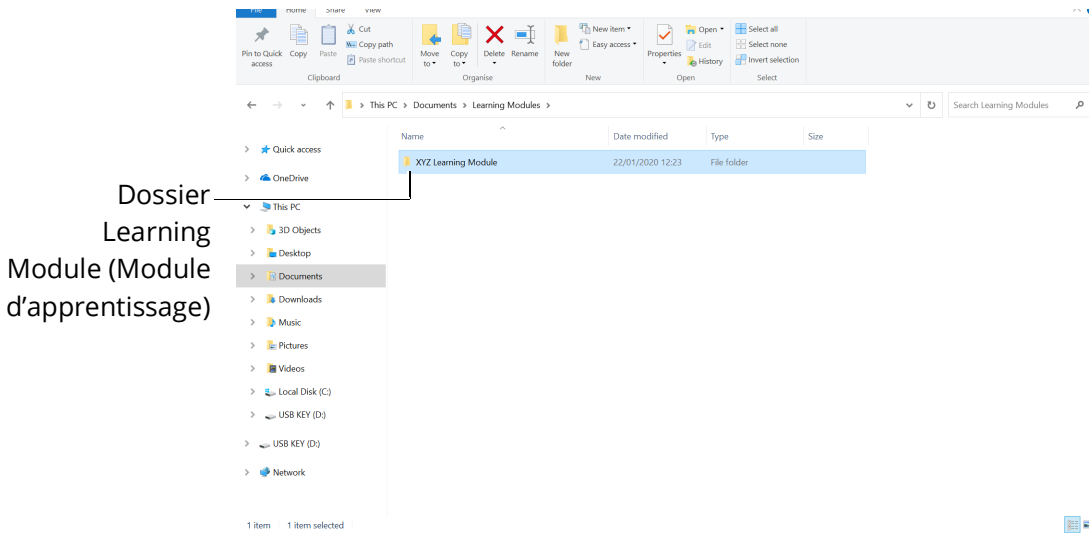


Explorateur de fichiers – Dossier Learning Module (Module d'apprentissage)

9. Sélectionnez le fichier du module d'apprentissage (avec l'extension .mlm) et appuyez sur **Open (Ouvrir)**.

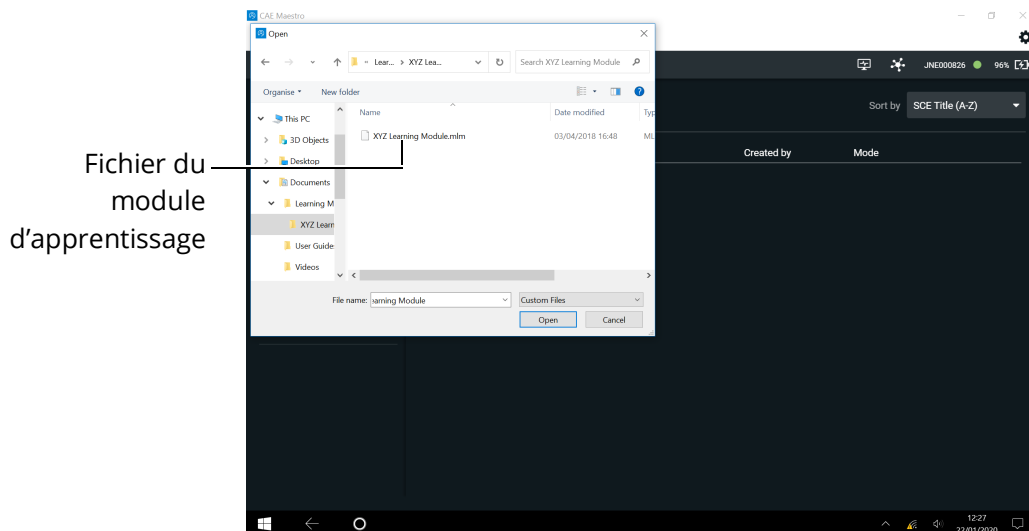

Explorateur de fichiers – Sélectionner le fichier .mlm

La fenêtre d'importation apparaît dans le logiciel CAE Maestro. Une fois que le fichier est importé, un message Success (Réussite) s'affiche.

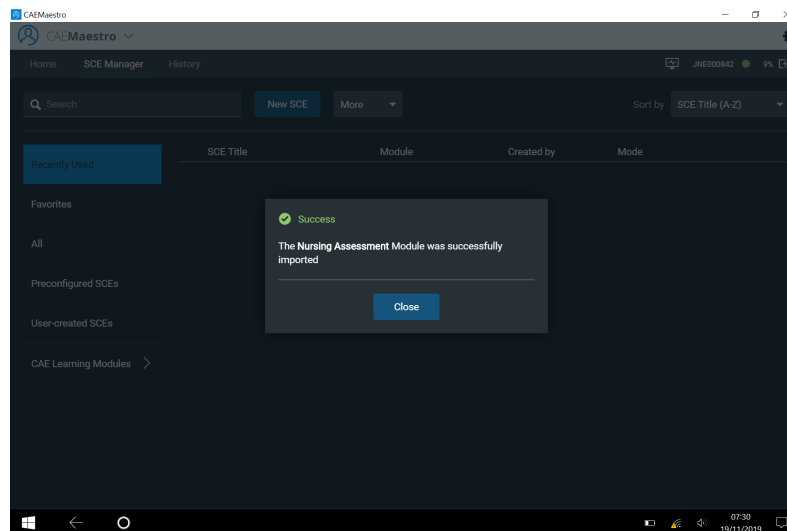

Message Success (Réussite)

10. Appuyez sur **Close (Fermer)** et les contenus du module d'apprentissage apparaissent dans le gestionnaire des SCE.