

IMPORTAZIONE DI MODULI DI APPRENDIMENTO

Gli utenti possono importare i Moduli di apprendimento nel software CAE Maestro utilizzando un computer Windows e un tablet per l'istruttore. I Moduli di apprendimento acquistati vengono inviati in formato file .zip.

Prima di importare i moduli di apprendimento, gli utenti devono:

1. Scaricare il file zip del Modulo di apprendimento.
2. Individuare il file zip del Modulo di apprendimento sul PC Windows e cliccare con il tasto destro del mouse sulla cartella.
3. Dalle opzioni del menu a comparsa, selezionare **Extract All (Estrai tutto)** per decomprimere la cartella.


Il software CAE Maestro è disponibile su due tipi di tablet per l'istruttore. Samsung Galaxy Tab S3 o il tablet Microsoft Surface Go. Per istruzioni su come importare i moduli di apprendimento sul Surface Go, vedere *Tablet Surface Go a pagina 9*.

Nota: Le seguenti istruzioni per l'importazione di Moduli di apprendimento in CAE Maestro variano a seconda del tipo di tablet fornito con il simulatore.

Samsung Galaxy Tab S3


Per trasferire i Moduli di apprendimento al tablet per l'istruttore:

1. Collegare il tablet Samsung al PC Windows utilizzando il cavo di interfaccia USB-C bianco.
2. Quando appare il messaggio pop-up che chiede di consentire l'accesso ai dati del dispositivo, toccare **Allow (Consenti)** per accedere al tablet Samsung come se fosse un'unità USB.
3. Aprire File Explorer (Esplora file) e individuare la cartella Galaxy Tab S3.

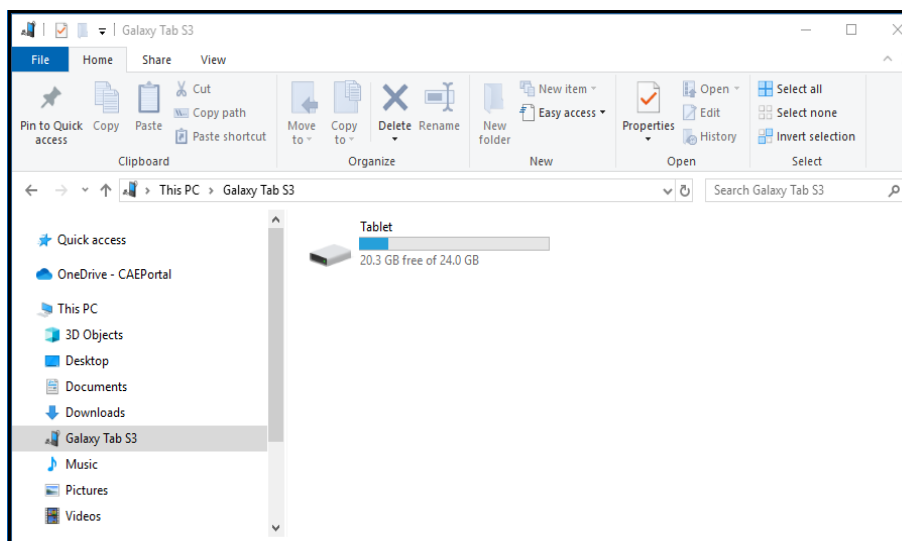

Esplora file - Cartella Galaxy Tab S3


4. Individuare la cartella Download/Learning Modules (Download/Moduli di apprendimento) sul tablet.

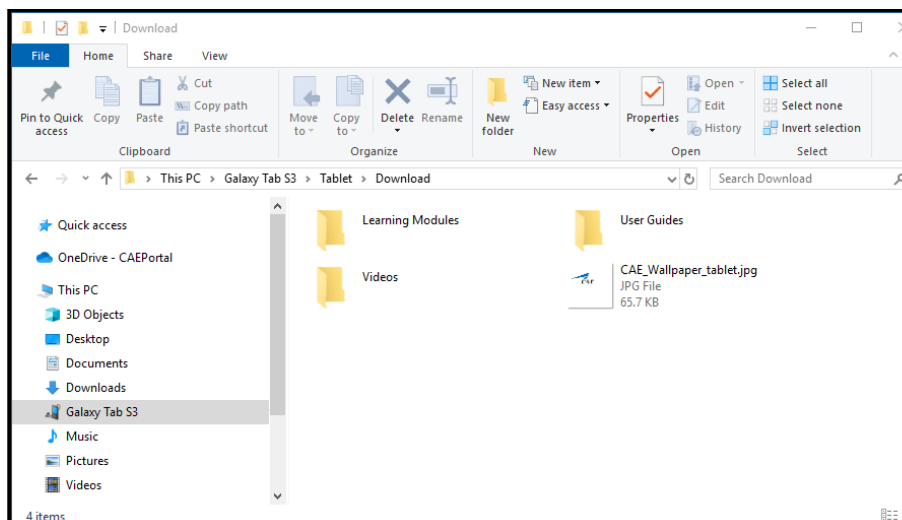

Esplora file - Cartella Download

Nota: Se la cartella Learning Modules (Moduli di apprendimento) non esiste ancora nella cartella Download, creare la nuova cartella ora usando i passi seguenti:

- a. Mentre si trova nella cartella Download, fare clic con il tasto destro del mouse per aprire un menu contestuale e selezionare **New Folder (Nuova cartella)**.
 - b. Nominare la nuova cartella Learning Modules (Moduli di apprendimento) e premere **Enter (Invio)**.
5. Spostare la cartella o le cartelle dei Learning Modules (Moduli di apprendimento) dalla posizione sul PC alla cartella **Downloads > Learning Modules (Download > Moduli di apprendimento)** del tablet Samsung.

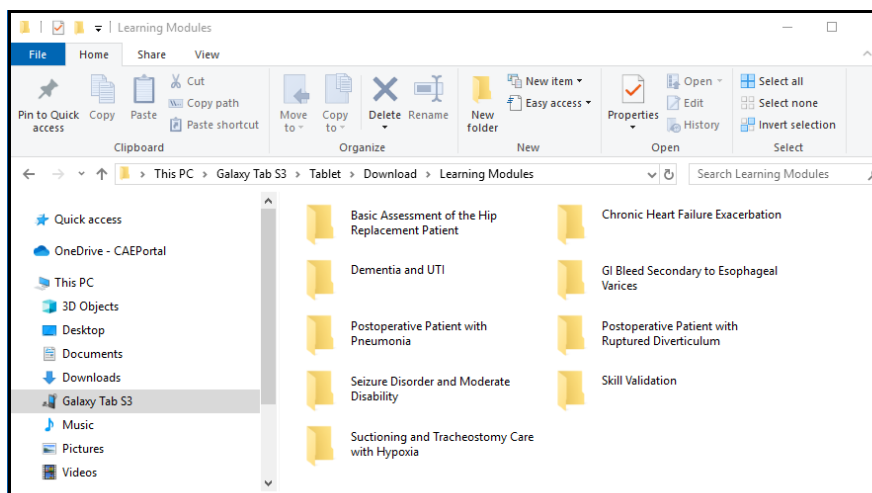


Esplora file - Cartella Learning Module (Modulo di apprendimento) su tablet

6. Scollegare il tablet dal PC al termine del trasferimento o dei trasferimenti.

Importazione Moduli di apprendimento dal tablet Samsung in CAE Maestro


Per importare i Moduli di apprendimento nel tablet per l'istruttore Samsung:

1. Accendi il simulatore e aspetta che dica "Ciao".
2. Accendere il tablet, toccare **CAEMaestro** per avviare il Maestro ed effettuare il login.
3. Quando appare la schermata iniziale, toccare **la scheda SCE Manager (Gestione SCE)**.

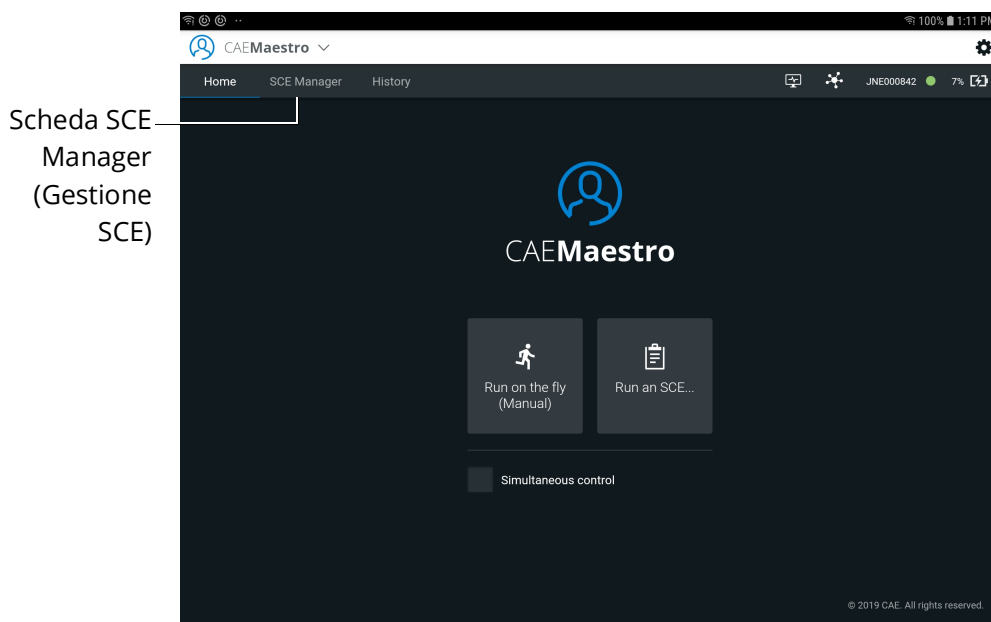


Schermata iniziale di CAE Maestro

4. Toccare la scheda **More (Altro)** e scegliere **Import (Importa) Module (Modulo)** dal menu a discesa.

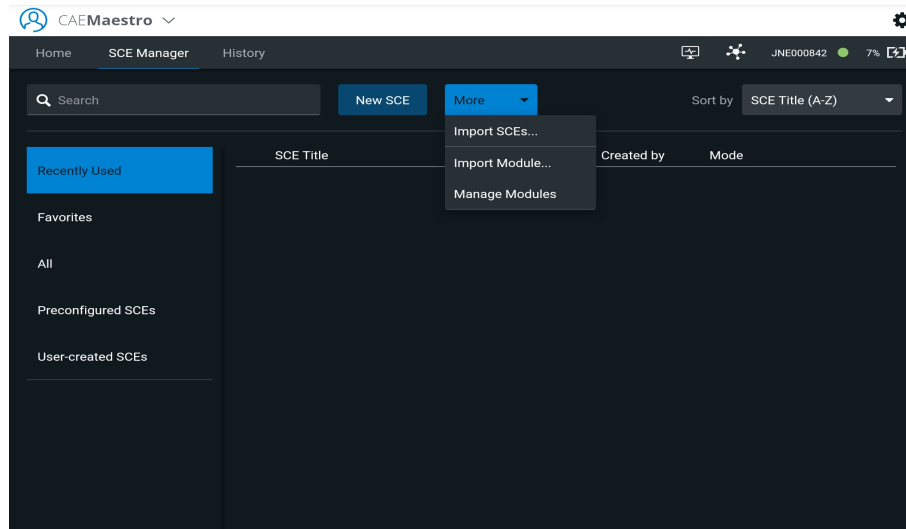

Schermata SCE Manager (Gestione SCE) - Modulo di importazione


5. Nel menu a comparsa Select an Action (Seleziona un'azione), toccare **Files (File)**.

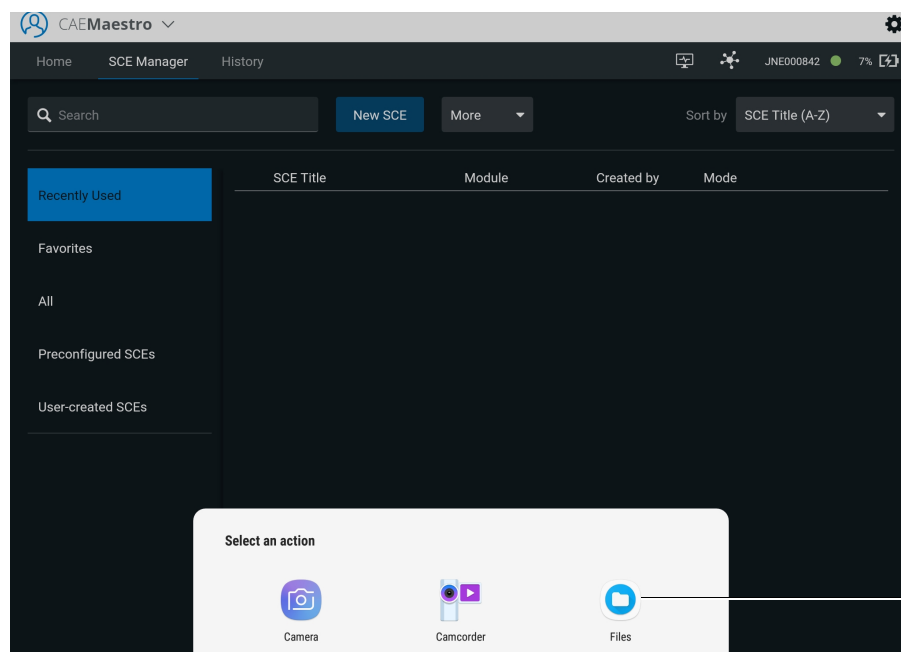

Icona **Files**
(File)

Schermata SCE Manager (Gestione SCE) - Select an Action (Selezionare un'azione)


- Nell'angolo in alto a destra della schermata, toccare **More Options (Altre opzioni)** (ellissi verticale) per visualizzare un menu a comparsa.

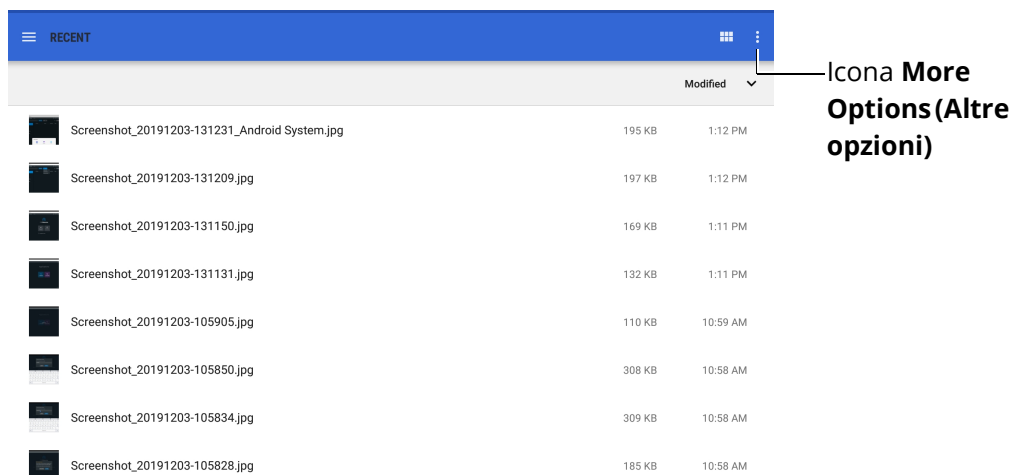

Cartella File - Icona More Options (Altre opzioni)

- Toccare **Show internal storage (Visualizza la memoria interna)**.


Nota: Se la finestra di dialogo si apre con la visualizzazione Hide internal storage (Nascondi la memoria interna) visualizzata, chiudere il menu toccando un punto qualsiasi al di fuori della finestra.

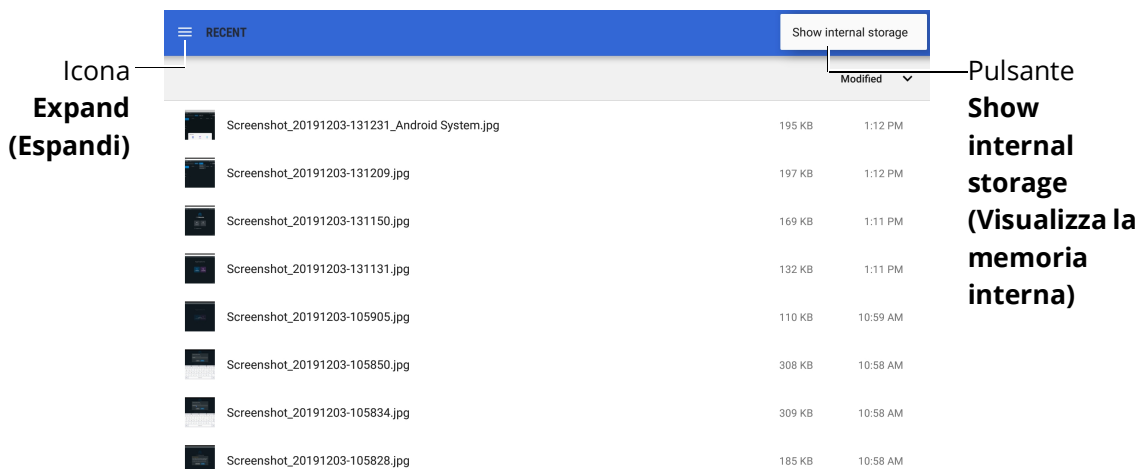

Cartella File - Icona Expand (Espandi) e Pulsante Show Internal Storage (Visualizza la memoria interna)


- Nell'angolo in alto a sinistra, toccare **Expand (Espandi)** (tre linee orizzontali) per aprire il File Manager.

9. Dal menu File Manager, toccare la cartella Galaxy Tab S3.

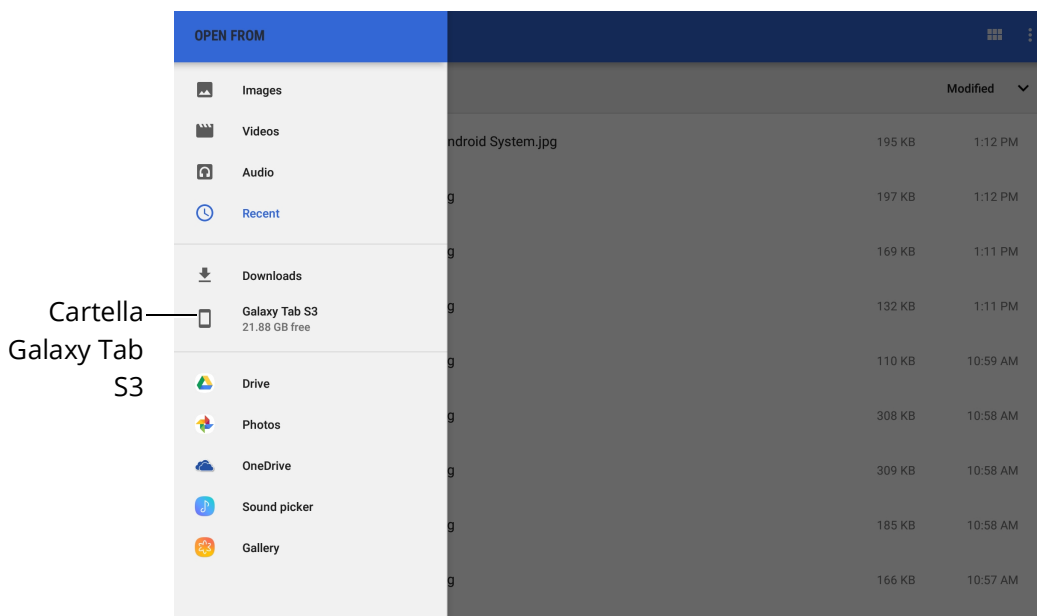

Cartella Galaxy Tab S3


- Appare il menu della cartella Galaxy Tab S3.

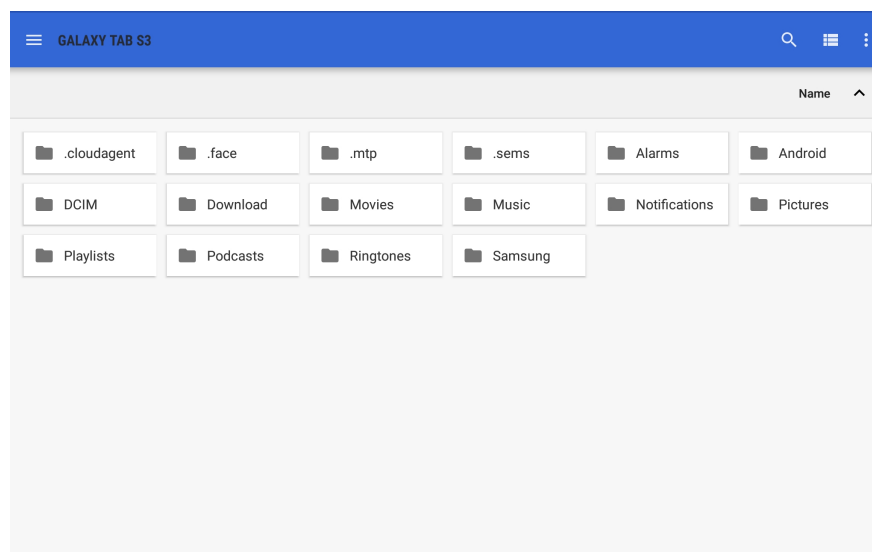

Menu cartella Galaxy Tab3 - Grid View (Visualizzazione griglia)


10. Toccare la cartella Download.
11. Toccare la cartella Learning Modules (Moduli di apprendimento).

12. Nell'angolo in alto a destra, toccare **View (Visualizza)** per passare alla List View (Visualizzazione elenco).

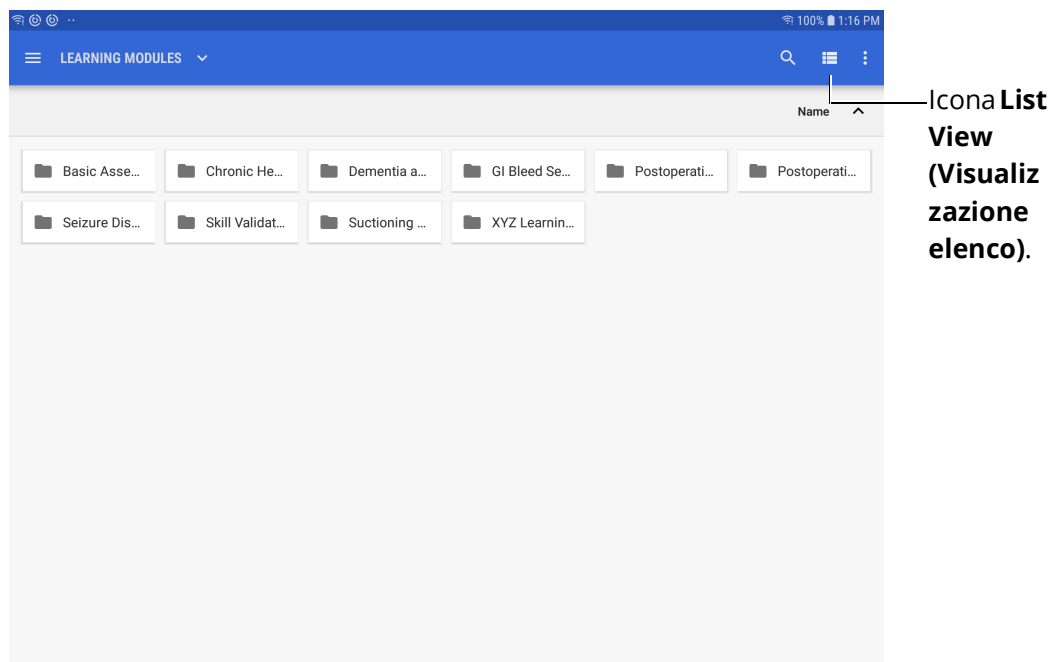


Cartella Learning Module (Modulo di apprendimento) - Grid View (Visualizzazione griglia)

Le voci nella cartella Learning Modules (Moduli di apprendimento) appaiono in List View (Visualizzazione elenco).

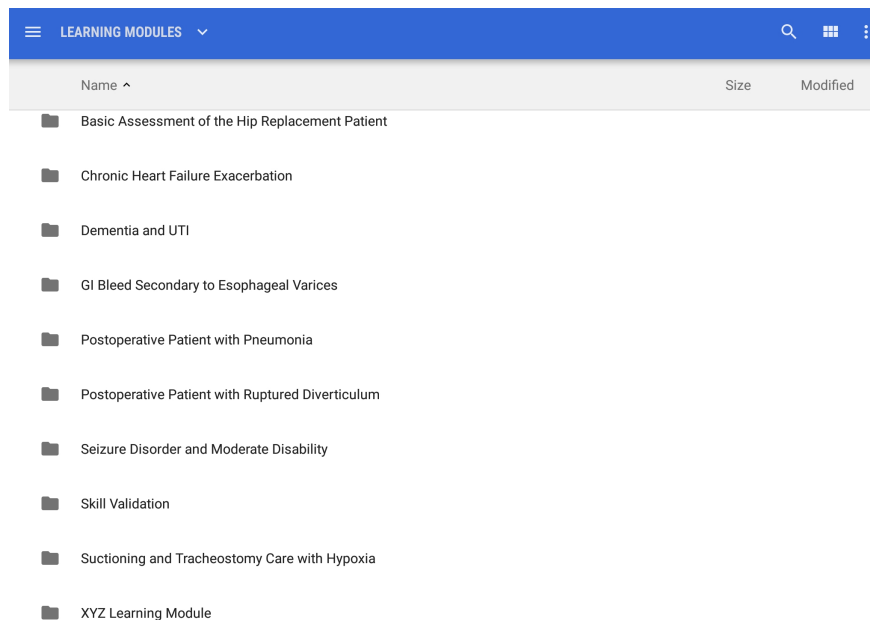


Cartella Learning Module (Modulo didattico) - List View (Visualizzazione elenco)

13. Toccare la cartella desiderata dei Learning Modules (Moduli di apprendimento) per visualizzare il contenuto della cartella e toccare il file del Learning Module (Modulo di apprendimento) (con estensione .mlm) per selezionare ed importare il file.

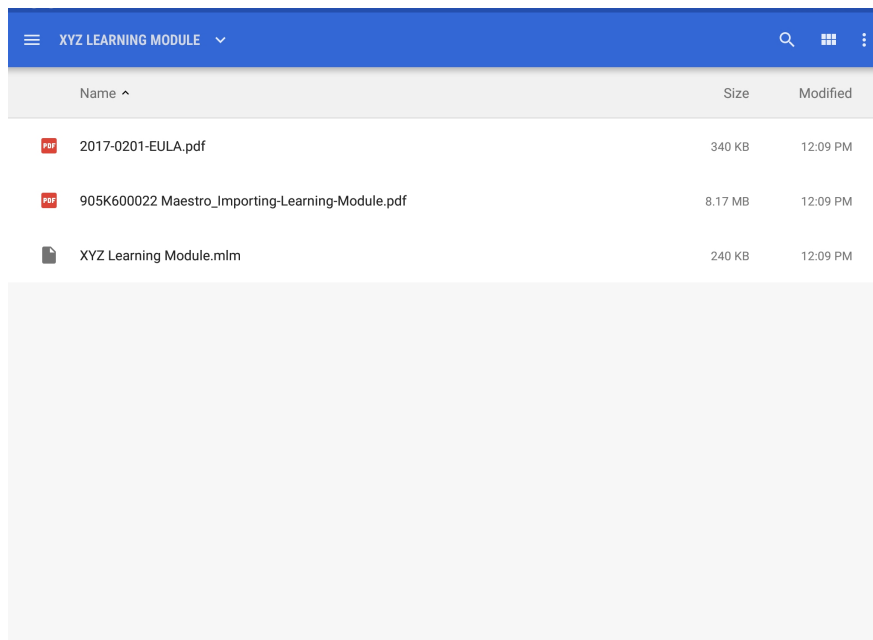

Cartella Learning Modules (Moduli di apprendimento) - Selezionare il file .mlm

La finestra Importing (Importazione) appare nel software CAE Maestro. Al termine dell'importazione appare un messaggio di successo.

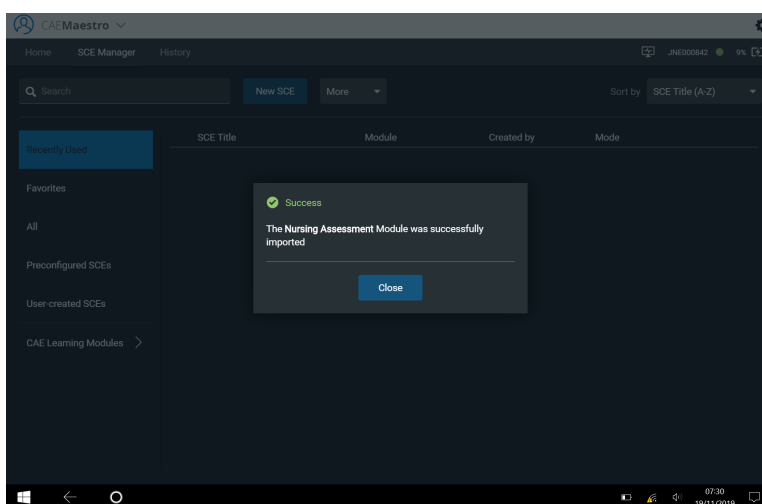


Gestione SCE - Messaggio di successo

14. Toccare **Close (Chiudi)** e il contenuto del Modulo di apprendimento apparirà nella SCE Manager (Gestione SCE).

Tablet Surface Go


Per trasferire i Moduli di apprendimento dal PC Windows al tablet Surface Go:

1. Inserire una chiave USB nel PC. Sul PC, navigare su Download, quindi fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella Learning Modules (Moduli di apprendimento) e scegliere **Copy (Copia)**.

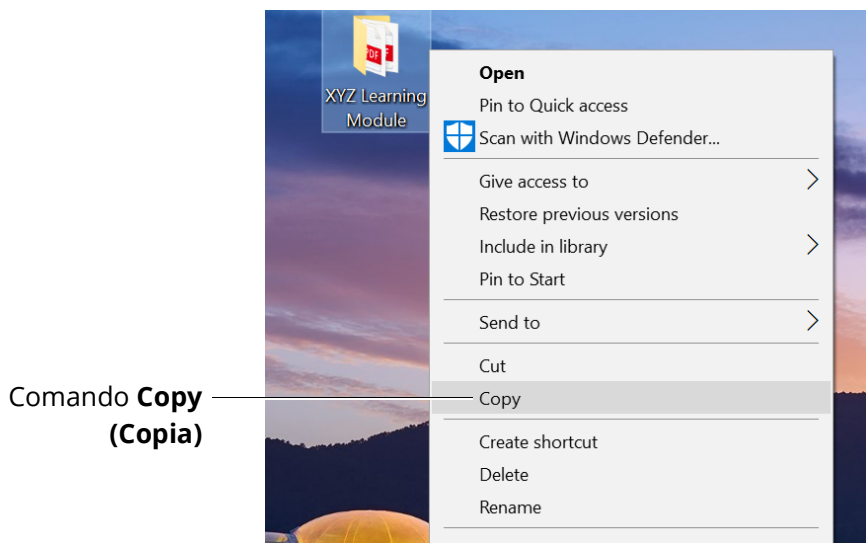


Cartella Learning Modules (Moduli di apprendimento) su PC - Comando Copy (Copia)

2. Selezionare la chiave USB in File Explorer. Cliccare con il tasto destro del mouse nella cartella USB Key (Chiave USB), quindi scegliere **Paste (Incolla)**.

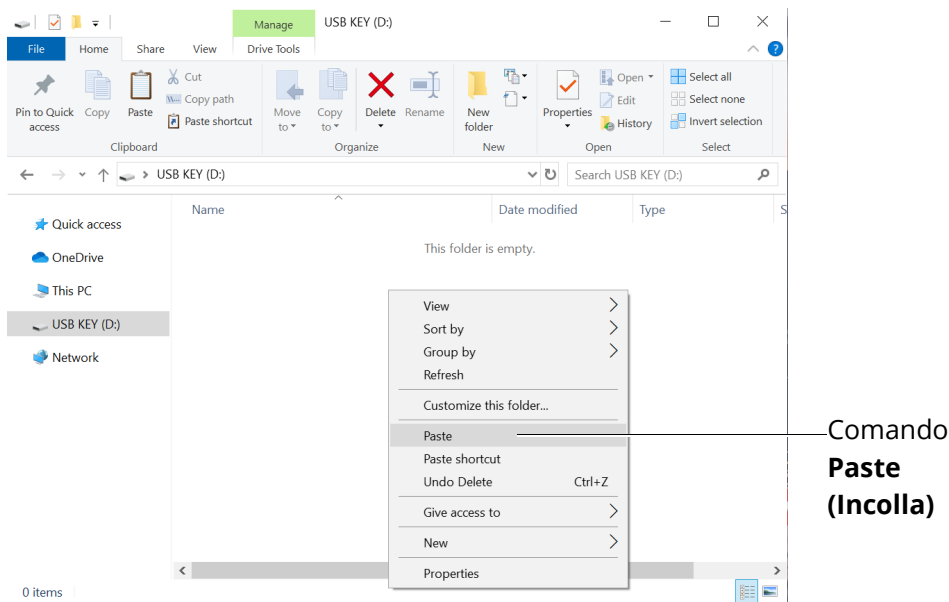

Cartella Learning Modules (Moduli di apprendimento) su PC - Comando Paste (Incolla)


3. Cliccare con il tasto destro del mouse sulla cartella del dispositivo chiave USB e scegliere Eject Device (Espelli dispositivo).

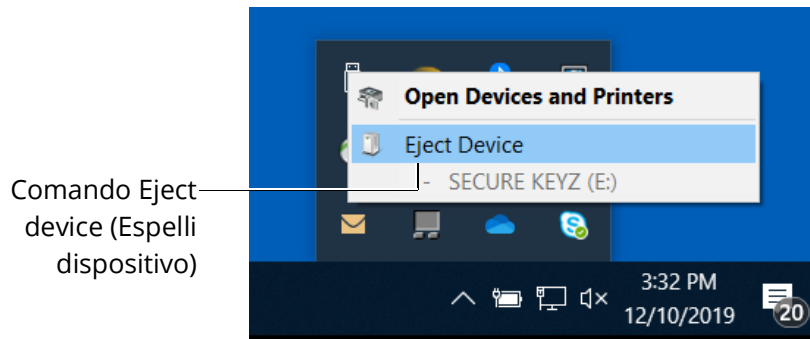

Cartella USB Key (Chiave USB) su PC - Eject Device (Espelli dispositivo)


Collegare la chiave USB al dongle USB-C, quindi collegare il dongle USB-C al tablet Surface Go.

4. Accendere il tablet Surface Go. In File Explorer (Esplora file) appare la chiavetta USB. Toccare la chiavetta USB per aprire la directory file della chiavetta USB.

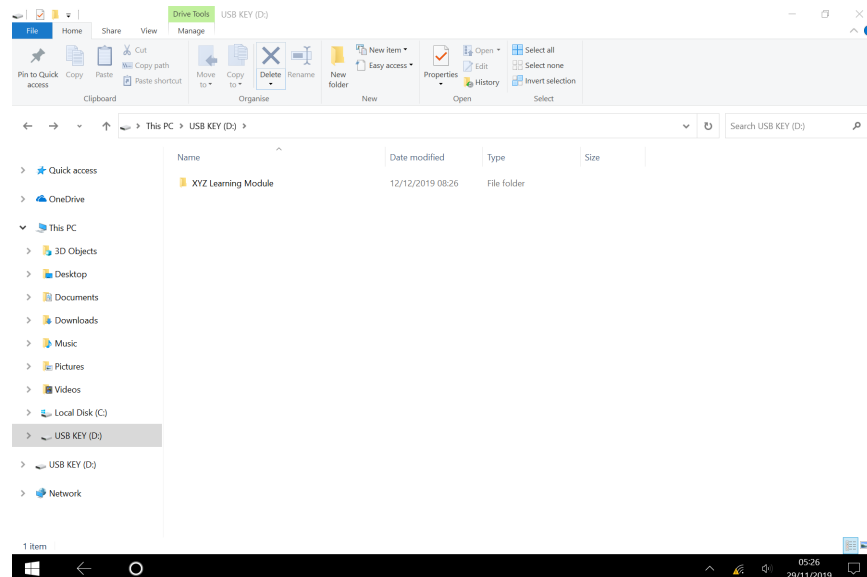


Chiavetta USB su tablet Surface Go - File Directory (Directory file)

5. Toccare la cartella denominata XYZ Learning Module (Modulo di apprendimento XYZ).
Nella barra dei menu, toccare **Copy (Copia)**.

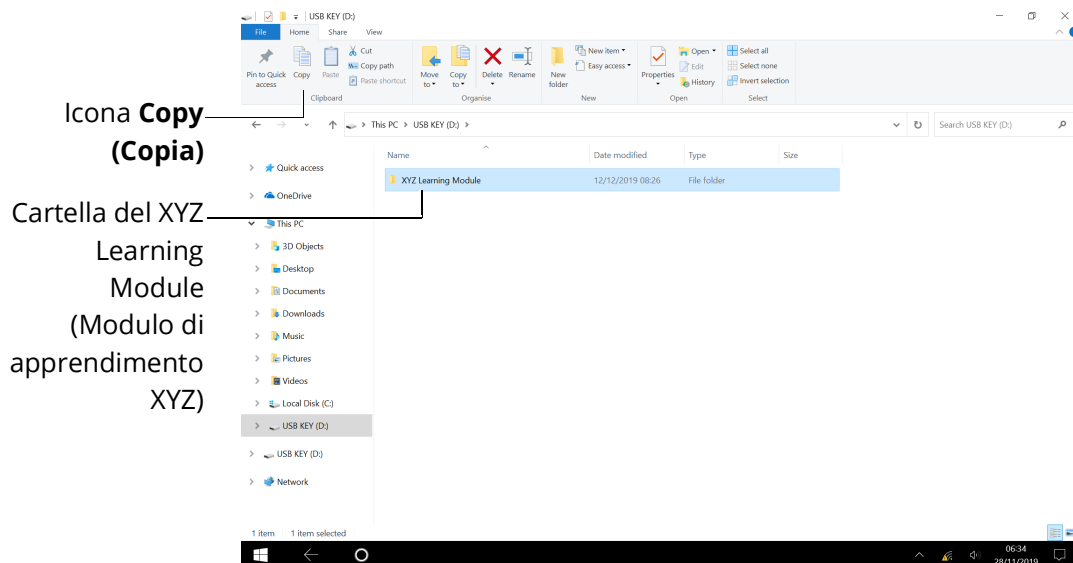


Tablet Surface Go - Icona Copy (Copia)

6. In File Explorer (Esplora file), toccare la cartella Documents (Documenti).

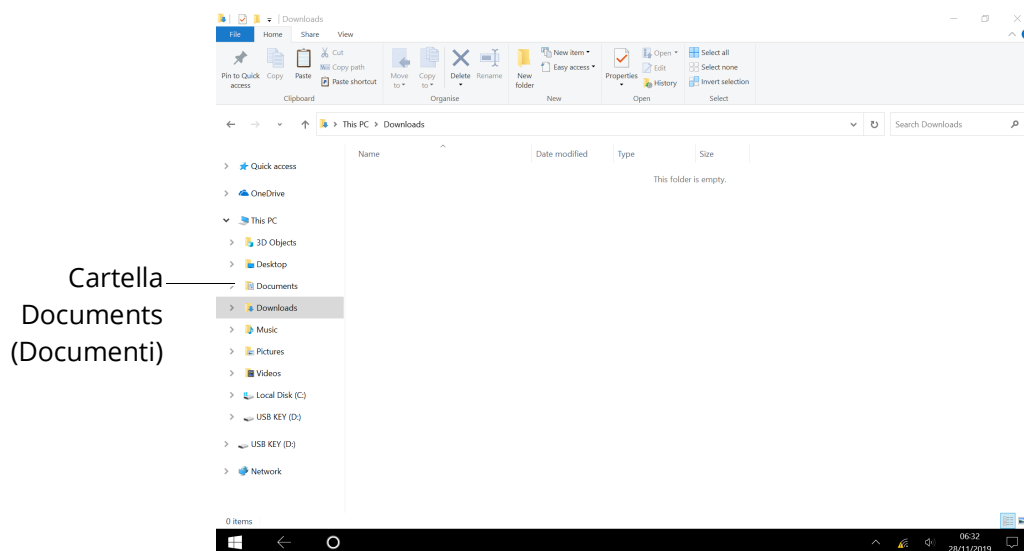

Esplora file tablet Surface Go - Cartella Documents (Documenti)


7. In File Explorer (Esplora file), toccare la cartella Documents (Documenti).

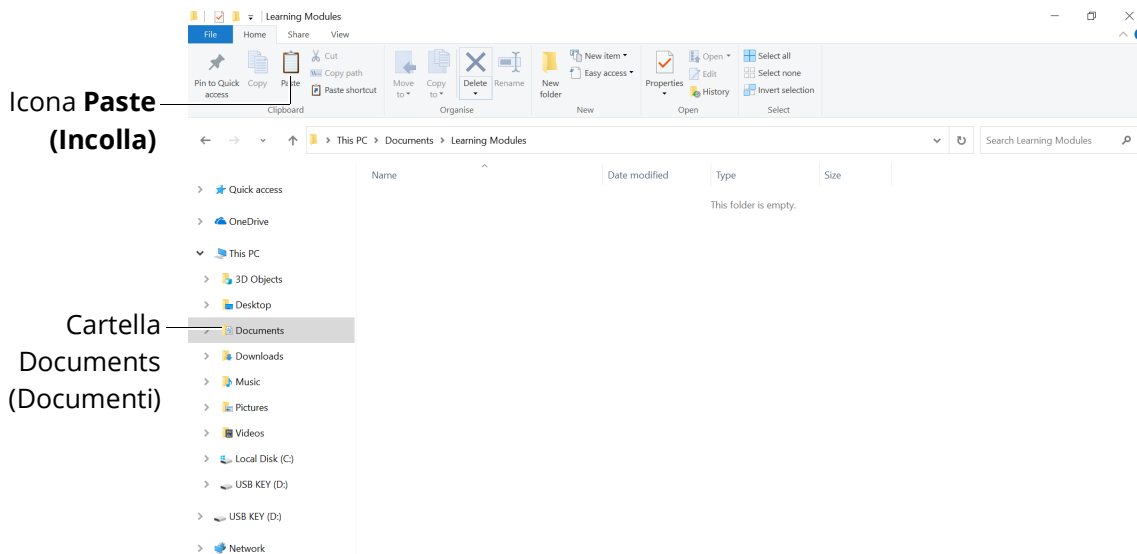

Esplora file tablet Surface Go - Cartella Documents (Documenti)


Per importare moduli di apprendimento dal tablet Surface Go in CAE Maestro:

1. Accendi il simulatore e aspetta che dica "Ciao".
2. Accendere il tablet, toccare **CAEMaestro** per avviare Maestro, quindi effettuare il login.
3. Quando appare la pagina iniziale, toccare la scheda **SCE Manager (Gestione SCE)**.

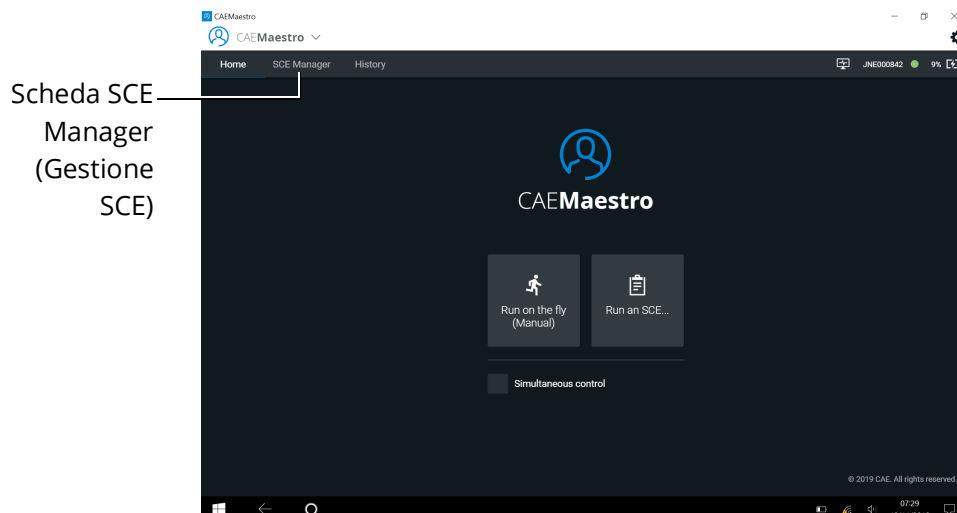


Schermata iniziale di CAE Maestro

4. Toccare la scheda **More (Altro)** e scegliere **Import (Importa) Module (Modulo)** dal menu a discesa.

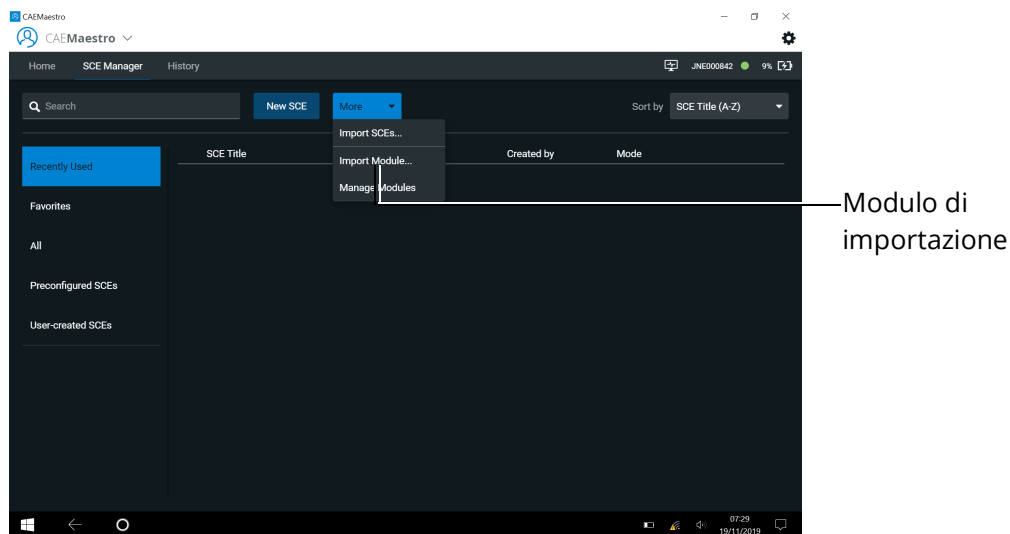


Modulo di importazione

5. Appare il riquadro File Explorer (Esplora file). Toccare **This PC (Questo PC)**.

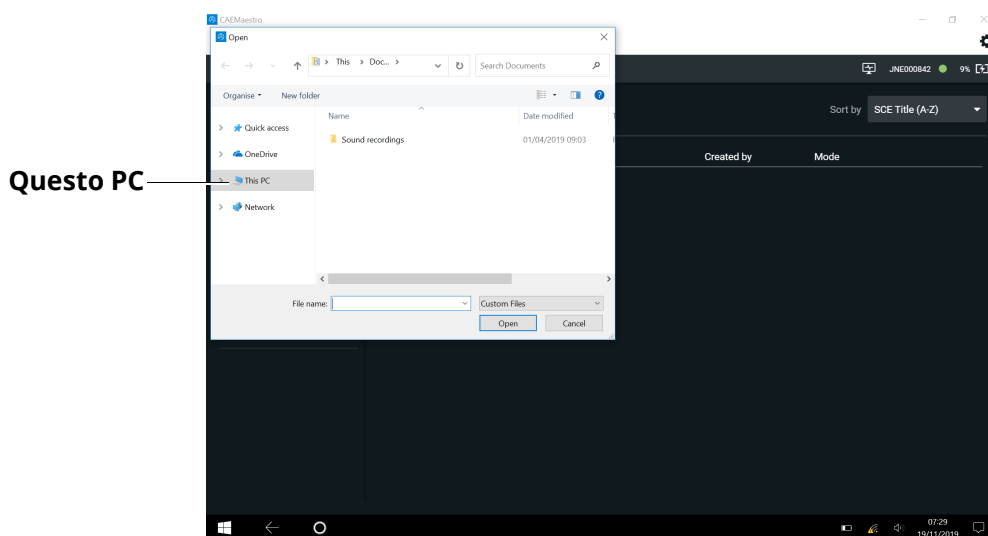


Esplora file - Questo PC

6. Toccare la cartella **Documents (Documenti)**.

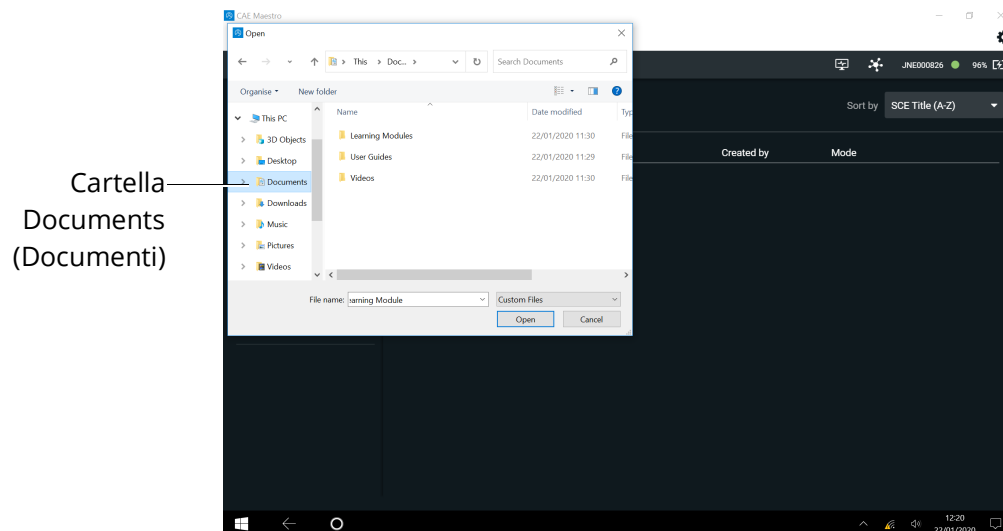


Esplora file - Cartella documenti

7. Toccare la cartella **Learning Modules (Moduli di apprendimento)**.

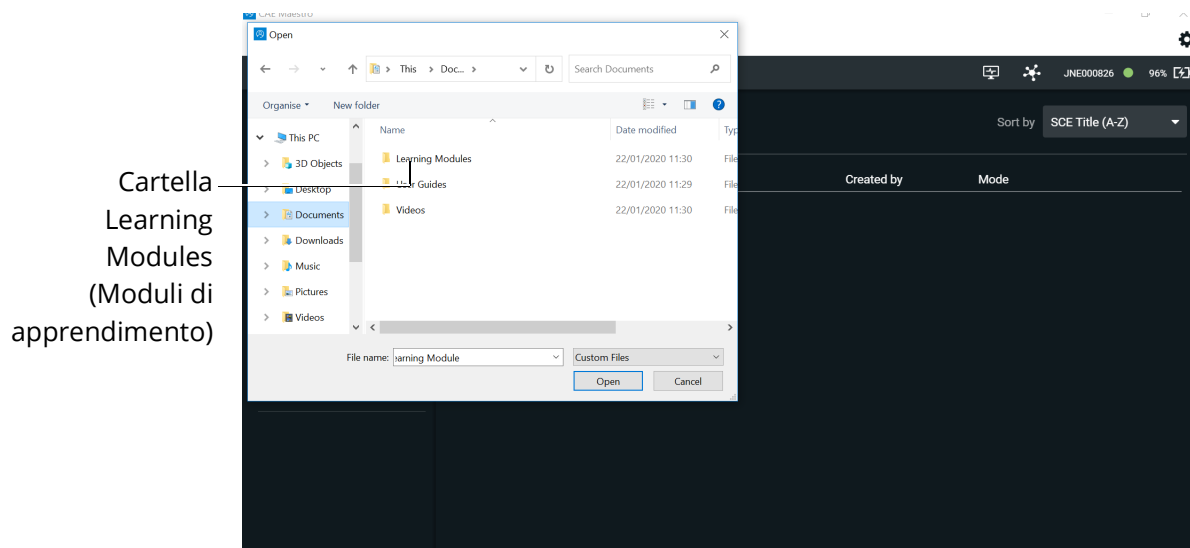


Esplora file - Cartella Learning Module (Modulo di apprendimento)

- Selezionare la cartella desiderata del Learning Module (Modulo di apprendimento).

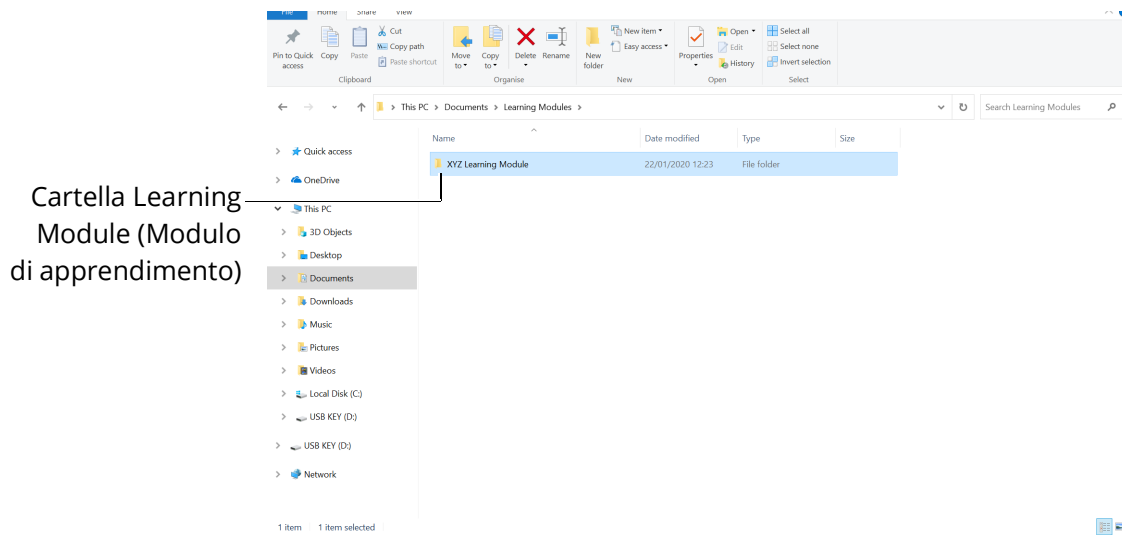


Esplora file - Cartella Learning Module (Modulo di apprendimento)

- Selezionare il file del Learnign Module (Modulo di apprendimento) (con estensione .mlm) e toccare **Open (Apri)**.

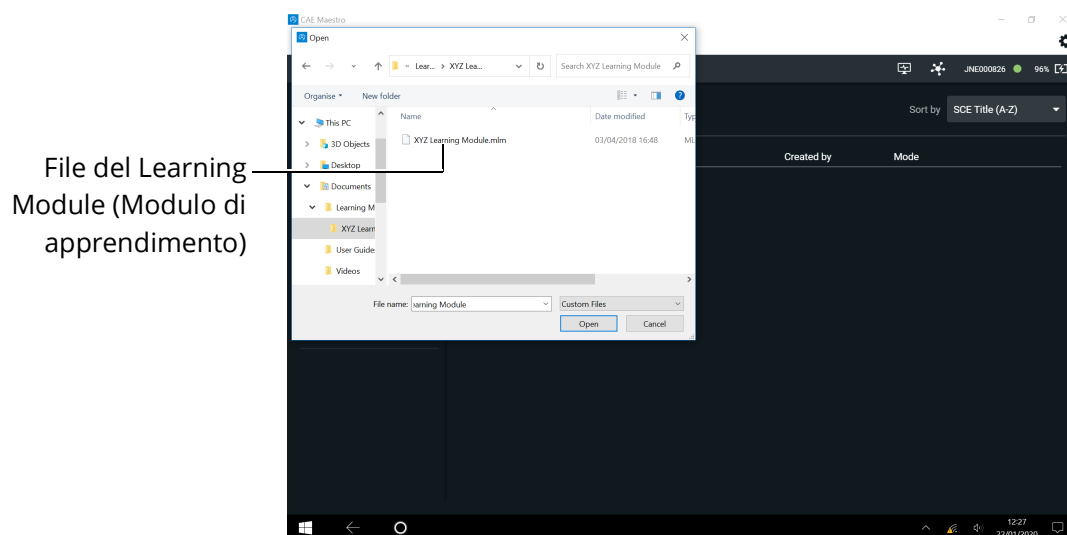

Esplora file - Selezionare il file .mlm

La finestra Importing (Importazione) appare nel software CAE Maestro. Quando il file viene importato, viene visualizzato un messaggio di successo.

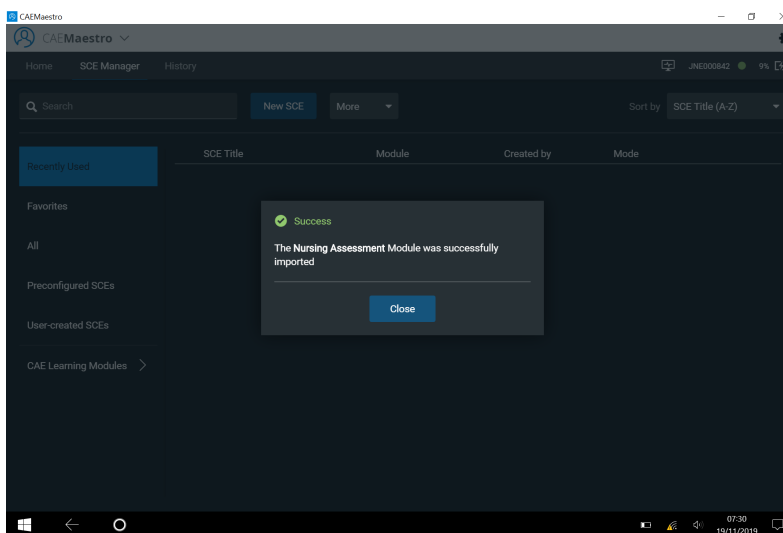

Messaggio di successo

10. Toccare **Close (Chiudi)** e il contenuto del Modulo di apprendimento) apparirà nella SCE Manager (Gestione SCE).