


在 MUSE 中安装学习模块

在安装 CAE Healthcare 学习模块之前，请确保学习模块文件位于外部存储设备或导师工作站的硬盘上。

重要提示：在安装任何学习模块之前，必须先连接模拟器。

访问 Muse


1. 使用具有适当权限的帐户登录 Muse 软件。
主页随即显示。
2. 单击右上角的 **System Administration (系统管理)** 按钮。
随即显示 System Administration (系统管理) 界面。

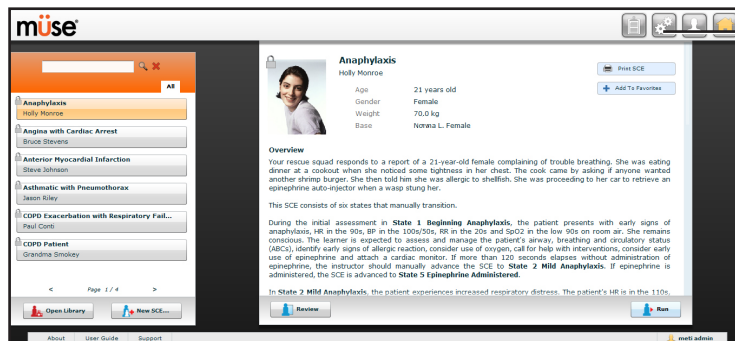

主页

3. 在 System Administration (系统管理) 界面上，单击 **Content Management (内容管理)**。

Content Management
(内容管理) 按钮

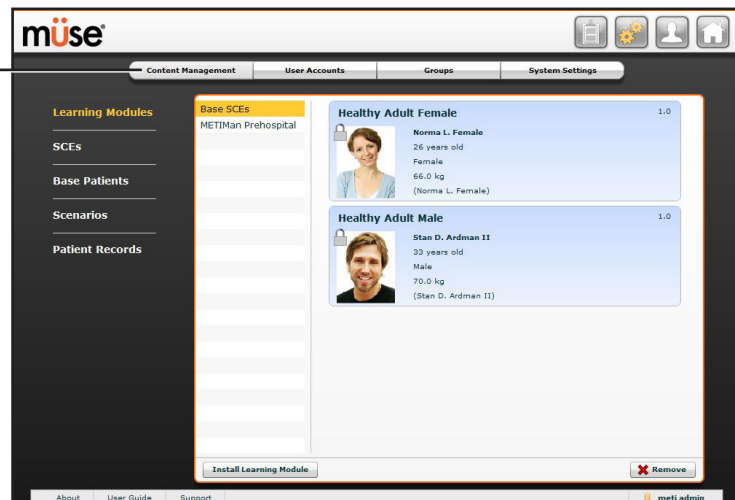

Learning Modules (学习模块) 面板

选择 Content Management（内容管理）按钮后，系统将默认显示 Learning Modules（学习模块）面板。如果显示的是其他面板，可单击 **Learning Modules（学习模块）** 链接返回至 Learning Modules（学习模块）面板。

在 Learning Modules（学习模块）面板中，可按需安装或删除学习模块。




在 Muse 中安装学习模块

1. 单击 **Install Learning Module（安装学习模块）**。
随即显示 Select file to upload（选择要上传的文件）对话框。




2. 在保存学习模块文件的外部存储设备或硬盘上找到所需的学习模块文件。
文件扩展名为 **.mlm**。
3. 选择相应文件，然后单击 **Select（选择）** 或 **Open（打开）**。

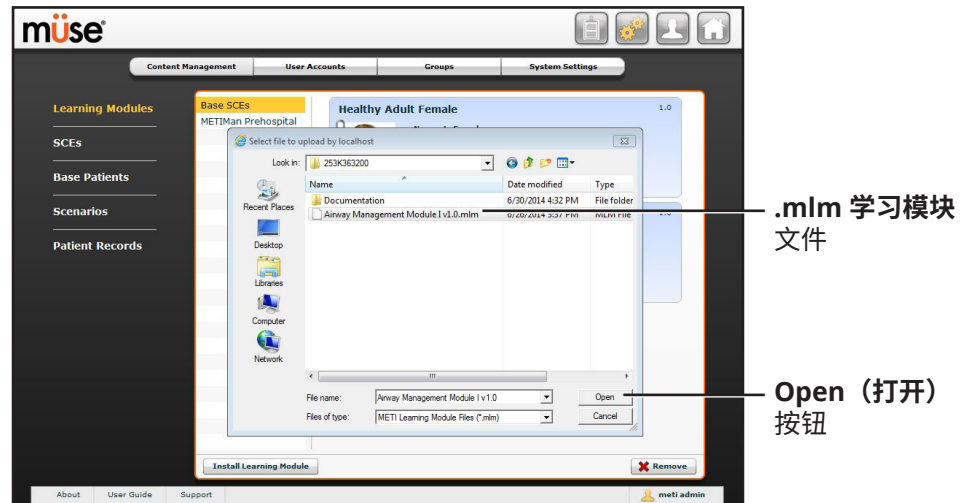

Learning Modules (学习模块) 面板

- 单击 Müse 软件中的 **Home (主页)** 按钮刷新屏幕，然后返回到 Learning Modules (学习模块) 面板。


学习模块将显示在 Learning Modules (学习模块) 面板中，以供您使用。

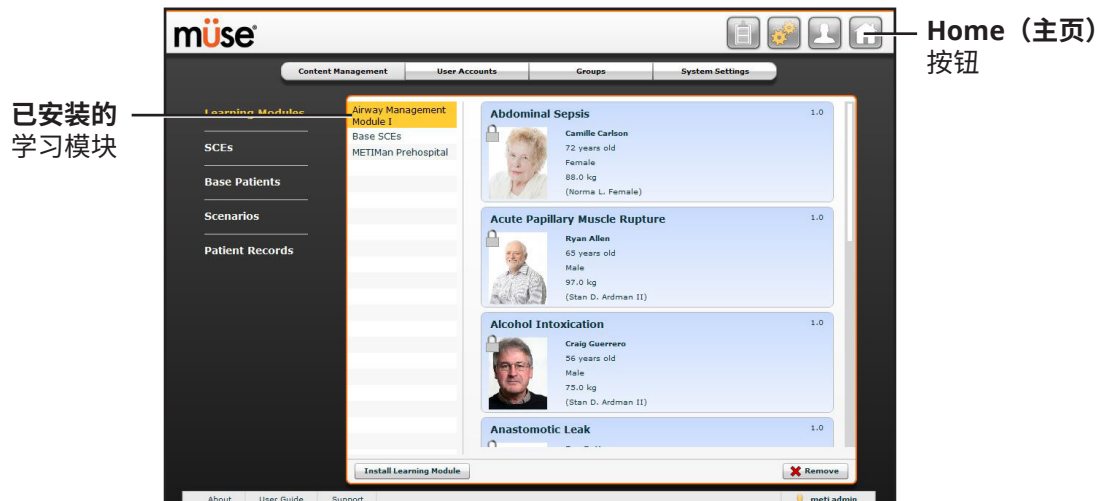

Learning Modules (学习模块) 面板

从 Muse 中删除学习模块


1. 从 Learning Modules（学习模块）面板中选择相应的学习模块。

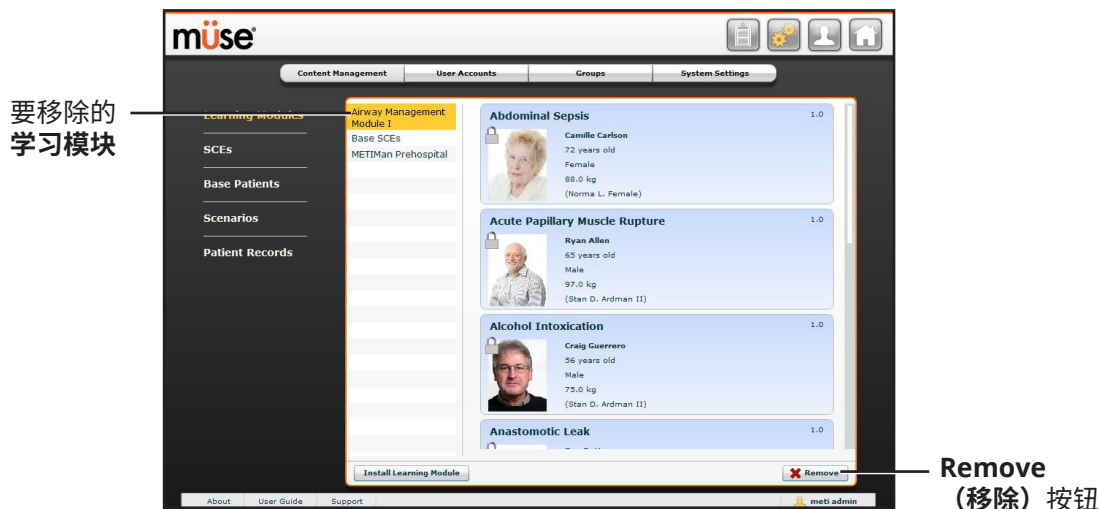

Learning Modules（学习模块）面板

2. 单击 **Remove（移除）** 按钮。

随即显示 Remove Learning Module（移除学习模块）警告消息。

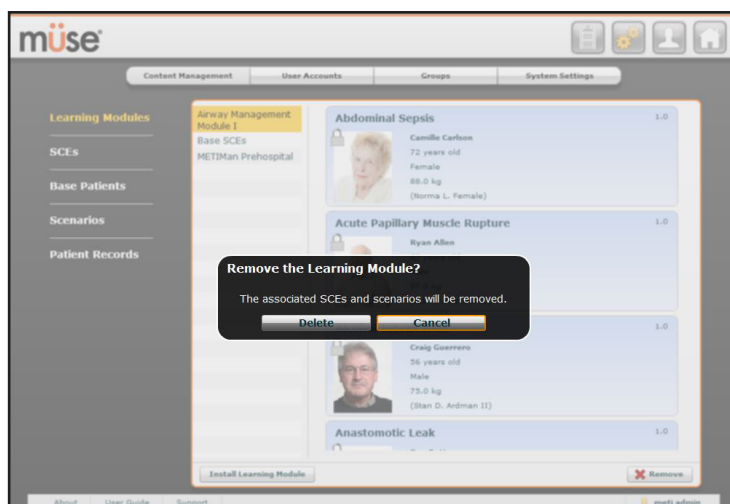

Learning Modules（学习模块）面板

3. 单击 **Remove（移除）**。

随即将删除该学习模块及其所有 SCE。

注意：预配置的学习模块和基本 SCE 无法删除。如果用户尝试删除，屏幕上将显示失败消息。