

УСТАНОВКА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ В MÜSE

Перед установкой учебного модуля CAE Healthcare убедитесь, что файлы учебного модуля находятся на внешнем запоминающем устройстве или на жестком диске рабочей станции инструктора.

ВАЖНО: Необходимо установить соединение с симулятором перед установкой любого учебного модуля.

Доступ к Müse

1. Войдите в программное обеспечение Müse, используя учетную запись с соответствующими привилегиями.
Отображается домашняя страница.
2. Нажмите кнопку **System Administration (Администрирование системы)** в правом верхнем углу.
Отображается экран System Administration (Администрирование системы).




Кнопка **System Administration (Администрирование системы)**

Домашняя страница

3. На экране System Administration (Администрирование системы) нажмите **Content Management (Управление контентом)**.

Кнопка **Content Management (Управление контентом)**

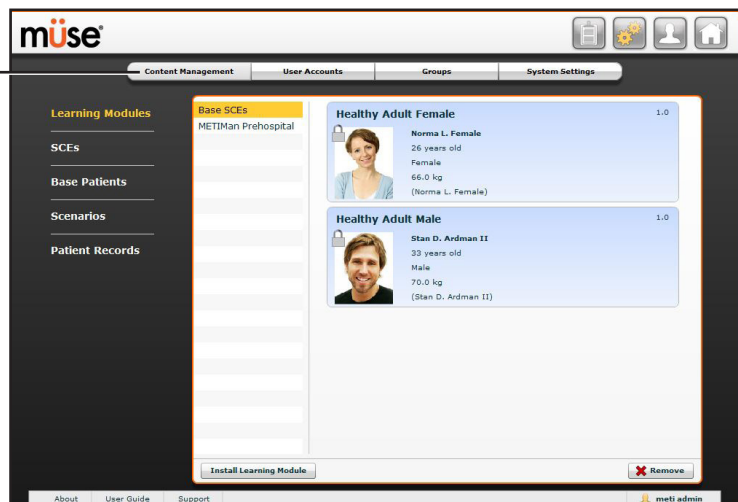

Панель Learning Modules (Учебные модули)

При нажатии кнопки Content Management (Управление контентом) по умолчанию отображается панель Learning Modules (Учебные модули). При выборе другой панели вернитесь на панель Learning Modules (Учебные модули), щелкнув ссылку **Learning Modules (Учебные модули)**.


На панели Learning Modules (Учебные модули) можно установить или удалить учебные модули.




Для установки учебного модуля в Muse

1. Нажмите **Install Learning Module (Установить учебный модуль)**.

Отображается диалоговое окно Select file to upload (Выберите файл для отправки).

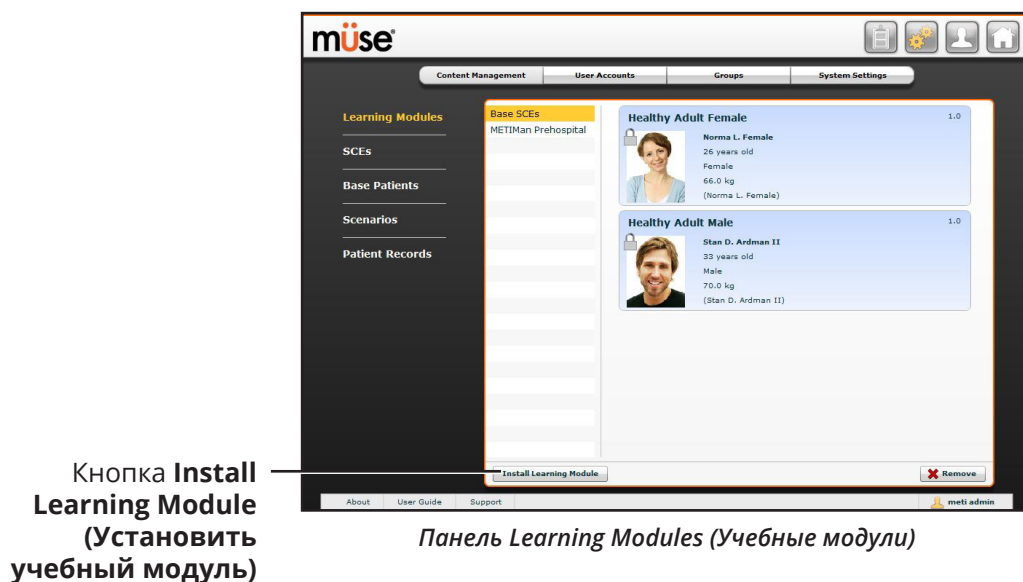


- Найдите правильный файл учебного модуля на внешнем запоминающем устройстве или на жестком диске, где сохранен файл Учебного модуля.
Расширение файла **.mlm**.
- Выберите файл и нажмите **Select (Выбрать)** или **Open (Открыть)**.

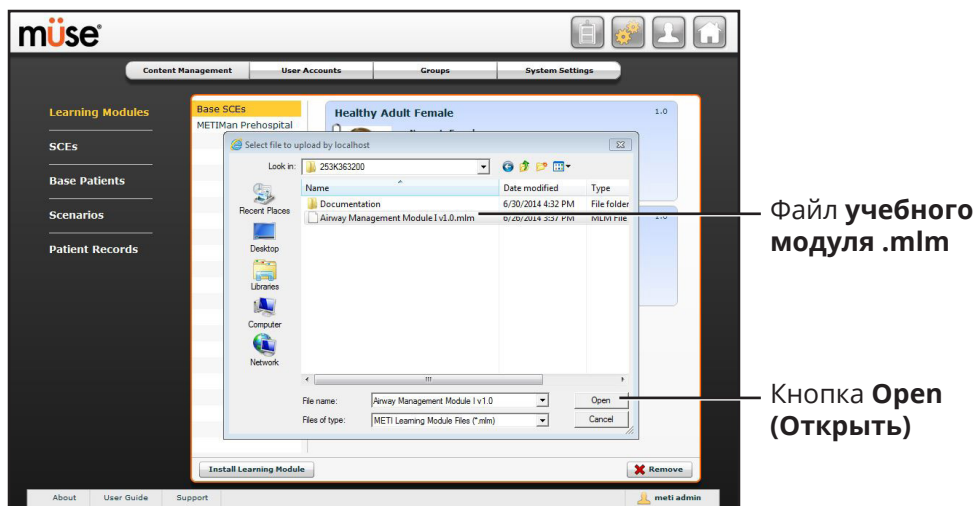

Панель Learning Modules (Учебные модули)


- Обновите экран, нажав кнопку **Home (Домашняя страница)** в программном обеспечении Müse, а затем вернитесь на панель Learning Modules (Учебные модули).
Учебный модуль отображается на панели Learning Modules (Учебные модули) и доступен для использования.

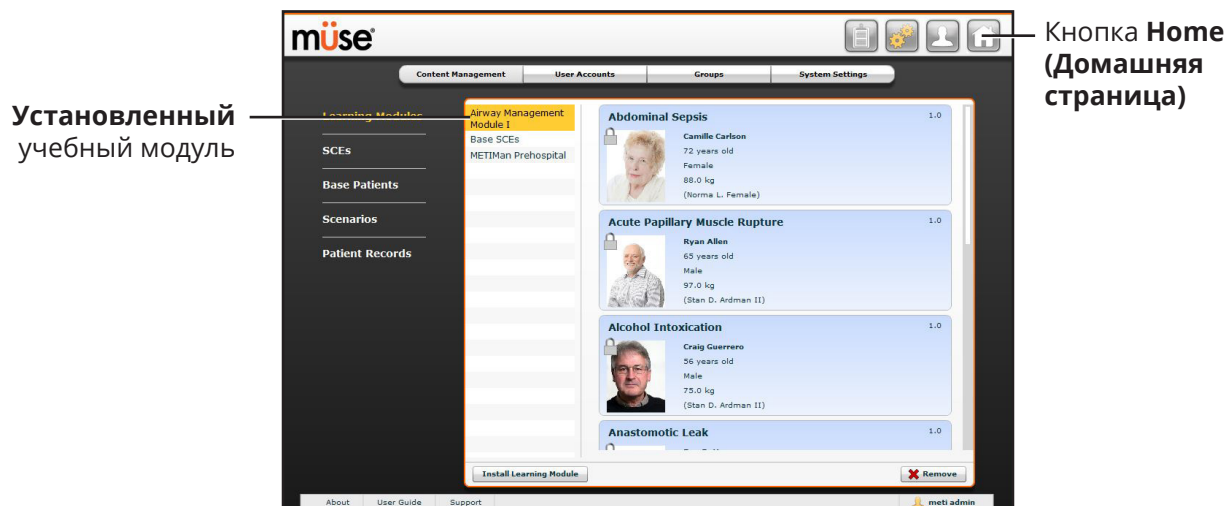

Панель Learning Modules (Учебные модули)


Для удаления учебного модуля из Müse

1. Выберите учебный модуль на панели Learning Modules (Учебные модули).

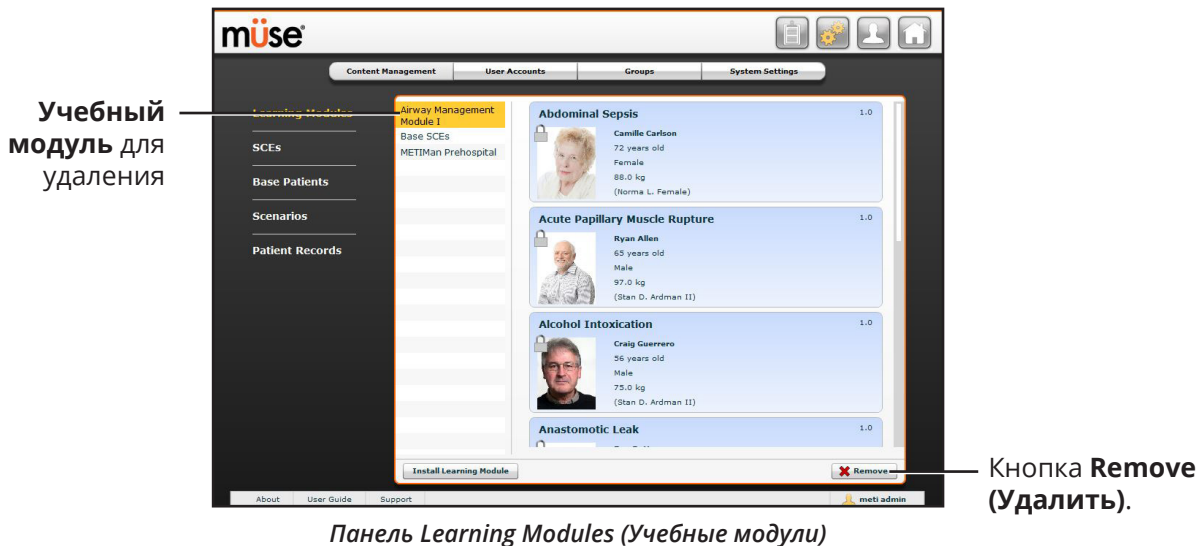

2. Нажмите кнопку Remove (Удалить).

Отображается предупреждение Remove Learning Module (Удалить учебный модуль).

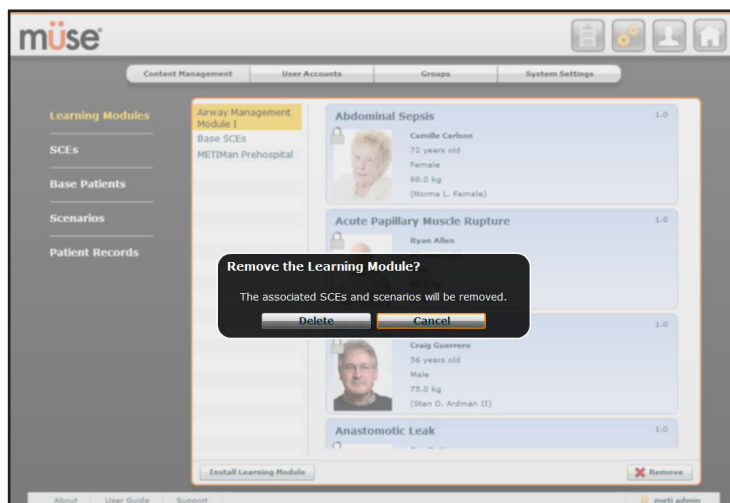

3. Нажмите Delete (Удалить).

Учебный модуль и все его SCE (автономные модули, отвечающие за конфигурирование системы) удалены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предварительно сконфигурированные учебные модули и базовые SCE не могут быть удалены. Если пользователь пытается удалить их, появляется сообщение об ошибке.