

INSTALLATION D'UN MODULE D'APPRENTISSAGE DANS MÜSE

Avant d'installer un module d'apprentissage de CAE Healthcare, assurez-vous que les fichiers du module d'apprentissage se trouvent sur un périphérique de stockage externe ou sur le disque dur de la station de travail de l'instructeur.

IMPORTANT : Vous devez avoir établi une connexion avec votre simulateur avant d'installer un module d'apprentissage.

Accéder à Müse

1. Connectez-vous au logiciel Müse en utilisant un compte disposant des privilèges appropriés.
La page d'accueil apparaît.
2. Cliquez sur le bouton **System Administration** (Administration du système) en haut à droite.
L'écran d'administration du système apparaît.



Le bouton **System Administration** (Administration du système)

La page d'accueil

3. Dans l'écran d'administration du système, cliquez sur **Content Management** (Gestion de contenu).

Le bouton **Content Management** (Gestion du contenu)



Le panneau Learning Modules (Modules d'apprentissage)

Lorsque le bouton Content Management (Gestion du contenu) est sélectionné, le panneau Learning Module (Module d'apprentissage) apparaît par défaut. Si un autre panneau a été sélectionné, retournez au panneau Learning Module (Module d'apprentissage) en cliquant sur le lien **Learning Modules** (Modules d'apprentissage).

Dans le panneau Learning Module (Module d'apprentissage), il est possible d'installer ou de supprimer des modules d'apprentissage.



Pour installer un module d'apprentissage dans Müse

1. Cliquez sur **Install Learning Module** (Installer un module d'apprentissage).


La boîte de dialogue Select file to upload (Sélectionner le fichier à télécharger) s'affiche.



2. Naviguez jusqu'au fichier du module d'apprentissage correct sur le périphérique de stockage externe ou à l'emplacement sur le disque dur où le fichier du module d'apprentissage est enregistré.

L'extension du fichier est **.mlm**.


3. Sélectionnez le fichier et cliquez sur **Select** (Sélectionner) ou **Open** (Ouvrir).

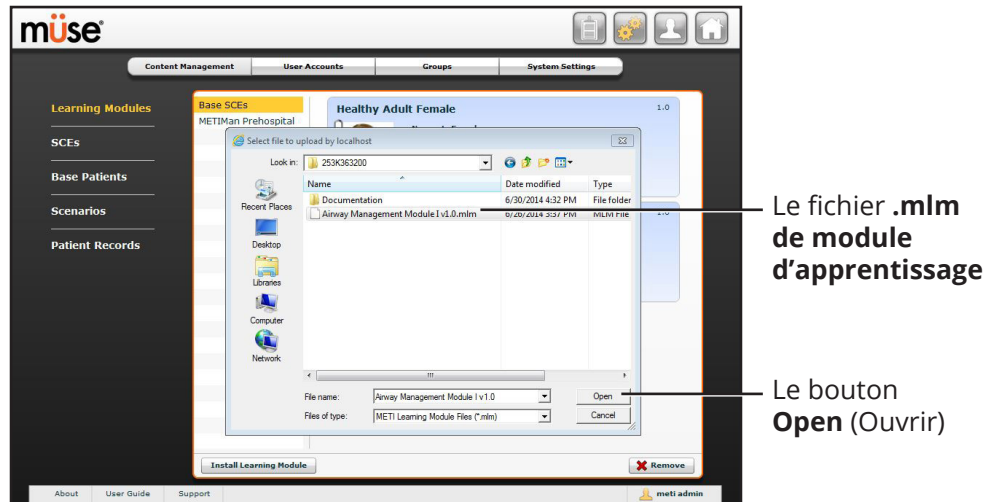

Le panneau Learning Modules (Modules d'apprentissage)

4. Actualisez l'écran en cliquant sur le bouton **Home** (Accueil) dans le logiciel Muse, puis revenez au panneau Learning Module (Module d'apprentissage).

Le module d'apprentissage apparaît alors dans le panneau Learning Modules (Modules d'apprentissage) et peut être utilisé.

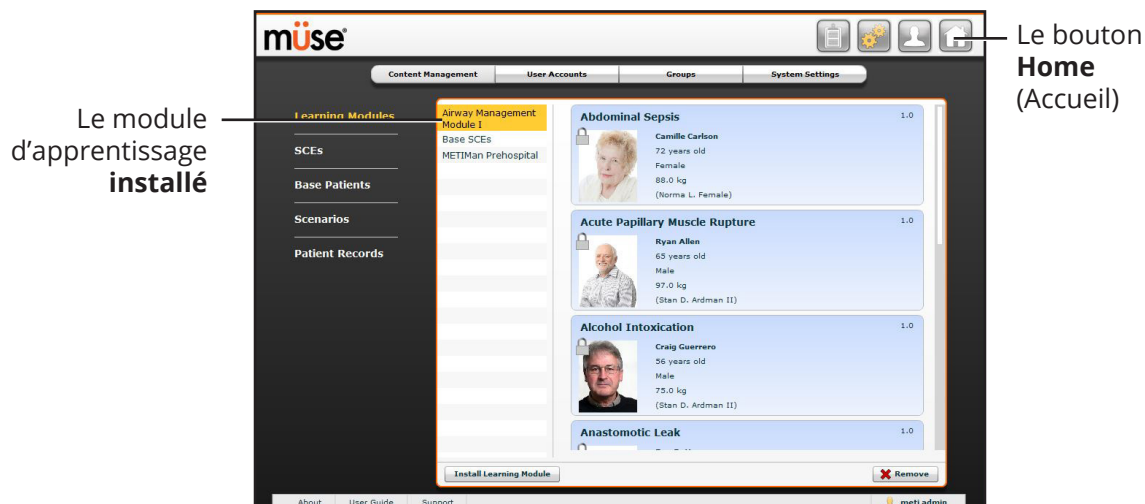


Le panneau Learning Modules (Modules d'apprentissage)

Pour supprimer un module d'apprentissage dans Müse

1. Sélectionnez un module d'apprentissage dans le panneau Learning Module (Module d'apprentissage).

Le module d'apprentissage à supprimer

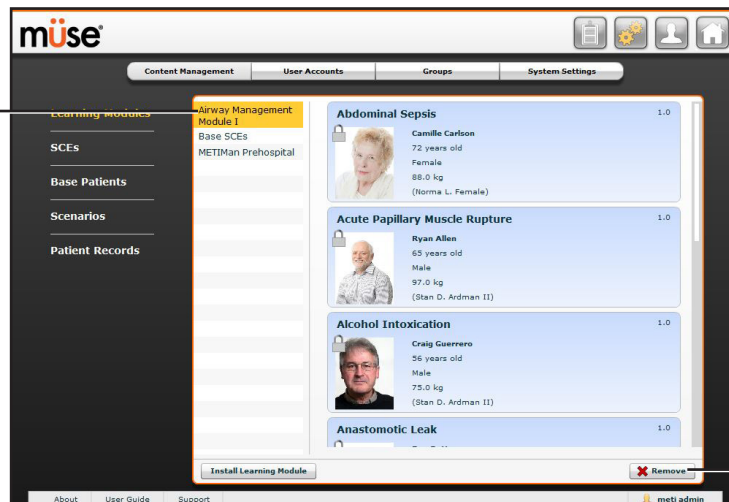


Le panneau Learning Modules (Modules d'apprentissage)

Le bouton **Remove** (Supprimer)

2. Cliquez sur le bouton **Remove** (Supprimer).

L'avertissement Remove Learning Module (Supprimer le module d'apprentissage) s'affiche.

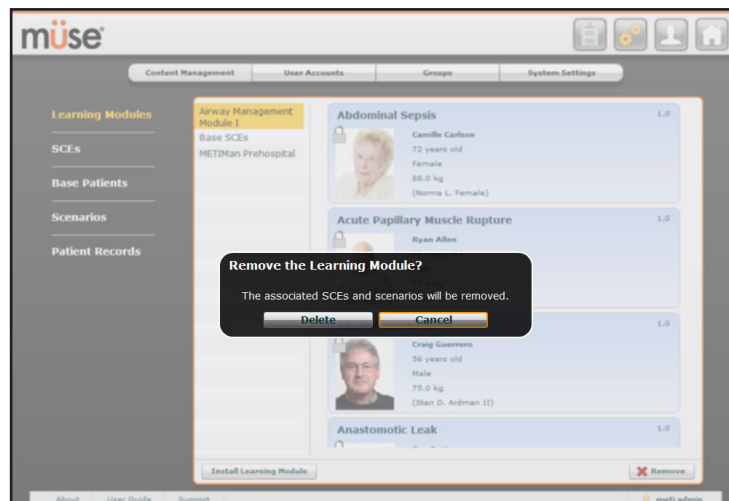

Le panneau Learning Modules (Modules d'apprentissage)

3. Cliquez sur **Delete** (Effacer).

Le module d'apprentissage et toutes ses SCE sont supprimés.

REMARQUE : Les modules d'apprentissage préconfigurés et les SCE de base ne peuvent pas être supprimés. Si un utilisateur tente de les supprimer, un message d'échec apparaît.